


# FitoroiD<sup>neo</sup>

## Disturbi emorroidali

Allevia dolore, bruciore e prurito proteggendo la mucosa

con **HELYDOL®** e olio essenziale di **Melaleuca**

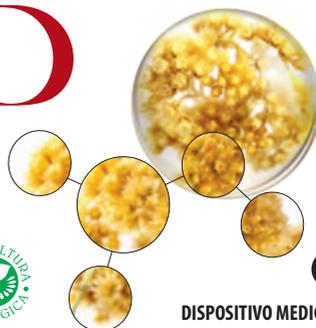

CE 0373

DISPOSITIVO MEDICO Classe IIb

### BIOPOMATA ENDORETTALE

**NeoFitoroid bioPomata** è un dispositivo medico a base di complessi molecolari vegetali, che svolge un'azione **lenitiva e protettiva** della mucosa ano-rettale utile per contrastare i fastidi (dolore, bruciore e prurito), l'irritazione e l'infiammazione, presenti in caso di emorroidi.

#### COME AGISCE

L'azione di **NeoFitoroid** è ottenuta grazie a **Helydol®**, un estratto secco costituito dalla frazione lipofila purificata di una specifica selezione di Elicriso che, **arricchito con Aloe, Rusco, oli vegetali ed essenziali**, calma l'irritazione, protegge la mucosa e ne favorisce la normalizzazione attraverso **3 meccanismi d'azione**:

- 1. Mucoadesivo:** aderisce alla mucosa formando un film ad effetto barriera che la protegge dal contatto con gli agenti irritanti;
  - 2. Lubrificante:** riduce lo sfregamento con le feci, così da proteggere dall'irritazione e dalla congestione perianale;
  - 3. Antiossidante:** protegge la mucosa dai radicali liberi alleviando indirettamente l'infiammazione.
- Inoltre **NeoFitoroid crea un ambiente sfavorevole alla crescita dei microrganismi**, esplicando un'ulteriore azione protettiva e di riduzione del prurito. Le sue **proprietà rinfrescanti** conferiscono un rapido sollievo dai fastidi.

**NeoFitoroid** non contiene cortisonici né anestetici e, grazie al suo meccanismo d'azione, non irrita e non secca la mucosa.



Tubo da 40 ml, contiene applicatore endorettale

#### INDICAZIONI

**NeoFitoroid bioPomata** è indicato per il trattamento delle **emorroidi** (interne ed esterne) e **dei sintomi** ad esse associati quali **dolore, bruciore e prurito anale e perianale**. Può essere utilizzato **anche in presenza di ragadi anali**.

**NeoFitoroid bioPomata** può essere utile anche in **prevenzione e in tutte le situazioni** che possono indurre **irritazione e/o congestione** della zona anale e perianale (stitichezza, diarrea, alimentazione e stili di vita scorretti). **NeoFitoroid bioPomata è adatto anche in gravidanza e durante l'allattamento**.

#### MODO D'USO

Per un'applicazione esterna, spalmare e massaggiare delicatamente sulla zona anale e perianale. Per un'applicazione interna, servirsi dell'apposita cannula endorettale da avvitare al tubo. Applicare una quantità di pomata sufficiente a ricoprire la parte affetta. Utilizzare il prodotto dopo l'evacuazione e dopo un accurato e delicato lavaggio della zona anale e perianale. Per ottenere un effetto preventivo dall'irritazione dovuta a sfregamento, il trattamento può essere effettuato prima dell'evacuazione, ricordandosi di applicare comunque il prodotto anche dopo. Dopo l'utilizzo svitare la cannula, pulirla accuratamente con acqua calda e sapone e chiudere il tubo della pomata. È possibile ripetere l'applicazione più volte al giorno, anche a distanza ravvicinata, e per periodi prolungati.

## COMPOSIZIONE

**Sostanze funzionali:** Estratti secchi di Elicriso sommità fiorite frazione lipofila (Helydol®)\* e Rusco radice\*; Gel fogliare disidratato di Aloe vera\*; Soluzione acquosa di Elicriso sommità fiorite\*; Estratto oleoso di Iperico sommità fiorite\*; Olio di Jojoba\*; Burro di Karité\*; Oli essenziali di: Melaleuca, Cipresso e Menta piperita.

Contiene inoltre: gliceril stearato, trigliceride caprilico/caprico, distearato di saccarosio, stearato di saccarosio, alcool cetilstearylco, glicerina vegetale, triidrossistearina, oli vegetali, oli vegetali idrogenati, cera candelilla, gomma xanthan, acido citrico, tocoferoli, sodio silicato, alcool benzilico, potassio sorbato, sodio deidroacetato, olio di Girasole.

*\*Ingrediente da Agricoltura Biologica*

**Non contiene SLS e SLES, derivati del petrolio, parabeni, PEG, coloranti e profumi di sintesi.**

## AVVERTENZE

Non utilizzare se presente ipersensibilità o allergia individuale verso uno o più componenti.

Nel caso in cui i sintomi non migliorano si consiglia di consultare il medico.

Conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Tenere fuori dalla portata dei bambini. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.

## SCADENZA

Vedere la scadenza riportata sulla confezione. Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata.

Dopo l'apertura si consiglia di utilizzare il prodotto entro 4 mesi.

## CONFEZIONE VENDITA

**Tubo da 40 ml.** Contiene applicatore endoretale.

**Data ultima revisione:** Maggio 2015

