


OroBen

• Afte • Gengiviti • Piccole lesioni
• Igiene orale quotidiana

Riduce il dolore, protegge
e favorisce la guarigione

COLLUTORIO

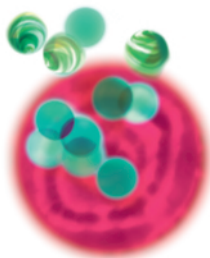

con **Resinox^{FP}**,
complesso molecolare naturale
di polisaccaridi, resine e flavonoidi



DISPOSITIVO MEDICO Classe IIa

OroBen Collutorio orale è un dispositivo medico che riduce il dolore e favorisce la guarigione di afte, stomatiti aftose ricorrenti, gengive infiammate e piccole lesioni della bocca dovute ad esempio a trattamenti dentari o all'uso di apparecchi ortodontici e dentiere.

COME AGISCE

OroBen Collutorio agisce grazie a **Resinox FP** un complesso molecolare naturale frutto della Ricerca Aboca, composto da polisaccaridi, resine e flavonoidi che creano sulla mucosa una barriera attiva dalla duplice azione:

1. PROTETTIVA-IDRATANTE

Forma un film adesivo sulla lesione o l'area infiammata che limita il contatto con agenti esterni, patogeni o irritanti che contrastano il naturale processo di guarigione e rigenerazione tissutale.

2. ANTIOSSIDANTE

Protegge la mucosa dall'azione irritante dei radicali liberi.

Grazie a questi meccanismi, il prodotto svolge **un'azione antinfiammatoria indiretta** e favorisce la riparazione tissutale riducendo i tempi di guarigione.

Inoltre l'olio essenziale di menta, esplica un'azione rinfrescante lasciando in bocca una piacevole sensazione di freschezza, utile anche a ridurre l'alitosi che spesso accompagna le gengiviti.

OroBen Collutorio permette di raggiungere ogni parte del cavo orale, mediante sciacqui e gargarismi, consente la rimozione di agenti irritanti e favorisce quindi il controllo del microambiente, l'igiene e la protezione della bocca.

INDICAZIONI

Coadiuvante specifico per il trattamento di afte, stomatiti aftose ricorrenti e gengive infiammate. Può essere usato anche per piccole lesioni della bocca dovute ad esempio a trattamenti dentari o all'uso di apparecchi ortodontici e dentiere. In caso di particolare sensibilità può essere utilizzato come protezione preventiva della mucosa orale anche per periodi prolungati. Adatto anche per bambini sopra i 6 anni. Innocuo se accidentalmente ingerito durante l'applicazione.

L'elevata concentrazione di sostanze funzionali può determinare un leggero deposito sul fondo del flacone; è sufficiente una leggera agitazione per ottenerne la dispersione omogenea.

MODO D'USO

Agitare il flacone prima dell'uso. Si consiglia di utilizzare circa 10 ml di collutorio con l'apposito misurino, 2 o 3 volte al giorno, effettuando sciacqui e gargarismi per almeno un minuto. Il prodotto può essere usato puro o diluito in poca acqua.

Per l'utilizzo nei bambini si consiglia il prodotto diluito.

Evitare l'assunzione di bevande o cibi per almeno 15 minuti dall'applicazione, in modo da favorire l'adesione alla mucosa. Dopo l'uso chiudere bene il flacone e lavare accuratamente il misurino dosatore.

COMPOSIZIONE

Sostanze funzionali: Resinox FP, complesso molecolare naturale di polisaccaridi (da Aloe vera*), flavonoidi (da Camomilla*) e resine (da Mirra).

Contiene inoltre: Soluzione idroalcolica; Glicerina vegetale; Alcool etilico da grano biologico*, Olio essenziale di Menta Piperita; Aromi naturali; Estratto di Liquirizia*; Gomma xanthan.

**Ingrediente da Agricoltura Biologica*

Non contiene conservanti.

AVVERTENZE

Non utilizzare se presente ipersensibilità o allergia individuale verso uno o più componenti.

Conservare in luogo fresco, asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Tenere fuori dalla portata dei bambini. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.

Se il sintomo persiste, consultare il medico per escludere eventuali cause sistemiche o di origine dentale che richiedono altri tipi di trattamenti.

SCADENZA

Vedere la scadenza riportata sulla confezione. Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata. Si consiglia di usare il prodotto entro 6 mesi dall'apertura.

CONFEZIONE: Flacone in vetro da 150 ml.

Contiene misurino dosatore CE 0373

Idrati 150 ml - Anidri 30 ml

Lic. UTF IT00PG - A00035A - Alcool 20% vol.

Completa la linea OroBen Gel orale.

DATA ULTIMA REVISIONE: Novembre 2018

AFTE, GENGIVITI E PICCOLE LESIONI

La mucosa orale e le gengive possono essere soggette a stati infiammatori acuti, spesso ricorrenti o cronici quali stomatiti, gengiviti e piccole lesioni.

La stomatite aftosa, o più comunemente afta, è una lesione ulcerativa localizzata e di dimensioni variabili che coinvolge uno o più punti della mucosa all'interno della cavità orale. Tali lesioni sono generalmente autolimitanti, ovvero tendono spontaneamente alla guarigione nell'arco di una o due settimane, tuttavia sono generalmente recidivanti e molto dolorose tanto da creare difficoltà nel mangiare, bere o parlare.

Stati infiammatori più diffusi possono coinvolgere invece le gengive ed essere conseguenti ad una errata igiene orale (accumulo di placca o errato utilizzo dello spazzolino e del filo interdentale), a trattamenti dentari o all'utilizzo di apparecchi o dentiere il cui impiego può talora causare anche piccole lesioni che interessano le gengive o altri punti della mucosa all'interno della cavità orale.



CE 0477



Aboca S.p.A. Società Agricola - Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia - www.aboca.com

Azienda con sistema di gestione qualità ISO 9001 e ISO 13485 e sistema di gestione ambientale ISO 14001 certificati.