


# OroBen

- Afte • Gengiviti
- Piccole lesioni

**Riduce il dolore, protegge  
e favorisce la guarigione**

**GEL ORALE**

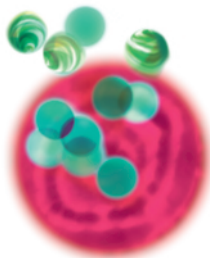

con **Resinox<sup>FP</sup>**,  
complesso molecolare naturale  
di polisaccaridi, resine e flavonoidi



## DISPOSITIVO MEDICO Classe IIa

**OroBen Gel orale** è un dispositivo medico che riduce il dolore e favorisce la guarigione di afte, stomatiti aftose ricorrenti, gengive infiammate e piccole lesioni della bocca dovute ad esempio a trattamenti dentari o all'uso di apparecchi ortodontici e dentiere.

### COME AGISCE

OroBen Gel orale agisce grazie a **Resinox FP** un complesso molecolare naturale frutto della Ricerca Aboca, composto da polisaccaridi, resine e flavonoidi che creano sulla mucosa una barriera attiva dalla duplice azione:

#### 1. PROTETTIVA-IDRATANTE

Forma un film adesivo sulla lesione o l'area infiammata che limita il contatto con agenti esterni, patogeni o irritanti che contrastano il naturale processo di guarigione e rigenerazione tissutale.

#### 2. ANTIOSSIDANTE

Protegge la mucosa dall'azione irritante dei radicali liberi.

Grazie a questi meccanismi, il prodotto svolge **un'azione antinfiammatoria indiretta** e favorisce la riparazione tissutale riducendo i tempi di guarigione.

Inoltre l'olio essenziale di menta, esplica un'azione rinfrescante lasciando in bocca una piacevole sensazione di freschezza.

**Il tubo di piccolo formato è pratico da usare e consente un'applicazione localizzata del prodotto.**

### INDICAZIONI

Coadiuvante specifico per il trattamento di afte, stomatiti aftose ricorrenti e gengive infiammate. Può essere usato, anche per periodi prolungati, in caso di piccole lesioni della bocca dovute ad esempio a trattamenti dentari o all'uso di apparecchi ortodontici e dentiere. Adatto anche per bambini sopra i 3 anni. Innocuo se ingerito. Non provoca bruciore.

### MODO D'USO

Applicare una piccola quantità di gel 3 o 4 volte al giorno o più, secondo necessità, direttamente sulla parte interessata aiutandosi eventualmente con le dita, adeguatamente pulite, o con un bastoncino cotonato. Evitare l'assunzione di bevande o cibi per almeno 15 minuti dall'applicazione, in modo da favorire l'adesione alla parte interessata. Chiudere accuratamente il tubo dopo ciascuna applicazione.

In caso di gengive irritate, applicare il prodotto favorendone l'adesione con un leggero massaggio.

Prima dell'applicazione di apparecchi ortodontici o dentiere, massaggiare la parte interessata.

## COMPOSIZIONE

**Sostanze funzionali: Resinox FP**, complesso molecolare naturale di polisaccaridi (da Aloe vera\* e Altea\*), flavonoidi (da Camomilla\*) e resine (da Mirra).

Contiene inoltre: Acqua; Glicerina vegetale; Sodio alginato; Olio essenziale di Menta piperita; Xilitolo; Estratto di Liquirizia\*; Carragenina; Glucosio; Acido citrico; Sodio deidroacetato; Potassio sorbato; Alcool benzilico.

*\*Ingrediente da Agricoltura Biologica*

Non contiene derivati del petrolio, parabeni, PEG, coloranti e profumi di sintesi, NO OGM.

## AVVERTENZE

Non utilizzare se presente ipersensibilità o allergia individuale verso uno o più componenti.

Conservare in luogo fresco, asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Tenere fuori dalla portata dei bambini. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.

Se il sintomo persiste, consultare il medico per escludere eventuali cause sistemiche o di origine dentale che richiedono altri tipi di trattamenti.

## SCADENZA

Vedere la scadenza riportata sulla confezione. Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata. Si consiglia di usare il prodotto entro 6 mesi dall'apertura.

## CONFEZIONE

Tubo da 15 ml. Completa la linea OroBen Collutorio.

**DATA ULTIMA REVISIONE:** Ottobre 2018.

### AFTE, GENGIVITI E PICCOLE LESIONI

La mucosa orale e le gengive possono essere soggette a stati infiammatori acuti, spesso ricorrenti o cronici quali stomatiti, gengiviti e piccole lesioni.

La stomatite aftosa, o più comunemente afta, è una lesione ulcerativa localizzata e di dimensioni variabili che coinvolge uno o più punti della mucosa all'interno della cavità orale. Tali lesioni sono generalmente autolimitanti, ovvero tendono spontaneamente alla guarigione nell'arco di una o due settimane, tuttavia sono generalmente recidivanti e molto dolorose tanto da creare difficoltà nel mangiare, bere o parlare.

Stati infiammatori più diffusi possono coinvolgere invece le gengive ed essere conseguenti ad una errata igiene orale (accumulo di placca o errato utilizzo dello spazzolino e del filo interdentale), a trattamenti dentari o all'utilizzo di apparecchi o dentiere il cui impiego può talora causare anche piccole lesioni che interessano le gengive o altri punti della mucosa all'interno della cavità orale.



**Aboca S.p.A. Società Agricola** - Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia - [www.aboca.com](http://www.aboca.com)

Azienda con sistema di gestione qualità ISO 9001 e ISO 13485 e sistema di gestione ambientale ISO 14001 certificati.