

Fitonasal

Biopomata

Contrasta l'irritazione proteggendo e rigenerando la mucosa nasale e la zona perinasale



DISPOSITIVO MEDICO Classe IIa



BIOPOMATA - Bambini e Adulti

RINORREA, SECCHENZA E ATROFIA DELLA MUCOSA

L'interno del naso è rivestito da una mucosa che ha la funzione di "filtrare" l'aria inspirata e di provvedere alla sua umidificazione e riscaldamento, condizioni necessarie per favorire una corretta respirazione. Una ottimale funzionalità della mucosa può venire meno in caso di contatto con agenti patogeni (virus e batteri), condizioni patologiche quali sinusiti e riniti, condizioni ambientali avverse (allergeni, polveri, inquinamento, aria secca, freddo) o di utilizzo di alcuni tipi di farmaci (antistaminici, mucolitici, antinfiammatori e decongestionanti). Ne consegue una irritazione della mucosa che si manifesta con sintomi quali **rinorrea** (comunemente definita "naso che cola"), **secchezza o atrofia della mucosa**. In particolare nella rinorrea i continui strofinamenti con il fazzoletto, o, nel caso dei bambini piccoli, con le mani o gli indumenti, provocano spesso irritazione, screpolature e abrasioni all'interno delle narici e sulla cute della zona intorno al naso.

RINORREA (NASO CHE COLA)

È caratterizzata da **ipersecrezione di muco e mucosa edematosa**. Questi fenomeni sono responsabili della fastidiosa sensazione di "naso chiuso" che accompagna il comune **raffreddore** e le **riniti, anche di natura allergica**. In questi casi per prima cosa è necessario **rimuovere il muco**: in particolare nel bambino è utile ricorrere a lavaggi nasali con soluzioni saline isotoniche o ipertoniche. In generale, una volta liberato il naso, è comunque fondamentale **contrastare l'infiammazione** perché questa è alla base dell'ipersecrezione del muco.

SECCHENZA E ATROFIA

È caratterizzata da **disidratazione della mucosa nasale** percepita con sensazione di **bruciore e/o dolore** e spesso accompagnata da **formazione di croste**, la cui rimozione può provocare sanguinamento. Può essere di **natura patologica** (fase finale della rinorrea, forme particolari di rinite -vasomotoria o allergica-, sinusiti), **legata all'uso di farmaci** (quali decongestionanti nasali, antistaminici, cortisonici, mucolitici) o **derivante da fattori ambientali e/o comportamentali** (permanenza in ambienti secchi o eccessivamente riscaldati, attività sportive prolungate, etc.).

FITONASAL con REDRAPHEN è un dispositivo medico innovativo che, **rivestendo la mucosa nasale di un film emolliente e protettivo ad effetto barriera**, limita il contatto con gli agenti esterni irritanti svolgendo così un'azione **antinfiammatoria indiretta**.

Il prodotto, formulato con ingredienti da Agricoltura Biologica, **agisce grazie a Redraphen, complesso molecolare naturale di resine da incenso e polisaccaridi da Aloe uniti all'olio di Jojoba**.

AZIONE SPECIFICA IN CASO DI RINORREA

- FITONASAL con REDRAPHEN contrasta l'irritazione della mucosa e contribuisce a mantenere il naso libero più a lungo, promuovendo il riequilibrio della secrezione del muco.** FITONASAL con REDRAPHEN può esplicitare la sua massima efficacia se applicato dopo opportuna pulizia del naso e in particolare nei bambini dopo lavaggio con soluzioni nasali.
- FITONASAL con REDRAPHEN favorisce la guarigione, previene e attenua le irritazioni e le screpolature della mucosa e della cute esterna del naso:** applicato sulla zona perinasale idrata e contrasta l'irritazione facilitando il risanamento di abrasioni e screpolature che si verificano a causa dell'essiccazione del muco e dei frequenti strofinamenti.

AZIONE SPECIFICA SU SECCHENZA E ATROFIA

- FITONASAL con REDRAPHEN protegge la mucosa e la cute perinasale, ne favorisce la rigenerazione e promuove il ripristino dell'equilibrio idro-lipidico dei tessuti.** FITONASAL con REDRAPHEN facilita la rimozione delle croste, anche a seguito di interventi chirurgici.
- FITONASAL con REDRAPHEN usato in prevenzione**, nelle condizioni che possono provocare secchezza, **previene la disidratazione e protegge la mucosa e la cute perinasale**. Può essere utile anche prima di intraprendere attività sportive prolungate.

Il prodotto non contiene eucaliptolo e mentolo. FITONASAL con REDRAPHEN dona inoltre una piacevole sensazione di freschezza.

INDICAZIONI

FITONASAL con REDRAPHEN è indicato in tutti i casi in cui la mucosa nasale è irritata:

- **Rinorrea** (naso che cola), dovuta a raffreddore e a varie forme di riniti acute e croniche.
- **Secchezza e atrofia della mucosa nasale** dovuta a: **Condizioni patologiche acute e croniche** (quali sinusite, rinite allergica, rinite vasomotoria); **Trattamenti farmacologici** (quali decongestionanti, cortisonici, antistaminici, in particolare se applicati in forma di spray e aerosol); **Contatto con agenti esterni irritanti** (quali polvere, fumo, smog, pollini o microrganismi).
- **In prevenzione**, nelle condizioni che possono provocare secchezza e **prima di intraprendere attività sportive prolungate**.

FITONASAL con REDRAPHEN è anche indicato nei casi di **irritazione, screpolature e abrasioni della cute delle narici e della zona perinasale**.

FITONASAL con REDRAPHEN è stato appositamente studiato per consentirne l'uso a **partire dal sesto mese di vita**. Il prodotto è formulato con ingredienti da Agricoltura Biologica e non contiene eucalipto e mentolo. Il prodotto può essere utilizzato **anche per periodi prolungati**.

MODO D'USO

Si consiglia di dosare un'adeguata quantità di prodotto sul dito a seconda dell'età e delle dimensioni delle narici (indicativamente circa un chicco di caffè per gli adulti e circa la metà per i bambini). Applicarlo all'interno della narice e massaggiare delicatamente con movimenti dal basso verso l'alto. In caso di irritazione, screpolature o abrasioni della cute, applicare il prodotto anche sulla pelle intorno al naso. Il prodotto va applicato dopo una accurata pulizia del naso (in particolare nei bambini dopo il lavaggio con acque nasali). Ripetere l'applicazione 3-4 volte nell'arco della giornata ed in particolare la sera prima di andare a letto. In caso di terapia con farmaci quali decongestionanti, cortisonici e antistaminici applicare il prodotto 10-15 minuti dopo il trattamento farmacologico.



AVVERTENZE

Non utilizzare in presenza di gravi lesioni della mucosa e epistassi. Non utilizzare se presente ipersensibilità o allergia individuale verso uno o più componenti.

Conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Tenere fuori dalla portata dei bambini. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.

COMPOSIZIONE

Sostanze funzionali: Redraphen, complesso molecolare naturale di resine (da Incenso), polisaccaridi (da Aloe vera)*, Olio di Jojoba*. Contiene inoltre: acqua, stearato di saccarosio, distearato di saccarosio, gliceril stearato, alcool cetilstearylco, trigliceride caprilico/caprico, gomma xanthan, acido citrico, tocoferoli, sodio silicato, alcool benzilico, sodio deidroacetato, olio di Girasole e olio essenziale di Lavanda fiori. **Ingrediente da Agricoltura Biologica*

SCADENZA

Verdere la scadenza riportata sulla confezione. Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata. Si consiglia di usare il prodotto entro 6 mesi dall'apertura.

Confezione: tubo da 10 ml.

Data ultima revisione: Dicembre 2018