


FitoroiD^{neo}

Troubles hémorroïdaires

Soulage la douleur, les brûlures et les démangeaisons en protégeant la muqueuse

Avec **HELYDOL**
et huile essentielle de **Melaleuca**

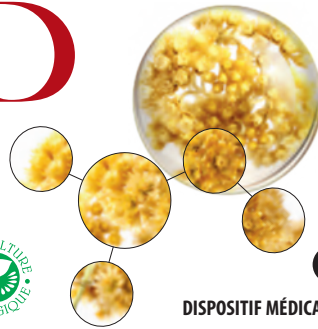

CE 0373

DISPOSITIF MÉDICAL Classe IIb

POMMADE BIO ENDORECTALE

NeoFitoroid pommade bio est un dispositif médical à base de complexes moléculaires végétaux, qui exerce une action **apaisante et protectrice** de la muqueuse ano-rectale utile pour lutter contre les troubles (douleurs, brûlures et démangeaisons), l'irritation et l'inflammation, présentes en cas d'hémorroïdes.

COMMENT AGIT-ELLE ?

L' action de **NeoFitoroid** est obtenue grâce à **Helydol**, un extrait sec constitué de la fraction lipophile purifiée d'une sélection spécifique d'Hélichryse qui, **enrichie en Aloe, Fragon faux-houx, huiles végétales et essentielles**, soulage l'irritation, protège la muqueuse et en favorise la normalisation à travers **3 mécanismes d'action** :

1. **Muco-adhésif** : adhère à la muqueuse en formant un film à l'effet barrière qui la protège du contact avec les agents irritants ;
2. **Lubrifiant** : réduit le frottement avec les selles, de manière à protéger contre l'irritation et la congestion périanale ;
3. **Antioxydant** : protège la muqueuse des radicaux libres en soulageant indirectement l'inflammation.

En outre, **NeoFitoroid crée un environnement défavorable à la croissance des micro-organismes**, en exerçant une ultérieure action protectrice et de réduction des démangeaisons. Ses **propriétés rafraichissantes** procurent un soulagement immédiat des gênes. **NeoFitoroid** ne contient pas de corticoïdes ni d'anesthésiques et, grâce à son mécanisme d'action, elle n'irrite et ne dessèche pas la muqueuse.



Tube de 40 ml, contient un applicateur endorectal

INDICATIONS

NeoFitoroid Pommade Bio est indiquée pour le traitement des **hémorroïdes** (internes et externes) **et des symptômes** associés tels que **douleurs, brûlures et démangeaisons anales et périanales**. Elle peut être utilisée **même en présence de fissures anales**.

NeoFitoroid Pommade bio peut être aussi utile **en prévention et dans toutes les situations** pouvant générer une **irritation et/ou une congestion** de la zone anale et périanale (constipation, diarrhée, alimentation et styles de vie inappropriés).

NeoFitoroid Pommade bio peut être **également utilisée durant la grossesse et l'allaitement**.

MODE D'EMPLOI

Pour une application externe, étaler et masser délicatement sur la zone anale et périanale. Pour une application interne, utiliser la canule endorectale prévue à cet effet en la vissant sur le tube. Appliquer une quantité de pommade suffisante pour recouvrir la partie affectée. Utiliser le produit après l'évacuation et après avoir soigneusement et délicatement nettoyé la zone anale et périanale. Pour un effet préventif contre l'irritation due au frottement, le traitement peut être effectué avant l'évacuation, en appliquant toutefois le produit également après. Après l'utilisation, dévisser la canule, la nettoyer soigneusement à l'eau chaude et au savon puis refermer le tube de la pommade. L'application peut être répétée plusieurs fois par jour, même à quelques heures d'intervalle, et pendant de longues périodes.

COMPOSITION

Substances fonctionnelles : Extraits secs de sommités fleuries d'Hélichryse fraction lipophile (Helydol)* et racine de Fragon faux-houx* ; Gel de feuilles d'Aloe Vera déshydraté* ; Solution aqueuse de sommités fleuries d'Hélichryse* ; Extrait huileux de sommités fleuries de Millepertuis* ; Huile de Jojoba* ; Beurre de Karité* ; Huiles essentielles de : Melaleuca, Cyprès et Menthe poivrée.

Contient aussi : stéarate de glycéryle, triglycérade caprique/caprique, distéarate de saccharose, stéarate de saccharose, alcool cétylstéarylique, glycérine végétale, trihydroxystéarine, huiles végétales, huiles végétales hydrogénées, cire de candelilla, gomme xanthane, acide citrique, tocophérols, silicate de sodium, alcool benzylique, sorbate de potassium, déhydroacétate de sodium, huile de Tournesol.

**Ingrédient issu de l'Agriculture Biologique*

Ne contient pas de SLS et SLES, dérivés du pétrole, parabens, PEG, colorants et parfums de synthèse.

MISES EN GARDE

Ne pas utiliser le produit en cas d'hypersensibilité ou d'allergie individuelle envers un ou plusieurs des composants. Si les symptômes persistent, il est conseillé de consulter un médecin. Conserver à une température ambiante, loin de toute source de chaleur et à l'abri de la lumière. Tenir hors de portée des enfants. La date de péremption se réfère au produit intact et conservé correctement.

PÉREMPTION

Voir la date de péremption indiquée sur la boîte. Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée. Il est recommandé d'utiliser le produit dans les 4 mois après ouverture.

BOITE EN VENTE

Tube de 40 ml. Contient un applicateur endorectal.

Date de la dernière révision : 06/2015



 **Aboca S.p.A. Società Agricola**

Località Aboca, 20

52037 Sansepolcro (AR) - Italia

www.aboca.com

Certified



Corporation