


# Oroben

- Aphtes • Gingivites
- Petites plaies de la bouche
- Hygiène buccale quotidienne

Diminue la douleur, protège  
et favorise la guérison

**BAIN DE BOUCHE**

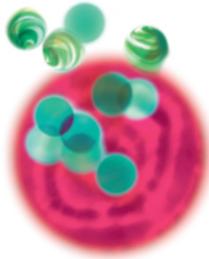

avec **Resinox<sup>FP</sup>**,  
complexe moléculaire naturel de  
polysaccharides, résines et flavonoïdes



AVEC INGRÉDIENTS  
ISSUS DE L'AGRICULTURE  
BIOLOGIQUE

**DISPOSITIF MÉDICAL Classe IIa**

**Oroben Bain de bouche** est un dispositif médical qui diminue la douleur et favorise la guérison des aphtes, des stomatites aphteuses récurrentes, des gencives enflammées et des petites lésions buccales dues, par exemple, à des traitements dentaires ou à l'utilisation d'appareils orthodontiques et de dentiers.

## COMMENT AGIT-IL ?

Oroben Bain de bouche agit grâce à **Resinox FP**, un complexe moléculaire naturel, fruit de la Recherche Aboca, composé de polysaccharides, résines et flavonoïdes qui créent, sur la muqueuse, une barrière active à double action :

### 1. PROTECTRICE - HYDRATANTE

Il forme un film adhésif sur la plaie ou la zone enflammée. Ce film va permettre de limiter le contact avec des agents externes, pathogènes ou irritants qui, en temps normal, empêchent le processus naturel de guérison et de régénération tissulaire.

### 2. ANTIOXYDANTE

Il protège la muqueuse contre l'action irritante des radicaux libres.

Grâce à ces mécanismes, le produit exerce **une action anti-inflammatoire indirecte** et favorise la réparation des tissus, en réduisant les temps de guérison.

De plus, l'huile essentielle de menthe produit une action rafraîchissante en laissant une agréable sensation de fraîcheur dans la bouche. Il peut être également utilisé pour réduire l'halitose qui accompagne souvent les gingivites.

Oroben Bain de bouche permet d'atteindre chaque partie de la cavité buccale grâce à des bains de bouche et des gargarismes. Il permet d'éliminer les agents irritants et favorise donc le contrôle du micro-environnement, l'hygiène et la protection de la bouche.

## INDICATIONS

Adjuvant spécifique pour le traitement des aphtes, stomatites aphteuses récurrentes et gencives enflammées. Il peut être également utilisé en cas de petites lésions buccales dues, par exemple, à des traitements dentaires ou à l'utilisation d'appareils orthodontiques et de dentiers. En cas de sensibilité buccale particulière, il peut être utilisé comme protection préventive de la muqueuse, même pendant des périodes prolongées. Peut être utilisé à partir de 6 ans. Inoffensif en cas d'ingestion accidentelle durant l'application.

La concentration élevée de substances fonctionnelles peut générer un léger dépôt au fond du flacon. Il suffit d'agiter légèrement le flacon pour obtenir sa dispersion homogène.

## MODE D'EMPLOI

Agiter le flacon avant l'utilisation. Il est conseillé d'utiliser environ 10 ml de produit à l'aide du gobelet doseur spécifique, 2 ou 3 fois par jour, en effectuant des bains de bouche et des gargarismes pendant au moins une minute. Le produit peut être utilisé pur ou dilué dans un peu d'eau.

Pour les enfants, il est conseillé d'utiliser le produit dilué.

Éviter la consommation de boissons ou d'aliments pendant au moins 15 minutes après l'application, de manière à favoriser l'adhérence du produit à la muqueuse. Bien refermer le flacon après l'utilisation et laver soigneusement le gobelet doseur.

## COMPOSITION

**Substances fonctionnelles : Resinox FP**, complexe moléculaire naturel composé de polysaccharides (issus de l'Aloe vera\*), de flavonoïdes (issus de la Camomille\*) et de résines (issues de la Myrrhe).

Contient aussi : Solution hydro-alcoolique ; Glycérine végétale ; Alcool éthylique issu de blé biologique\* ; Huile essentielle de Menthe poivrée ; Arômes Naturels ; Extrait de Réglisse\* ; Gomme xanthane.

*\*Ingrédient issu de l'Agriculture Biologique*

Ne contient pas de conservateurs.

## MISES EN GARDE

Ne pas utiliser le produit en cas d'hypersensibilité ou d'allergie individuelle envers un ou plusieurs des composants. Conserver dans un lieu frais, sec, loin de toute source de chaleur et à l'abri de la lumière. Tenir hors de portée des enfants. La date de péremption se réfère au produit intact et conservé correctement.

Si les symptômes persistent, consulter le médecin afin d'exclure toutes causes systémiques ou d'origine dentaire nécessitant d'autres types de traitement.

## PÉREMPTION

Voir la date de péremption indiquée sur l'emballage. Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée. Il est recommandé d'utiliser le produit dans les 6 mois qui suivent l'ouverture.

**EMBALLAGE** : Flacon en verre de 150 ml.

Contient un gobelet doseur  0373

Hydrates 150 ml - Anhydres 30 ml

Lic. UTF IT00PG - A00035A - Alcool 20% vol.

Complète la ligne Oroben Gel oral.

**DATE DE LA DERNIÈRE RÉVISION** : 11/2018

### APHTES, GINGIVITES ET PETITES PLAIES DE LA BOUCHE

La muqueuse orale et les gencives peuvent être sujettes à des états inflammatoires aigus, souvent récurrents ou chroniques tels que les stomatites, gingivites et petites plaies.

La stomatite aphteuse, plus communément appelée aphte, est une lésion ulcérate localisée et de taille variable qui affecte un ou plusieurs points de la muqueuse à l'intérieur de la cavité buccale. Ces lésions sont généralement auto-résolutives, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à guérir spontanément en une ou deux semaines. Toutefois, elles sont généralement récidivantes et très douloureuses, au point de créer des difficultés à manger, à boire ou à parler.

Des états inflammatoires généralisés peuvent en revanche impliquer les gencives. Ils sont dus, le plus souvent, à une mauvaise hygiène buccale (accumulation de plaque ou utilisation incorrecte de la brosse à dents et du fil dentaire), à des traitements dentaires ou à l'utilisation d'appareils ou de dentiers. Ceux-ci peuvent parfois provoquer de petites plaies affectant les gencives ou d'autres points de la muqueuse à l'intérieur de la cavité buccale.



 0477

 **Aboca S.p.A. Società Agricola** - Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia - [www.aboca.com](http://www.aboca.com)

Entreprise avec système de management de la qualité ISO 9001 et ISO 13485 et système de management environnemental ISO 14001 certifiés.