


Oroben

- Aphtes • Gingivites
- Petites plaies de la bouche

Diminue la douleur, protège
et favorise la guérison

GEL ORAL

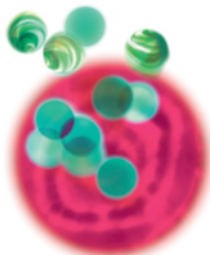

avec **Resinox^{FP}**,
complexe moléculaire naturel de
polysaccharides, résines et flavonoïdes



DISPOSITIF MÉDICAL Classe IIa

OroBen Gel oral est un dispositif médical qui diminue la douleur et favorise la guérison des aphtes, des stomatites aphteuses récurrentes, des gencives enflammées et des petites lésions buccales dues, par exemple, à des traitements dentaires ou à l'utilisation d'appareils orthodontiques et de dentiers.

COMMENT AGIT-IL ?

OroBen Gel oral agit grâce à **Resinox FP**, un complexe moléculaire naturel, fruit de la Recherche Aboca, composé de polysaccharides, résines et flavonoïdes qui créent, sur la muqueuse, une barrière active à double action :

1. PROTECTRICE - HYDRATANTE

Il forme un film adhésif sur la plaie ou la zone enflammée. Ce film va permettre de limiter le contact avec des agents externes, pathogènes ou irritants qui, en temps normal, empêchent le processus naturel de guérison et de régénération tissulaire.

2. ANTIOXYDANTE

Il protège la muqueuse contre l'action irritante des radicaux libres.

Grâce à ces mécanismes, le produit exerce **une action anti-inflammatoire indirecte** et favorise la réparation des tissus, en réduisant les temps de guérison. De plus, l'huile essentielle de menthe produit une action rafraîchissante en laissant une agréable sensation de fraîcheur dans la bouche.

Le tube de petite taille est pratique à utiliser et permet une application localisée du produit.

INDICATIONS

Adjuvant spécifique pour le traitement des aphtes, stomatites aphteuses récurrentes et gencives enflammées. Il peut être également utilisé pendant de longues périodes, en cas de petites lésions buccales dues, par exemple, à des traitements dentaires ou à l'utilisation d'appareils orthodontiques et de dentiers. Peut être utilisé à partir de 3 ans. Inoffensif si ingéré. Ne provoque pas de brûlure.

MODE D'EMPLOI

Appliquer une petite quantité de gel, 3 ou 4 fois par jour ou plus si nécessaire, directement sur la partie affectée. L'application du produit peut se faire à l'aide des doigts préalablement nettoyés ou d'un coton-tige. Éviter la consommation de boissons ou d'aliments pendant au moins 15 minutes après l'application, de manière à favoriser l'adhérence du produit sur la partie affectée. Fermer soigneusement le tube après chaque application. En cas de gencives irritées, appliquer le produit avec un léger massage pour favoriser son adhérence. Avant l'application d'appareils orthodontiques ou de dentiers, appliquer le produit en massant délicatement la partie affectée.

COMPOSITION

Substances fonctionnelles : Resinox FP, complexe moléculaire naturel composé de polysaccharides (issus de l'Aloe vera* et de la Guimauve Officinale*), de flavonoïdes (issus de la Camomille*) et de résines (issues de la Myrrhe). Contient aussi : Eau ; Glycérine végétale ; Alginate de sodium ; Huile essentielle de Menthe poivrée ; Xylitol ; Extrait de Réglisse* ; Carraghénane ; Glucose ; Acide citrique ; Déhydroacétate de Sodium ; Sorbate de Potassium ; Alcool benzylique. **Ingrédient issu de l'Agriculture Biologique*

Sans dérivés du pétrole, sans parabens, sans PEG, sans colorants et parfums de synthèse, SANS OGM.

MISES EN GARDE

Ne pas utiliser le produit en cas d'hypersensibilité ou d'allergie individuelle envers un ou plusieurs des composants. Conserver dans un lieu frais, sec, loin de toute source de chaleur et à l'abri de la lumière. Tenir hors de portée des enfants. La date de péremption se réfère au produit intact et conservé correctement.

Si les symptômes persistent, consulter le médecin afin d'exclure toutes causes systémiques ou d'origine dentaire nécessitant d'autres types de traitement.

PÉREMPTION

Voir la date de péremption indiquée sur l'emballage. Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée. Il est recommandé d'utiliser le produit dans les 6 mois qui suivent l'ouverture.

EMBALLAGE

Tube de 15 ml. Complète la ligne OroBen Bain de bouche.

DATE DE LA DERNIÈRE RÉVISION : 10/2018.

APHTES, GINGIVITES ET PETITES PLAIES DE LA BOUCHE

La muqueuse orale et les gencives peuvent être sujettes à des états inflammatoires aigus, souvent récurrents ou chroniques tels que les stomatites, gingivites et petites plaies.

La stomatite aphteuse, plus communément appelée aphte, est une lésion ulcéraire localisée et de taille variable qui affecte un ou plusieurs points de la muqueuse à l'intérieur de la cavité buccale. Ces lésions sont généralement auto-résolutives, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à guérir spontanément en une ou deux semaines. Toutefois, elles sont généralement récidivantes et très douloureuses, au point de créer des difficultés à manger, à boire ou à parler. Des états inflammatoires généralisés peuvent en revanche impliquer les gencives. Ils sont dus, le plus souvent, à une mauvaise hygiène buccale (accumulation de plaque ou utilisation incorrecte de la brosse à dents et du fil dentaire), à des traitements dentaires ou à l'utilisation d'appareils ou de dentiers. Ceux-ci peuvent parfois provoquer de petites plaies affectant les gencives ou d'autres points de la muqueuse à l'intérieur de la cavité buccale.



Aboca S.p.A. Società Agricola - Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia - www.aboca.com
Entreprise avec système de management de la qualité ISO 9001 et ISO 13485 et système de management environnemental ISO 14001 certifiés.