


# Oroben

• Afty • Zapalenie dziąseł • Niewielkie rany • Codzienna higiena jamy ustnej

Zmniejsza ból, chroni  
i sprzyja gojeniu

PŁYN DO PŁUKANIA JAMY USTNEJ

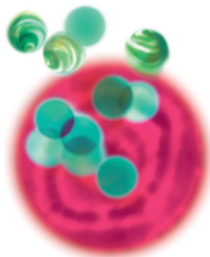

Z **Resinox<sup>FP</sup>**,  
naturalnym kompleksem molekularnym  
z polisacharydów, żywic i flawonoidów



ZE SKŁADNIKAMI  
Z UPRAW EKOLOGICZNYCH

## WYRÓB MEDYCZNY Klasy IIa

**Oroben Płyn do płukania jamy ustnej** jest wyrobem medycznym zmniejszającym ból i sprzyjającym gojeniu się aft, nawracającego aftowego zapalenia jamy ustnej, stanów zapalnych dziąseł i niewielkich ran w jamie ustnej wywołanych na przykład zabiegami dentystycznymi lub noszeniem aparatów ortodontycznych i protez zębowych.

### JAK DZIAŁA

Oroben Płyn do płukania jamy ustnej działa dzięki **Resinox FP**, naturalnemu kompleksowi molekularnemu, owocowi badań Aboca, złożonemu z polisacharydów, żywic i flawonoidów, tworzących na błonie śluzowej aktywną barierę o podwójnym działaniu:

#### 1. OCHRONNO-NAWILŻAJĄCYM

Tworzy powłokę ochronną na ranie lub miejscu ze stanem zapalnym. Powłoka ta ogranicza kontakt z zewnętrznymi czynnikami, chorobotwórczymi lub drażniącymi, przeszkadzającymi w naturalnym procesie gojenia i regeneracji tkanki.

#### 2. ANTYOKSYDACYJNYM

Chroni błonę śluzową przed drażniącym działaniem wolnych rodników.

Dzięki tym mechanizmom produkt ma **pośrednie działanie przeciwzapalne** i sprzyja naprawie tkanek, zmniejszając czas gojenia. Ponadto olejek eteryczny z mięty działa odświeżająco, pozostawiając w ustach przyjemne uczucie świeżości. Pomaga również zmniejszyć przykry zapach, często towarzyszący zapaleniu dziąseł. Oroben Płyn do płukania jamy ustnej pozwala dotrzeć do wszystkich części jamy ustnej i gardła. Dokładne płukanie pozwala na usunięcie czynników podrażniających i sprzyja kontroli mikrośrodowiska, zachowaniu higieny i ochronie jamy ustnej.

### WSKAZANIA

Środek wspomagający leczenie aft, nawracającego aftowego zapalenia jamy ustnej i stanów zapalnych dziąseł. Może być stosowany również w przypadku występowania niewielkich ran w jamie ustnej, wywołanych na przykład zabiegami dentystycznymi lub noszeniem aparatów ortodontycznych i protez zębowych. W przypadku szczególnej wrażliwości może być stosowany jako profilaktyczna ochrona błony śluzowej jamy ustnej, nawet przez dłuższy czas. Nadaje się również dla dzieci powyżej 6. roku życia. Produkt jest nieszkodliwy w razie przypadkowego połknięcia podczas stosowania. Wysokie stężenie substancji czynnych może powodować tworzenie się niewielkiej warstwy osadu na dnie butelki. Wystarczy lekko potrząsnąć, by uzyskać jednolity roztwór.

### SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem wstrząsnąć butelką. Zaleca się stosowanie około 10 ml płynu do płukania odmierzanego dołączoną miarką dozującą, 2 lub 3 razy dziennie, wykonując dokładne płukanie przez co najmniej minutę. Produkt może być stosowany bez rozcieńczenia lub rozcieńczony w niewielkiej ilości wody. W przypadku stosowania u dzieci zaleca się rozcieńczenie produktu. Unikać przyjmowania płynów lub pokarmów przez co najmniej 15 minut po zastosowaniu dla lepszego przylegania preparatu do błony śluzowej. Po użyciu należy szczelnie zamknąć butelkę i dokładnie umyć miarkę dozującą.

## SKŁAD

**Substancje czynne: Resinox FP**, naturalny kompleks molekularny polisacharydów (z Aloesu zwyczajnego\*), flawonoidów (z Rumianku pospolitego\*) i żywic (z Mirry).

Zawiera ponadto: roztwór wodno-alkoholowy; glicerynę roślinną; alkohol etylowy pochodzący z pszenicy bio\*, olejek eteryczny z mięty pieprzowej; aromaty naturalne; ekstrakt z lukrecji\*; gumę ksantanową.

*\*Składnik z Upraw Ekologicznych*

Nie zawiera konserwantów.

## OSTRZEŻENIA

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub alergii na jeden lub więcej składników.


Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i światła. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Okres ważności dotyczy produktu zamkniętego i właściwie przechowywanego.

W przypadku nieustąpienia objawów należy skonsultować się z lekarzem, by wykluczyć ewentualne przyczyny ogólnoustrojowe lub pochodzenia zębowego, wymagające innego rodzaju leczenia.

## OKRES WAŻNOŚCI

Patrz data ważności podana na opakowaniu. Nie używać po upływie podanej daty ważności. Zaleca się zużycie produktu w ciągu 6 miesięcy od otwarcia.

**OPAKOWANIE:** Butelka szklana 150 ml.

Zawiera miarkę dozującą  0373

Hydraty 150 ml - Bezwodne 30 ml

Lic. UTF IT00PG A00035A - Alkohol 20% obj.

Linie uzupełnia Orobien Żel doustny.

**DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI:** 11/2018

### AFTY, ZAPALENIA DZIĄSEŁ I NIEWIELKIE RANY

W błonie śluzowej jamy ustnej i na dziąsłach mogą pojawiać się ostre stany zapalne, często powracające i przewlekłe, takie jak aftowe zapalenia jamy ustnej, zapalenia dziąseł i niewielkie rany.

Aftowe zapalenie dziąseł, zwane częściej aftami, to wrzodziejące miejscowe zmiany o różnych rozmiarach, dotyczące jednego lub więcej miejsc na błonie śluzowej w jamie ustnej. Tego rodzaju rany zwykle ustępują samoistnie, goją się w ciągu jednego lub dwóch tygodni, często jednak nawracają i są bardzo bolesne, stwarzając trudności w przyjmowaniu pokarmów, napojów lub w mówieniu.

Najczęściej występujące stany zapalne dotyczą jednak dziąseł i mogą wynikać z nieodpowiedniej higieny jamy ustnej (odkładanie się płytki nazębnej lub niewłaściwe stosowanie szczoteczki i nici dentystycznej), z zabiegów dentystycznych lub noszenia aparatów ortodontycznych i protez zębowych, które mogą czasami wywoływać niewielkie zranienia dziąseł lub innych miejsc na błonie śluzowej w jamie ustnej.



 0477



**Aboca S.p.A. Società Agricola** - Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia - [www.aboca.com](http://www.aboca.com)

Spółka posiada certyfikowane systemy zarządzania jakością ISO 9001 i ISO 13485 oraz systemy zarządzania środowiskiem ISO 14001.