


# FitoroiD<sup>neo</sup>

## Afecțiuni hemoroidale

Calmează durerea, arsurile  
și pruritul, protejând mucoasa

Cu HELYDOL și ulei esențial de Arbore de ceai

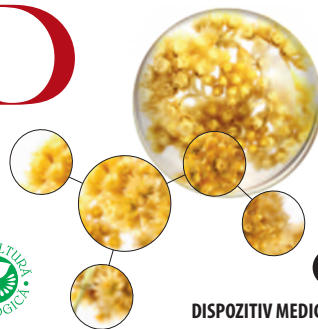

CE 0373

DISPOZITIV MEDICAL Clasa IIb

### BIOUNGUENT ANORECTAL

**NeoFitoroid BioUnguent** este un dispozitiv medical pe bază de complexe moleculare vegetale, care are o acțiune **protectoare și calmantă** a mucoasei anorectale, util pentru combaterea disconfortului (durere, arsuri și prurit), iritației și inflamației, prezente în cazul hemoroizilor.

### CUM ACȚIONEAZĂ

Acțiunea **NeoFitoroid** este obținută datorită **Helydol**, un extract uscat constituit din fracția lipofilă purificată prin intermediul unei selecții specifice a Helichrysumului care, **îmbunătățită cu Aloe, Ghimpe și uleiuri vegetale esențiale**, calmează iritația, protejează mucoasa și favorizează normalizarea prin **3 mecanisme de acțiune**:

1. **Mucoadeziv:** aderă la mucoasă formând o peliculă cu efect de barieră care protejează contra contactului cu agenții iritanți;
2. **Lubrifiant:** reduce frecarea cu fecalele, protejând astfel contra iritației și congestiei perianale;
3. **Antioxidant:** protejează mucoasa contra radicalilor liberi calmând indirect inflamația.

De asemenea, **NeoFitoroid creează un mediu nefavorabil pentru creșterea microorganismelor**, având o ulterioară acțiune protectoare și de reducere a pruritului. **Proprietățile sale de reîmprospătare** oferă o calmare rapidă a disconfortului. **NeoFitoroid** nu conține cortizoni și anestezici, iar datorită mecanismului său de acțiune nu irită și nu usucă mucoasa.



Tub de 40 ml  
cu aplicator anorectal.

### INDICAȚII

**NeoFitoroid bioUnguent este** indicat pentru tratamentul **hemoroizilor** (interni și externi) **și al simptomelor** asociate cu aceștia, cum ar fi **durerea, arsurile și pruritul anal și perianal**. Poate fi utilizat **și în cazul fisurilor anale**.

**NeoFitoroid bioUnguent** poate fi util și pentru **prevenție și în toate situațiile** care pot induce **iritații și / sau congestionare** a zonei anale și perianale (constipație, diaree, alimentație și stil nesănătos de viață).

**NeoFitoroid bioUnguent** este adecvat **și în timpul sarcinii și al alăptării**.

### MOD DE UTILIZARE

Pentru aplicare externă, ungeți și masați delicat zona anală și perianală. Pentru aplicare internă, utilizați canula anorectală aferentă, înșurubând-o pe tub. Aplicați o cantitate de unguent suficientă pentru a acoperi partea afectată. Utilizați produsul după evacuare și după o spălare temeinică și delicată a zonei anale și perianale. Pentru a preveni iritația produsă de frecare, tratamentul poate fi efectuat înainte de evacuare, amintindu-vă să aplicați apoi din nou produsul. După utilizare deșurubați canula, spălați-o temeinic cu apă caldă și săpun și închideți tubul de unguent. Aplicarea poate fi repetată de mai multe ori pe zi, chiar și la intervale scurte și pentru perioade îndelungate.

## COMPOZIȚIE

**Substanțe funcționale:** Frațiuni lipofilă a extractelor uscate din partea aeriană înflorită a Helichrysumului (Helydol)\* și rădăcină de Ghimpe\*; Gel deshidratat din frunze de Aloe vera\*; Soluție apoasă din partea aeriană înflorită a Helichrysumului\*; Extract uleios din partea aeriană înflorită a Sunătorii\*; Ulei de Jojoba\*; Unt de Karitè\*; Uleiuri esențiale de: Arbore de ceai, Chiparos și Mentă.

Conține de asemenea: gliceril stearat, trigliceride de acid caprilic / capric, distearat de zaharoză, stearat de zaharoză, alcool cetilstearilic, glicerină vegetală, trihidroxistearină, uleiuri vegetale, uleiuri vegetale hidrogenate, ceară de Candellila, gumă xantan, acid citric, tocoferoli, sodiu silicat, alcool benzilic, sorbat de potasiu, dehidroacetat de sodiu, ulei de floarea soarelui.

*\*Ingrediente din Agricultură Ecologică*

**Nu conține SLS și SLES, derivați de petrol, parabeni, PEG, coloranți și parfumuri de sinteză.**

## AVERTIZĂRI

A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate sau alergie individuală la una sau mai multe componente ale produsului. În cazul în care simptomele nu se îmbunătățesc, vă recomandăm să consultați medicul. A se păstra la temperatura camerei și ferit de surse de lumină și căldură. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Data de expirare se referă la produsul păstrat în ambalajul original și în condiții corespunzătoare.

## DATA DE EXPIRARE

A se vedea data expirării înscrisă pe ambalaj. A nu se utiliza după data expirării indicată. A se folosi preferabil în 4 luni de la deschidere.

## PREZENTARE AMBALAJ LA VÂNZARE

**Tub de 40 ml.** Conține aplicator anorectal.

**Data ultimei verificări:** 06/2015

