


Oroben

• Afte • Gingivite • Mici leziuni

Reduce durerea, protejează
și favorizează vindecarea

GEL ORAL

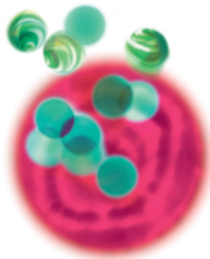

cu **Resinox^{FP}**,
complex molecular natural
din polizaharide, rășini și flavonoide



CU INGREDIENTE OBTINUTE
DIN AGRICULTURA
ECOLOGICĂ

DISPOZITIV MEDICAL Clasa IIa

OroBen Gel oral este un dispozitiv medical care reduce durerea și favorizează vindecarea aftelor, a stomatitelor aftoase recurente, a gingivitelor inflamate și a micilor leziuni de la nivelul gurii, cauzate, de exemplu, de tratamente dentare sau de utilizarea aparatelor ortodontice și a protezelor dentare.

CUM ACȚIONEAZĂ

OroBen Gel oral acționează datorită complexului molecular natural **Resinox FP**, rezultat al cercetării Aboca, alcătuit din polizaharide, rășini și flavonoide, care creează pe mucoasă o barieră activă cu acțiune dublă:

1. PROTECTIV-HIDRATANTĂ

Formează o peliculă adezivă pe leziune sau pe zona inflamată, care limitează contactul cu agenții externi, patogeni sau iritanți ce combat procesul natural de vindecare și regenerare tisulară.

2. ANTIOXIDANTĂ

Protejează mucoasa împotriva acțiunii iritante a radicalilor liberi.

Datorită acestor mecanisme, produsul desfășoară **o acțiune antiinflamatoare indirectă** și favorizează regenerarea tisulară, reducând durata de vindecare.

În plus, uleiul esențial de mentă are o acțiune răcoritoare, lăsând o senzație plăcută de prospețime în gură.

Tubul de format mic este practic și permite o aplicare localizată a produsului.

INDICAȚII

Adjuvant specific pentru tratamentul aftelor, al stomatitelor aftoase recurente și al gingiilor inflamate. Poate fi utilizat, și pe perioade prelungite, în cazul unor mici leziuni la nivelul gurii, cauzate, de exemplu, de tratamente dentare sau de folosirea unor aparate ortodontice sau proteze dentare. Potrivit și pentru copii peste 3 ani. Inofensiv în caz de ingerare. Nu creează arsuri.

MOD DE UTILIZARE

Aplicați o cantitate mică de gel de 3 sau 4 ori pe zi sau mai des, în funcție de nevoie, direct pe zona afectată; dacă este cazul, cu ajutorul degetelor curățate în mod corespunzător sau un bețișor cu vată. Evitați să consumați băuturi sau alimente cel puțin 15 minute după aplicare, pentru a favoriza aderența pe partea afectată. Închideți temeinic tubul după fiecare aplicare. În caz de gingii iritate, aplicați produsul cu un ușor masaj, pentru a favoriza aderența. Înainte de aplicarea aparatelor ortodontice sau a protezelor dentare, masați partea afectată.

COMPOZIȚIE

Substanțe funcționale: Resinox FP, complex molecular natural din polizaharide (din Aloe vera* și Nalbă mare*), flavonoide (din Mușețel*) și rășini (din Smirnă).

Conține, de asemenea: Apă; Glicerină vegetală; Alginat de sodiu; Ulei esențial de Mentă; Xilitol; Extract de Lemn dulce*; Caragenan; Glucoză; Acid citric; Dehidroacetat de sodiu; Sorbat de potasiu; Alcool benzilic.

**Ingrediente din Agricultura Ecologică*

Nu conține derivați din petrol, parabeni, PEG, coloranți și parfumuri de sinteză, FĂRĂ OMG.

AVERTIZĂRI

A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate sau alergii individuale la una sau mai multe componente ale produsului.

A se păstra într-un loc răcoros, uscat și ferit de surse de lumină și căldură. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Data expirării se referă la produsul păstrat în ambalajul original și în condiții corespunzătoare.

Dacă simptomul persistă, consultați medicul pentru a înlătura eventualele cauze sistemice sau de natură dentară, care necesită alte tipuri de tratament.

DATA DE EXPIRARE

A se vedea data expirării înscrisă pe ambalaj. A nu se utiliza după data expirării indicată. Vă recomandăm să utilizați produsul în termen de 6 luni de la deschidere.

AMBALAJ: tub de 15 ml. Completează gama Orobén apă de gură.

DATA ULTIMEI REVIZUIRI: 10/2018

AFTE, GINGIVITE ȘI MICI LEZIUNI

Mucoasa orală și gingiile pot suferi stări inflamatorii acute, adeseori recurente sau cronice cum ar fi stomatite, gingivite și mici leziuni. Stomatita aftoasă, mai des întâlnită sub denumirea de aftă, este o leziune ulcerativă localizată și de dimensiuni variabile care afectează unul sau mai multe puncte ale mucoasei din interiorul cavității bucale. Astfel de leziuni sunt de obicei autolimitatoare, adică tind să se vindece spontan în decurs de una sau două săptămâni; totuși, în general, acestea recidivează și sunt foarte dureroase, de natură să cauzeze dificultăți la mâncare, băut sau vorbit. Unele stări inflamatorii mai des întâlnite pot afecta însă și gingiile și pot fi cauzate de o igienă dentară incorectă (acumulare de tartar sau utilizare greșită a periuței de dinți și a aței dentare), de tratamente dentare sau de folosirea unor aparate sau proteze care pot cauza uneori mici leziuni ce afectează gingiile sau alte zone ale mucoasei din interiorul cavității bucale.



CE 0477



Aboca S.p.A. Società Agricola

Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia - www.aboca.com

Societate cu sistem de management al calității ISO 9001 și ISO 13485

și cu sistem de management de mediu certificat ISO 14001.