




# Oroben

- Aftas • Gingivites
- Pequenas lesões

Reduz a dor, protege  
e favorece a cicatrização

GEL ORAL

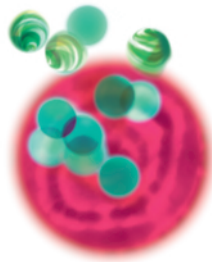

com Resin<sup>o</sup>x<sub>FP</sub>®,  
complexo molecular natural de  
polissacáridos, resinas e flavonoides



COM INGREDIENTES  
DE AGRICULTURA  
BIOLÓGICA

## DISPOSITIVO MÉDICO Classe IIa

**OroBen Gel oral** é um dispositivo médico que reduz a dor e favorece a cicatrização de aftas, estomatites aftosas recorrentes, gengivas inflamadas e pequenas lesões da boca devido, por exemplo, a tratamentos dentários ou ao uso de aparelhos e próteses dentárias.

### COMO ATUA

OroBen Gel oral atua graças a **Resin<sup>o</sup>x FP**, um complexo molecular natural fruto da Investigação Aboca, composto por polissacáridos, resinas e flavonoides que criam na mucosa uma barreira ativa com uma dupla ação:

#### 1. PROTETORA-HIDRATANTE

Forma uma película adesiva sobre a lesão ou área inflamada que limita o contacto com agentes externos, patogénicos ou irritantes que contrariam o processo natural de cicatrização e regeneração dos tecidos.

#### 2. ANTIOXIDANTE

Protege a mucosa da ação irritante dos radicais livres.

Graças a estes mecanismos, o produto exerce **uma ação anti-inflamatória indireta** e favorece a reparação dos tecidos, reduzindo o tempo de cicatrização. Além disso, o óleo essencial de Hortelã desenvolve uma ação refrescante, deixando uma agradável sensação de frescura na boca.

**O tubo de pequeno formato é prático de usar e permite uma aplicação localizada do produto.**

### INDICAÇÕES

Coadjuvante específico para o tratamento de aftas, estomatites aftosas recorrentes e gengivas inflamadas. Pode ser usado também por períodos prolongados, em caso de pequenas lesões da boca devido, por exemplo, a tratamentos dentários ou ao uso de aparelhos e próteses dentárias. Adequado também para crianças com mais de 3 anos. Inofensivo quando ingerido. Não provoca ardor.

### MODO DE USO

Aplicar uma pequena quantidade de gel 3 ou 4 vezes por dia ou mais, conforme a necessidade, diretamente sobre a parte afetada, eventualmente com a ajuda dos dedos, cuidadosamente limpos, ou com um cotonete. Evitar a ingestão de bebidas ou alimentos pelo menos até 15 minutos depois da aplicação, de modo a favorecer a adesão à parte afetada. Fechar bem o tubo após cada aplicação. Em caso de gengivas irritadas, aplicar o produto favorecendo a sua adesão com uma leve massagem. Antes da aplicação de aparelhos e próteses dentárias, massajar a parte afetada.



## COMPOSIÇÃO

**Substâncias funcionais: Resinox FP**, complexo molecular natural de polissacáridos (de Aloé vera\* e Alteia\*), flavonoides (de Camomila\*) e resinas (de Mirra).

Contém também: Água; Glicerina vegetal; Alginato de sódio; Óleo essencial de Hortelã-pimenta; Xilitol; Extrato de Alcaçuz\*; Carragenina; Glicose; Ácido cítrico; Desidroacetato de sódio; Sorbato de potássio; Álcool benzílico.

*\*Ingrediente de Agricultura Biológica*

Não contém derivados do petróleo, parabenos, PEG, corantes e perfumes de síntese; SEM OGM.

## ADVERTÊNCIAS

Não utilizar se existir hipersensibilidade ou alergia individual em relação a um ou mais componentes. Conservar em local fresco, seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. Manter fora do alcance das crianças. A data de validade refere-se ao produto íntegro e corretamente conservado. Se o sintoma persistir, consultar o médico para excluir eventuais causas sistêmicas ou de origem dentária que requerem outro tipo de tratamento.

## VALIDADE

Ver a data de validade na embalagem. Não utilizar após a data de validade indicada. Recomenda-se usar o produto no prazo de 6 meses após a abertura.

## EMBALAGEM

Tubo de 15 ml. Completa a linha OroBen Colutório.

**DATA DA ÚLTIMA REVISÃO:** 10/2018.

### AFTAS, GENGIVITES E PEQUENAS LESÕES

A mucosa oral e as gengivas podem estar sujeitas a estados inflamatórios agudos, muitas vezes recorrentes ou crônicos, como estomatites, gengivites e pequenas lesões.

A estomatite aftosa, mais conhecida por afta, é uma lesão ulcerativa localizada e de tamanho variável que envolve um ou mais pontos da mucosa dentro da cavidade oral. Estas lesões são normalmente autolimitadas, ou seja, tendem a cicatrizar espontaneamente dentro de uma ou duas semanas, contudo, são geralmente recorrentes e muito dolorosas, criando dificuldades em comer, beber ou falar.

No entanto, estados inflamatórios mais comuns podem envolver as gengivas e ser o resultado de uma má higiene oral (acumulação de placa ou utilização incorreta da escova de dentes e do fio dental), de tratamentos dentários ou do uso de aparelhos ou próteses dentárias que podem por vezes causar até pequenas lesões que afetam as gengivas ou outros pontos da mucosa dentro da cavidade oral.



CE 0477



**Aboca S.p.A. Società Agricola** - Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia

[www.aboca.com](http://www.aboca.com)

Empresa com sistema de gestão de qualidade ISO 9001 e ISO 13485 e sistema de gestão ambiental ISO 14001 certificados.