

Propolgemma

Acalma a irritação e reduz a dor de garganta e na cavidade oral

Complexo molecular sinérgico de resinas, polissacarídeos e ligninas
100% vegetal



100%
FÓRMULA NATURAL
BIODEGRADÁVEL

DISPOSITIVO MÉDICO Classe IIa

SPRAY FORTE ADULTOS

Propolgemma spray forte é um dispositivo médico inovador estudado especificamente para combater os estados irritativos da cavidade orofaríngea como a dor de garganta e outras doenças na cavidade oral (estomatites, aftas e gengivites).

Propolgemma é um complexo molecular exclusivo fruto da investigação Aboca, composto por resinas, polissacarídeos e ligninas obtido de rebentos de álamo preto. As abelhas recuperam a própolis europeia a partir das suas resinas. Graças a um processo de extração multifração particular, **Propolgemma** caracteriza-se pela presença dos **componentes principais típicos da própolis** juntamente com **compostos funcionais do tecido vegetal dos rebentos de álamo** (consulte mais informações na tabela).

Desta forma, a investigação Aboca desenvolveu um complexo molecular com capacidades de proteção particulares das mucosas da cavidade orofaríngea.

COMO ATUA


A **fração resinosa** e a **fração rica em compostos polissacarídeos e ligninas** atuam em sinergia formando uma **barreira de proteção** na mucosa inflamada que, em conjunto com as **propriedades antioxidantes dos flavonoides**, **combate indiretamente a inflamação**.

Esta camada protetora e ativa acalma o ardor e reduz a hipersensibilidade, aliviando a sensação de desconforto e facilitando a deglutição.

Além disso, as frações contidas em **Propolgemma** criam um ambiente desfavorável para o crescimento das bactérias.

INDICAÇÕES

Propolgemma spray forte é indicado no tratamento da **dor de garganta e das doenças na cavidade oral** (como estomatites, aftas e gengivites) associadas a ardor, dor e sensibilidade ao engolir.

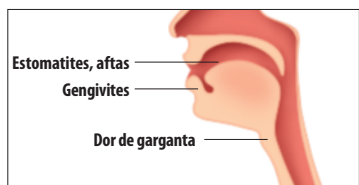

Também pode ser usado em caso de **pequenas lesões da boca** devidas, por exemplo, a tratamentos dentários ou ao uso de aparelhos ortodônticos e próteses dentárias.

O produto também pode ser utilizado como proteção preventiva, em todos os casos em que há exposição a agentes externos agressivos ou irritantes (frio, fumo, smog).

Recomenda-se a utilização a partir dos 12 anos de idade.

MODO DE USO

Agitar o frasco antes de usar. A embalagem contém o nebulizador numa saqueta selada. Quando utilizar pela primeira vez, retirar a tampa de alumínio do frasco e inserir o nebulizador. Com o nebulizador específico recomenda-se administrar **4 nebulizações na cavidade orofaríngea até 4 vezes por dia**. No caso de doenças localizadas, aplicar diretamente na área afetada. A possível presença de pequenos depósitos deve-se à elevada concentração dos extratos e não prejudica a qualidade do produto.

COMPOSIÇÃO

Substâncias funcionais: Propolgemma, complexo molecular de resinas, polissacarídeos e ligninas (obtido de rebentos de álamo preto, *Populus nigra L.*) em extrato hidroalcoólico multifração, titulado em **Flavonoides totais ≥ 2 mg/ml e Polissacarídeos** (com peso molecular superior a 20.000 Da) **$\geq 0,53$ mg/ml**.

Contém também: glicerina vegetal, água, aroma natural de citrinos, óleo essencial de laranja e óleo essencial de limão.

O processo de produção utilizado garante a ausência de pólen derivado dos rebentos de álamo.

ADVERTÊNCIAS

Não utilizar se existir hipersensibilidade ou alergia individual em relação a um ou mais componentes. Contraindicado nos indivíduos alérgicos a própolis e asmáticos. Se os sintomas persistirem, consulte o médico. Conservar à temperatura ambiente, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. Manter fora do alcance das crianças. A data de validade refere-se ao produto intacto e corretamente conservado.

VALIDADE

Ver a data de validade indicada na embalagem. Não utilizar após a data de validade indicada. Recomenda-se usar o produto no prazo de 3 meses após a abertura.

EMBALAGEM PARA VENDA

Frasco de vidro de 30 ml com spray nebulizador.

Hidratos 30 ml - Anidros 9 ml - Lic. UTF IT00PG - A00035A - Álcool 30% em vol.

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO: 03/2016.

PROPOLGEMMA: COMPLEXO MOLECULAR SINÉRGICO DE RESINAS, POLISSACARÍDEOS E LIGNINAS

Graças a uma investigação fitoquímica aprofundada e a processos de extração particulares, a partir dos rebentos de álamo preto foi possível reconhecer, extrair e unir duas frações de compostos: uma fração característica do exsudado resinoso do rebento e rica em componentes típicos da própolis, e outra fração rica em compostos macromoleculares exclusivos do tecido vegetal do rebento, em particular os polissacarídeos e as ligninas. A escolha de desenvolver uma formulação a partir dos rebentos de álamo preto está na base da inovação de Propolgemma, uma vez que a própolis de origem europeia é composta principalmente pelo exsudado resinoso deste tipo de rebentos.



Aboca S.p.A. Società Agricola - Loc. Aboca, 20
52037 Sansepolcro (AR) - Italia - www.aboca.com

Empresa com sistema de gestão de qualidade ISO 9001 e
ISO 13485 e sistema de gestão ambiental ISO 14001 certificados.

