

# FitoroiD<sup>neo</sup>

## Distúrbios hemorroidais

Alivia a dor, ardor e prurido  
protegendo a mucosa

Com Helydol e óleo essencial de Melaleuca



DISPOSITIVO MÉDICO Classe IIb

### BIOPOMADA ENDORRETAL

**NeoFitoroid biopomada** é um dispositivo médico à base de complexos moleculares vegetais, que possui uma ação **lenitiva e protetora** da mucosa anorretal útil para combater os incômodos (dor, ardor e prurido), a irritação e a inflamação, presentes em caso de hemorroidas.

#### COMO ATUA

A ação de **NeoFitoroid** é obtida graças a **Helydol**, um extrato seco constituído por uma fração lipófila purificada de uma seleção específica de Helicriso que, **enriquecido com Aloé, Azevinho, óleos vegetais e essenciais**, acalma a irritação, protege a mucosa e favorece a normalização através de **3 mecanismos de ação**:

1. **Mucoadesivo**: adere à mucosa formando uma película com efeito de barreira que a protege do contacto com os agentes irritantes;
2. **Lubrificante**: reduz a fricção com as fezes, de forma a proteger da irritação e da congestão perianal;
3. **Antioxidante**: protege a mucosa dos radicais livres, aliviando indiretamente a inflamação.

Além disso, **NeoFitoroid cria um ambiente desfavorável para o crescimento dos microrganismos** desenvolvendo uma ação protetora adicional e de redução do prurido. As suas **propriedades refrescantes** conferem um rápido alívio dos incômodos.

**NeoFitoroid** não contém corticóides nem anestésicos e, graças ao seu mecanismo de ação, não irrita e não seca a mucosa.



Tubo de 40 ml, contém aplicador endorretal

#### INDICAÇÕES

**NeoFitoroid bioPomada** é indicado no tratamento de **hemorroidas** (internas e externas) e dos sintomas associados às mesmas tais como **dor, ardor e prurido anal e perianal**. Pode ser utilizado **também na presença de fissuras anais**. **NeoFitoroid bioPomada** também pode ser útil **na prevenção e em todas as situações** que podem provocar **irritação e/ou congestão** da zona anal e perianal (obstipação, diarreia, alimentação e estilos de vida incorretos). **NeoFitoroid bioPomada** é adequado **também durante a gravidez e a amamentação**.

#### MODO DE USO

Para uma aplicação externa, aplicar e massajar delicadamente na zona anal e perianal. Para uma aplicação interna, utilizar a cânula endorretal específica apertada no tubo. Aplicar uma quantidade de pomada suficiente para cobrir a parte afetada. Utilizar o produto após a evacuação e depois de uma lavagem cuidadosa e delicada da zona anal e perianal. Para obter um efeito preventivo da irritação devido à fricção, o tratamento pode também ser efetuado antes da evacuação, recordando-se de aplicar o produto também depois.

Depois do uso, desenroskar a cânula, limpá-la cuidadosamente com água quente e sabonete e fechar o tubo da pomada. É possível repetir a aplicação várias vezes ao dia, mesmo em intervalos breves, e durante períodos prolongados.

### COMPOSIÇÃO

**Substâncias funcionais:** extratos secos de Helicriso, extremidades floridas fração lipófila (Helydol)\* e Azevinho, raiz\*; Gel foliar desidratado de Aloé vera\*; Solução aquosa de Helicriso, extremidades floridas\*; Extrato oleoso de Hipérico, extremidades floridas\*; Óleo de Jojoba\*; Manteiga de Karité\*; Óleos essenciais de: Melaleuca, Cipreste e Hortelã-pimenta.

*Contém também: estearato de glicerilo, triglicérido caprílico/cáprico, distearato de sacarose, estearato de sacarose, álcool cetilestearílico, glicerina vegetal, tri-hidroxistearina, óleos vegetais, óleos vegetais hidrogenados, cera candelilha, goma xantana, ácido cítrico, tocoferóis, silicato de sódio, álcool benzílico, sorbato de potássio, dehidroacetato de sódio, óleo de Girassol.*

*\*Ingrediente de Agricultura Biológica*

**Não contém SLS e SLES, derivados do petróleo, parabenos, PEG, corantes e perfumes sintéticos.**

### ADVERTÊNCIAS

Não utilizar se existir hipersensibilidade ou alergia individual em relação a um ou mais componentes.

Caso os sintomas não melhorem, é aconselhável consultar o médico.

Conservar à temperatura ambiente, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. Manter fora do alcance das crianças. A data de validade refere-se ao produto íntegro e corretamente conservado.

### VALIDADE

Ver data de validade na embalagem. Não utilizar após a data de validade indicada. É aconselhável utilizar o produto até 4 meses após a abertura.

### EMBALAGEM PARA VENDA

**Tubo de 40 ml.** Contém aplicador endorretal.

**Data da última revisão:** 06/2015

