

ImmunoMix

DIFESA NASO

**Coadiuvare la protezione
da agenti esterni
come virus e batteri**



PER ADULTI E BAMBINI
DAI 2 ANNI DI ETÀ

DISPOSITIVO MEDICO A BASE DI SOSTANZE
Ad azione non farmacologica

100%
FORMULA NATURALE
BIODEGRADABILE

senza
glutine
gluten
free

750
mOsm/Kg

CE 0477

SPRAY NASALE

ImmunoMix Difesa Naso è un dispositivo medico 100% naturale che **supporta i fisiologici meccanismi di difesa del naso**. Forma, infatti, uno **strato muco-adesivo** che **coadiuva la protezione della mucosa** da agenti esterni quali virus e batteri e **preserva l'integrità della barriera epiteliale** delle cavità nasali.

Inoltre, l'**osmolalità bilanciata e standardizzata** (750 mOsm/Kg) e l'**azione fisica di lavaggio** aiutano a **fluidificare e rimuovere il muco in eccesso e gli agenti patogeni** in esso intrappolati. Gli aromi naturali di Pino Mugo e Menta conferiscono una sensazione di freschezza.

Il prodotto agisce con un meccanismo d'azione fisiologico e non farmacologico e può essere utilizzato frequentemente anche per periodi prolungati perché non irrita e non secca la mucosa.


Il prodotto non contiene conservanti: la sua conservazione è garantita dal processo di produzione con sistema di filtrazione sterilizzante e confezionamento in ambiente microbiologicamente controllato.

Naturale e biodegradabile al 100%, ImmunoMix Difesa Naso non contiene sostanze di sintesi, semisintesi o geneticamente modificate.

INDICAZIONI

ImmunoMix Difesa Naso è indicato per **coadiuvare la protezione della mucosa nasale da agenti esterni come virus e batteri** che possono essere causa di infezione delle prime vie aeree. **ImmunoMix Difesa Naso** può essere utile anche in caso di congestione e irritazione delle cavità nasali. Il prodotto è indicato a partire dai 2 anni di età.

MODO D'USO

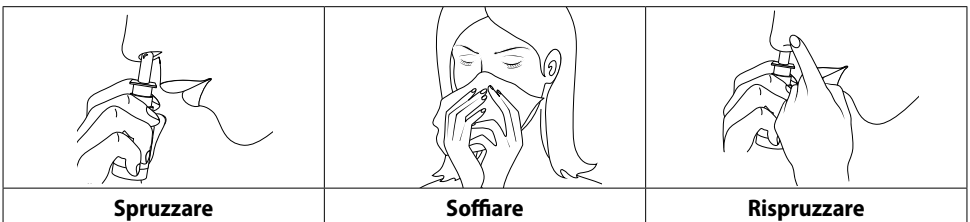

Bambini dai 2 ai 6 anni: erogare 1 nebulizzazione per narice.

Bambini dai 6 ai 12 anni: erogare 1 nebulizzazione per narice, soffiare il naso e ripetere l'applicazione.

Adulti e ragazzi dai 12 anni: erogare 2 nebulizzazioni per narice, soffiare il naso e ripetere l'applicazione.

Si consiglia di applicare **ImmunoMix Difesa Naso** più volte durante la giornata anche a distanza ravvicinata. Dopo ciascun utilizzo pulire l'erogatore con un panno umido e pulito e asciugare con cura. Per evitare il possibile diffondersi di agenti patogeni, il prodotto deve essere utilizzato da una sola persona.

AVVERTENZE

Non utilizzare se presente ipersensibilità o allergia verso uno o più componenti.
Utilizzare esclusivamente per via nasale. Evitare il contatto con gli occhi, nel caso lavarli con acqua.
Consultare il medico in caso di comparsa di sintomi persistenti.

COMPOSIZIONE

Frazione tanninica (da Amamelide), Frazione fenolica (da Sambuco), Salgemma (sale di estrazione mineraria non trattato chimicamente), Acqua, Glicerina vegetale, Aroma naturale di Pino Mugo e Aroma naturale di Menta.

SCADENZA

Vedere la scadenza riportata sulla confezione. Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata. La data di scadenza indicata sulla confezione resta invariata anche dopo la prima erogazione.

CONFEZIONE VENDITA

Soluzione nasale in flacone in vetro da 30 ml con nebulizzatore

Conservare a temperatura ambiente in luogo fresco, asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Tenere fuori dalla portata dei bambini. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.

Senza conservanti - Senza gas propellenti

DATA ULTIMA REVISIONE: Febbraio 2021

DISPOSITIVO MEDICO Classe IIa

 **Aboca S.p.A. Società Agricola**

Località Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia - www.aboca.com
Azienda con sistema di gestione qualità ISO 9001 e ISO 13485
e sistema di gestione ambientale ISO 14001 certificati.

Certified



Corporation

130003684/01
LEAIMINAPX-A