

# Fitonasal Spray

- Decongestiona e fluidifica
- Protegge e favorisce la rigenerazione della mucosa

## EFFETTO RINFRESCANTE

Senza conservanti

Senza gas propellenti.

Anche per un uso prolungato.

Ad azione decongestionante non farmacologica

**DISPOSITIVO MEDICO Classe IIa**



750  
mOsm/Kg



Con  
**Tannisal-FL**

Complesso molecolare naturale  
di Tannini, Flavonoidi e Salgemma

SPRAY CONCENTRATO

Fitonasal Spray concentrato è un **decongestionante protettivo** da utilizzare in tutti i casi di **raffreddore, allergia** e in generale, in presenza di **congestione e irritazione delle cavità nasali, legate a problematiche sia acute che croniche.**

Fitonasal Spray concentrato è un dispositivo medico la cui attività è data dall'insieme di tutte le componenti della formulazione. Tra queste di particolare importanza **TANNISAL-FL**, complesso molecolare naturale composto da Tannini, Flavonoidi e Salgemma, che insieme alla glicerina vegetale conferisce al prodotto le seguenti azioni:

### 1. un'azione decongestionante non farmacologica, dovuta:

- **all'azione astringente locale** che si esplica grazie all'interazione aspecifica tra il prodotto e le proteine, tra le quali la proteina infiammatoria bradichinina presente nei fluidi nasali, permettendone la rimozione.
- **all'osmolalità bilanciata e standardizzata** (750 mOsm/Kg): che favorisce il richiamo dei fluidi dalla mucosa congestionata, fluidificando il muco e facilitandone la rimozione, anche attraverso un'azione fisica di lavaggio della cavità nasale, senza causare irritazione e secchezza.

### 2. un effetto protettivo, grazie all'azione muco-adesiva e antiossidante che favorisce il mantenimento dell'integrità della barriera epiteliale e il processo di rigenerazione della mucosa.

Gli aromi naturali di Eucalipto e Menta donano una piacevole sensazione di freschezza.

**Fitonasal Spray concentrato non contiene decongestionanti vasostrittori e, grazie al suo innovativo meccanismo d'azione non farmacologico, non crea assuefazione, non secca la mucosa, non irrita e può essere utilizzato frequentemente anche per periodi prolungati.**

La conservazione del prodotto è garantita dal processo di produzione con sistema di filtrazione sterilizzante e confezionamento in ambiente microbiologicamente controllato, senza l'utilizzo di conservanti.

## CONFEZIONE

La soluzione nasale Fitonasal Spray concentrato è contenuta in flacone di vetro dotato di erogatore con **tecnologia APF** (Advanced Preservative Free), sistema multidose con membrana filtrante integrata che garantisce:


- **getto nebulizzato pre-dosato** – l'erogatore pump-spray rilascia un preciso volume di soluzione ad ogni spruzzo, assicurando uniformità di erogazione
- **qualità e assenza di conservanti** - la membrana filtrante preserva la qualità microbiologica del prodotto ad ogni erogazione filtrando l'aria in entrata. Questa caratteristica rende il prodotto utilizzabile fino alla data di scadenza, senza dover ricorrere all'uso di conservanti di sintesi
- **tutela dell'ambiente** - il prodotto non contiene alcun gas propellente, nel rispetto dell'ambiente

## INDICAZIONI

Fitonasal Spray concentrato è indicato in tutti i casi di **congestione e irritazione delle cavità nasali** dovute a raffreddore, anche associato a sindromi influenzali e allergia (stagionale e perenne). Utile anche quando queste condizioni si verificano in presenza di rinosinusiti virali e batteriche e di riniti da cause meccanico-ostruttive (deviazioni del setto nasale).

Per le sue caratteristiche, l'uso del prodotto è indicato sia per un uso frequente che prolungato. Il prodotto può essere utilizzato a partire dai 6 anni di età.

## MODO D'USO

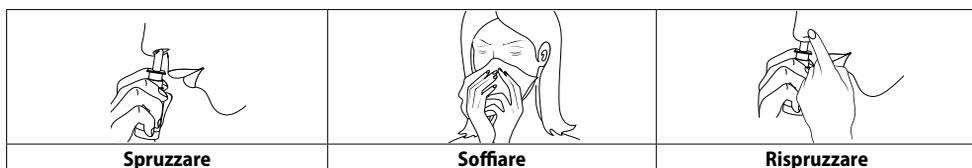

Posologia adulti e ragazzi sopra 12 anni: erogare 2 nebulizzazioni per narice, soffiare il naso e ripetere l'applicazione.

Posologia bambini dai 6 ai 12 anni: erogare 1 nebulizzazione per narice, soffiare il naso e ripetere l'applicazione.

Dopo ciascun utilizzo pulire l'erogatore con un panno umido e pulito e asciugare con cura.

Si consiglia di applicare Fitonasal Spray concentrato più volte durante la giornata anche a distanza ravvicinata e di ripetere l'erogazione prima di coricarsi.

## AVVERTENZE

Non utilizzare se presente ipersensibilità o allergia verso uno o più componenti. Utilizzare esclusivamente per via nasale. Evitare il contatto con gli occhi, nel caso lavarli con acqua.

Se i sintomi persistono consultare il medico.

## COMPOSIZIONE

**TANNISAL-FL:** complesso molecolare naturale standardizzato composto da frazione tanninica e frazione flavonoidica (da Amamelide e Timo), Salgemma (sale di estrazione mineraria non trattato chimicamente).

Acqua, Glicerina vegetale, Aroma naturale di Eucalipto e Aroma naturale di Menta.

**Il prodotto è 100% naturale e non contiene conservanti, emulsionanti e altre sostanze di sintesi.**

## SCADENZA

Vedere la scadenza riportata sulla confezione. Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata.

La data di scadenza indicata sulla confezione resta invariata anche dopo la prima erogazione.

**CONFEZIONE VENDITA:** Flacone in vetro da 30 ml con nebulizzatore

Conservare a temperatura ambiente in luogo fresco, asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Tenere fuori dalla portata dei bambini. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

**Data ultima revisione:** Dicembre 2019