



Melilax

SUPPOSTE NATURALI

**PROMUOVE L'EVACUAZIONE
E CONTRASTA L'INFIAMMAZIONE:**

- **Stipsi cronica o occasionale**
- **Evacuazione difficile e dolorosa**

PER ADULTI E RAGAZZI



Burro di Cacao,
Miel, Cera d'api
e L-Mineral



DISPOSITIVO MEDICO Classe IIb

137350/IT/2

SUPPOSTE

Melilax supposte è un prodotto innovativo, completamente naturale, che promuove l'evacuazione e contrasta l'infiammazione della mucosa rettale. Grazie alla sua innovativa formulazione, **Melilax supposte** si fonde alla temperatura fisiologicamente presente nel retto, così le sostanze in esso contenute possono esplicare la loro azione lubrificante, protettiva della mucosa, distensiva del retto e favorente la normale consistenza delle feci.

Questo consente a **Melilax supposte** di essere indicato: per soggetti con stipsi evacuativa cronica o occasionale, per soggetti non stitici che soffrono di evacuazione difficoltosa o dolorosa o che presentano patologie anorettali associate (es. emorroidi, ragadi, disturbi del pavimento pelvico). È inoltre indicato per soggetti che devono evacuare senza sforzo o in condizioni particolari (es. gravidanza, pazienti allettati o con ridotta capacità motoria) e per la prevenzione della formazione di fecalomi.

La ricerca Aboca, per **Melilax supposte**, ha brevettato un'innovativa tecnologia (EP3119380B1) grazie alla quale burro di cacao, mieli e cera d'api, che normalmente fondono a temperature diverse tra loro, vengono formulati e lavorati in modo **da permetterne la fusione alla temperatura corporea, senza l'utilizzo di tensioattivi o emulsionanti.**

COME AGISCE

Melilax supposte è un dispositivo medico, la cui attività è data dall'insieme delle componenti della formulazione, che:

1. favorisce una più facile evacuazione senza sforzo, attraverso tre azioni:

- lubrifica la mucosa promuovendo il passaggio delle feci;
- produce un'osmosi bilanciata richiamando acqua nel lume del retto che contribuisce ad ammorbidire le feci;
- consente la distensione delle pareti dell'ampolla rettale grazie alla graduale liberazione di una micro effervescenza che genera un fisiologico stimolo all'evacuazione;

2. protegge e promuove la cicatrizzazione contrastando l'infiammazione grazie ad un'azione indiretta dovuta in particolare alla capacità di formare una barriera a livello della mucosa rettale.

Melilax supposte, pratico da usare, esplica la sua azione rapidamente, in genere tra i 15 e i 30 minuti dopo l'applicazione.

INDICAZIONI

Melilax supposte è indicato per favorire in modo fisiologico l'evacuazione in caso di:

- stipsi cronica o occasionale;
- emorroidi, ragadi anali, prolasso rettale, ipersensibilità viscerale anche in assenza di stipsi;
- stipsi in soggetti con colon irritabile o con dolore e gonfiore addominale;
- necessità di ridurre lo sforzo evacuativo anche in assenza di stipsi come in caso di ernie addominali, postumi di interventi chirurgici, patologie cardiovascolari, gravidanza, patologie neurologiche, deficit motori, pazienti allettati o con ridotta capacità motoria;
- svuotamento dell'ampolla rettale in previsione di visite proctologiche o urologiche e indagini strumentali del retto;
- prevenzione della formazione di feci dure e disidratate e/o fecalomi.


Il prodotto è indicato per adulti e ragazzi a partire dai **12 anni di età**.

COMPOSIZIONE

Burro di cacao, Miel, di nettare e di melata, Cera d'api, L-Mineral (composto da: Succo di limone, Nahcolite minerale naturale, Gomma arabica).

MODO D'USO

Prelevare la supposta tirando le due parti superiori dell'involucro che la contiene lungo il pre-taglio. Inserire la supposta per via rettale, se necessario, scaldare leggermente la punta con le dita per facilitarne l'introduzione. Lavare le mani prima e dopo l'utilizzo del prodotto.

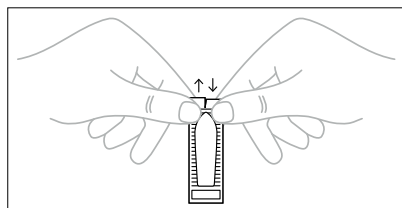


POSOLOGIA

Adulti e ragazzi da 12 anni di età: 1 supposta al bisogno. In caso di stipsi ostinata è possibile utilizzare 2 supposte consecutivamente.

La presenza di una leggera patina bianca e/o piccole imperfezioni sulla superficie della supposta sono attribuibili unicamente alla sua completa naturalità e non pregiudicano l'efficacia e la qualità del prodotto.

AVVERTENZE

Non utilizzare se presente ipersensibilità o allergia individuale verso uno o più componenti. In caso di stipsi persistente, è importante consultare il medico per escludere altre patologie.

 **Conservare a temperature non superiori ai 25°C. Per questo nei mesi più caldi si consiglia di conservare il prodotto in frigorifero avendo cura di tenerlo a temperatura ambiente qualche minuto prima dell'uso. Il prodotto infatti è stato studiato per fondersi a contatto con il fisiologico calore corporeo, per questo è sensibile alla temperatura.**

Tenere lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Tenere fuori dalla portata dei bambini. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.

Vedere la scadenza riportata sulla confezione. Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata.

CONFEZIONE VENDITA

12 supposte da 2,5 g ciascuna

Data ultima revisione: Aprile 2021

STIPSI E DIFFICOLTÀ DI EVACUAZIONE

Quando le persone dicono di *soffrire di stitichezza* fanno riferimento a situazioni diverse: "non andare di corpo tutti i giorni", "emettere feci piccole e dure", "sforzarsi molto per evacuare". La stitichezza (*stipsi* nel gergo medico), è piuttosto frequente tra le persone (siano esse sane o affette da qualche malattia) e può interessare tutti: ragazzi, adulti e anziani. Questa condizione può presentarsi occasionalmente o prolungarsi nel tempo, diventando **stipsi cronica**.

Spesso il problema vero è che la stipsi (**occasionale e cronica**) si accompagna a dolore più o meno violento e a problemi molto fastidiosi, come l'ingrossamento e il sanguinamento delle emorroidi, il prolasso rettale, la ragade anale, la necessità di sforzarsi molto per evacuare, tutti elementi che possono aggravare questa condizione.

Le cause

La stipsi può essere dovuta ad **errori alimentari** (principalmente a scarsa assunzione di acqua, verdura e frutta), a **vita sedentaria**, a **situazioni di stress**, a **cambiamenti delle abitudini personali**. In particolare è molto frequente negli **anziani** sia per il processo stesso di invecchiamento sia perché si muovono meno e hanno una alimentazione non adeguata.

Esistono anche forme di stitichezza legate a: **difficoltà evacuative** che possono essere dovute all'alterazione dei delicati meccanismi che regolano l'emissione delle feci (come le disfunzioni dei muscoli del pavimento pelvico, o l'alterata capacità nel percepire che il retto è pieno di feci); **uso di alcuni farmaci**; **presenza di malattie gastrointestinali** come l'intestino irritabile.

Inoltre **emorroidi**, **ragadi** e **prolasso del retto** possono causare stipsi o possono esserne una conseguenza. La difficoltà di evacuazione e l'irritazione locale innescano, infatti, un circolo vizioso che impedisce sia la risoluzione della stipsi sia il miglioramento dei problemi associati.

Consigli utili

In molti casi la stipsi può essere sia prevenuta sia corretta con regolare attività fisica e con una dieta ricca di acqua e di cibi come legumi, frutta e verdura, per aumentare il volume delle feci e renderle più morbide. Quando sono presenti **problemi a livello del retto e dell'ano** (emorroidi, ragadi, prolasso rettale) o **difficoltà evacuative** legate all'alterazione dei delicati meccanismi che regolano l'emissione delle feci, è **sempre utile non sforzarsi** per evacuare in modo da non peggiorare la situazione.

In questi casi è consigliato ricorrere a supposte o microclismi che oltre a favorire l'evacuazione nel modo più fisiologico e indolore possibile, devono sia evitare irritazione ano-rettale, sia svolgere azione lenitiva, lubrificante ed emolliente. In conclusione, ci sono molte situazioni in cui è necessario migliorare l'evacuazione con uno stimolo locale, purché esso sia ottenuto nel modo più fisiologico possibile, come quello che si può ottenere con un prodotto innovativo a composizione totalmente naturale.



CE 0477



www.melilax.it



PER LA SALUTE DI OGGI E DI DOMANI

Aboca è una Società Benefit ed è certificata B Corp.

Ci impegniamo a operare in maniera responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti della comunità e dell'ambiente. Relazione di impatto disponibile su www.aboca.com

Naturale e biodegradabile al 100%,

Melilax supposte non contiene sostanze di sintesi, semisintesi o geneticamente modificate.



INDICAZIONI DI SMALTIMENTO

Astuccio	PAP 21	>	CARTA
Foglietto	PAP 22	>	CARTA
Blister	C/ALU 90	>	ALLUMINIO
Prodotto non consumato		>	ORGANICO

Raccolta differenziata.

Verifica le disposizioni del tuo comune.



Aboca S.p.A. Società Agricola - Località Aboca, 20

52037 Sansepolcro (AR) - Italia - www.aboca.com

Azienda con sistema di gestione qualità ISO 9001 e ISO 13485

e sistema di gestione ambientale ISO 14001 certificati.

Certified



Corporation

LEAMELAXSU-B

137350/IT/2