

Fitonasal Spray

- Descongestionante e fluidificante
- Protege e favorece a regeneração da mucosa

EFEITO REFRESCANTE

Sem conservantes

Sem gases propulsores

Adequado também para uso prolongado

Com ação descongestionante não farmacológica

DISPOSITIVO MÉDICO Classe IIa



750
mOsm/kg



Com
Tannisal-FL

Complexo molecular natural
de Taninos, Flavonoides e Sal-gema

SPRAY CONCENTRADO

Fitonasal Spray concentrado é um **descongestionante protetor** a utilizar em todos os casos de **constipação, alergia** e, em geral, na presença de **congestão e irritação das cavidades nasais, associadas a problemas agudos ou crônicos**.

Fitonasal Spray concentrado é um dispositivo médico cuja atividade é conseguida pelo conjunto de todos os componentes da formulação. Entre estes, é particularmente importante **TANNISAL-FL**, um complexo molecular natural composto por Taninos, Flavonoides e Sal-gema, que juntamente com a glicerina vegetal confere ao produto as seguintes ações:

1. uma **ação descongestionante não farmacológica, graças:**

- à **ação adstringente local** que se desenvolve graças à interação não específica entre o produto e as proteínas, entre as quais a proteína inflamatória bradiginina, presente nos fluidos nasais, permitindo a sua remoção.
- à **osmolalidade equilibrada e padronizada** (750 mOsm/kg) que favorece a eliminação dos fluidos da mucosa congestionada, fluidificando o muco e facilitando a sua remoção, mesmo através de uma ação física de lavagem da cavidade nasal, sem causar irritação e secura.

2. um **efeito protetor**, graças à ação muco-adesiva e antioxidante que favorece a manutenção da integridade da barreira epitelial e o processo de regeneração da mucosa.

Os aromas naturais de Eucalipto e Hortelã proporcionam uma sensação agradável de frescura.

Fitonasal Spray concentrado não contém descongestionantes vasoconstritores e, graças ao seu inovador mecanismo de ação não farmacológico, não provoca habituação, não seca a mucosa, não irrita e pode ser usado frequentemente, mesmo por períodos prolongados.

A conservação do produto é garantida pelo processo de produção com sistema de filtração esterilizante e embalagem em ambiente controlado microbiologicamente, sem a utilização de conservantes.

EMBALAGEM

A solução nasal Fitonasal Spray concentrado está disponível em frasco de vidro com pulverizador com **tecnologia APF** (Advanced Preservative Free), sistema multidose com membrana filtrante integrada que garante:

- **jato pulverizado pré-doseado** - o pulverizador pump-spray liberta um volume preciso de solução em cada pulverização, assegurando uniformidade de dosagem.
- **qualidade e ausência de conservantes** - a membrana filtrante preserva a qualidade microbiológica do produto em cada pulverização, filtrando o ar que entra. Esta característica torna o produto utilizável até à data de validade, sem ter de recorrer ao uso de conservantes de síntese.
- **proteção do ambiente** - o produto não contém gases propulsores, respeitando o ambiente.


INDICAÇÕES

Fitonasal Spray concentrado é indicado em todos os casos de **congestão e irritação das cavidades nasais** devido a constipação, também associada a síndromes de gripe, e alergia (sazonal e perene). Útil também quando estas condições se verificam na presença de rinosinusites virais e bacterianas e de rinites devido a causas mecânico-obstrutivas (desvios do septo nasal).

Pelas suas características, o produto é indicado quer para um uso frequente quer prolongado.

O produto pode ser utilizado a partir dos 6 anos de idade.

MODO DE USO

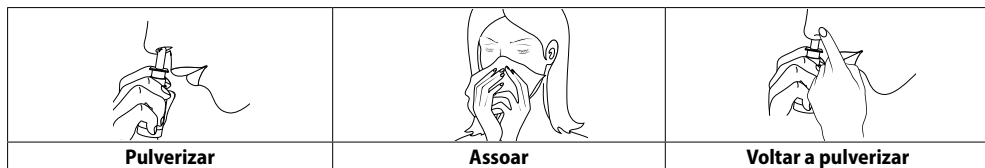

Posologia adultos e jovens com mais de 12 anos: pulverizar 2 vezes em cada narina, assoar o nariz e repetir a aplicação.

Posologia crianças dos 6 aos 12 anos: pulverizar 1 vez em cada narina, assoar o nariz e repetir a aplicação.

Após cada utilização, lavar o spray nebulizador com um pano húmido e limpo e secar com cuidado. Recomendamos a aplicação de Fitonasal Spray concentrado várias vezes ao longo do dia, mesmo com breves intervalos de tempo, e repetir a aplicação antes de dormir.

ADVERTÊNCIAS

Não utilizar se existir hipersensibilidade ou alergia em relação a um ou mais componentes. Utilizar exclusivamente por via nasal. Evitar o contacto com os olhos; se tal acontecer, lavá-los com água. Se os sintomas persistirem, consultar o médico.

COMPOSIÇÃO

TANNISAL-FL, complexo molecular natural padronizado composto por fração tanínica e fração flavonoide (de Hamamélis e Timo), Sal-gema (sal de extração mineira não tratado quimicamente). Água, Glicerina vegetal, Aroma natural de Eucalipto e de Hortelã.

O produto é 100% natural e não contém conservantes, emulsionantes e outras substâncias de síntese.

VALIDADE

Ver a data de validade na embalagem. Não utilizar após a data de validade indicada.

A data de validade indicada na embalagem permanece inalterada também após a primeira nebulização.

EMBALAGEM DE VENDA: frasco de vidro de 30 ml com spray nebulizador.

Conservar à temperatura ambiente em local fresco, seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. Manter fora do alcance das crianças. A data de validade refere-se ao produto íntegro e corretamente conservado. Não eliminar no ambiente após o uso.

Data da última revisão: 12/2019