

# Propolgemma

Calmează iritația și reduce durerea de gât și din cavitatea bucală



Complex molecular sinergic  
100% vegetal din rășini,  
polizaharide și lignine



100%  
FORMULĂ NATURALĂ  
BIODEGRADABILĂ

DISPOZITIV MEDICAL Clasa IIa

PROPOLGEMMA SPRAY FĂRĂ ALCOOL ADULȚI ȘI COPII

**Propolgemma spray fără alcool** este un Dispozitiv Medical inovator, proiectat în mod special pentru a combate stările iritative ale cavității orofaringiene precum durerea de gât și alte afecțiuni ale cavității bucale (stomatite, afte și gingivite).

**Propolgemma** este un complex molecular exclusiv, rezultat al cercetării Aboca, compus din rășini, polizaharide și lignine, obținut din Muguri de Plop negru, din a cărui rășină albinele extrag Propolisul european.

Datorită unui proces special de extracție, **Propolgemma** se caracterizează prin prezența unor **componente principale tipice Propolisului** împreună cu **compuși funcționali ai țesutului vegetativ din Mugurii de Plop** (vezi chenarul cu informații aprofundate).

În urma cercetărilor, Aboca a dezvoltat un complex molecular cu capacități deosebite de protecție a mucoaselor cavității orofaringiene.

## CUM ACȚIONEAZĂ

**Fracția rășinoasă și fracția bogată în compuși polizaharidici și lignine** acționează sinergic formând o **barieră protectoare** asupra mucoasei inflamate care, împreună **cu proprietățile antioxidante ale flavonoidelor, combate în mod indirect inflamația.**

Acest strat protector activ calmează senzația de arsură, și reduce hipersensibilitatea atenuând senzația de disconfort și facilitând deglutiția.

Fracțiile conținute în **Propolgemma** creează, totodată, un mediu nefavorabil proliferării bacteriilor.


## INDICAȚII

**Propolgemma spray fără alcool** este indicat în tratamentul **durerii de gât și al afecțiunilor cavității bucale** (cum sunt stomatitele, aftele și gingivitele) asociate cu senzații de arsură, durere și sensibilitate la deglutiția.

Poate fi utilizat și în cazul unor **mici leziuni la nivelul gurii**, cauzate, de exemplu, de tratamente dentare sau de folosirea unor aparate ortodontice sau proteze dentare.

Produsul poate fi folosit și ca protecție preventivă în toate cazurile în care au existat expuneri la agenți externi agresivi sau iritanți (frig, fum, smog).

Se recomandă utilizarea produsului începând cu vârsta de 3 ani.

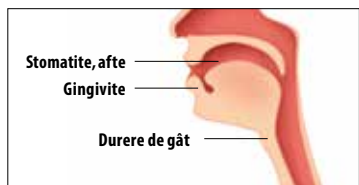

## MOD DE UTILIZARE

Agitați flaconul înainte de utilizare. Cutia conține pulverizatorul în plic sigilat. La prima utilizare, îndepărtați dopul din aluminiu de pe flacon și introduceți pulverizatorul. Se recomandă administrarea în cavitatea orofaringiană a **2 pulverizări de până la 2 ori pe zi la copii; a 4 pulverizări de până la 4 ori pe zi la adulți**, cu ajutorul aplicatorului special. În cazul unor afecțiuni localizate, aplicați direct pe partea afectată. Eventuala prezență a unor mici depuneri se datorează concentrației ridicate de extracte și nu afectează calitatea produsului.

## COMPOZIȚIE

**Substanțe funcționale: Propolgemma - complex molecular din rășini, polizaharide și lignine** (obținut din Muguri de Plop negru, *Populus nigra* L.) în extract uscat multifracționat, titrat în **Flavonoide totale  $\geq$  15% și Polizaharide** (cu greutate moleculară mai mare de 20.000 Da)  $\geq$  4%.

**De asemenea, conține:** Apă, Glicerină vegetală, Suc de Măr, Gumă arabică, Suc de Lămâie, Aromă naturală de Cireșe și Căpșuni.

**Procesul de producție utilizat asigură absența polenului derivat din Muguri de Plop.**

## AVERTIZĂRI

A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate sau alergie individuală la una sau mai multe componente ale produsului. Contraindicat la persoanele cu alergie la Propolis și la persoanele astmatice. Dacă simptomele persistă, consultați medicul. A se păstra la temperatura camerei și ferit de surse de lumină și căldură. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Data de expirare se referă la produsul păstrat în ambalajul original și în condiții corespunzătoare.

## DATA DE EXPIRARE

A se vedea data expirării înscrisă pe ambalaj. A nu se utiliza după data expirării indicată.

Vă recomandăm să utilizați produsul în termen de 3 luni de la deschidere.

## PREZENTARE AMBALAJ LA VÂNZARE

Flacon de sticlă de 30 ml cu pulverizator spray.

**DATA ULTIMEI REVIZUIRI:** 03/2022.

### PROPOLGEMMA: COMPLEX MOLECULAR SINERGIC DE RĂȘINI, POLIZAHARIDE ȘI LIGNINE

Datorită unei cercetări fitochimice aprofundate și unor procese speciale de extracție, a fost posibil să se dezvolte un extract din Muguri de Plop negru care se caracterizează prin prezența a două fracții de compuși (multifracție): una este caracteristică exsudatului rășinos al mugurelui și bogată în componente tipice Propolisului, iar cealaltă este bogată în compuși macromoleculari specifici țesutului vegetal din mugure, în mod special polizaharide și lignine. Alegerea de dezvoltare a unei formule pornind de la Mugurii de Plop negru se află la baza inovației Propolgemma, deoarece Propolisul de origine europeană este compus în primul rând din exsudatul rășinos al acestui tip de muguri.



 **Aboca S.p.A. Società Agricola**

Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia - [www.aboca.com](http://www.aboca.com)

Societate cu sistem de management al calității ISO 9001 și ISO 13485 și cu sistem de management de mediu certificat ISO 14001.

Certified



ROLEAPROGEB-B