

Fitostill PLUS

OCCHI SECCHI, IRRITATI E STANCHI

Trattamento idratante, rinfrescante e lenitivo.

Ideale in caso di stress visivo

SENZA CONSERVANTI

ANCHE CON LENTI A CONTATTO INDOSSATE

DISPOSITIVO MEDICO

Regolamento (UE) 2017/745



Con **LIGUFLOS®** complesso vegetale e acido ialuronico

GOCCE OCULARI IN 10 FIALE MONODOSE


Fitostill Plus gocce oculari è un dispositivo medico a base di **Liguflos® - complesso vegetale - e acido ialuronico** che agisce **ripristinando la naturale funzione lubrificante del "film lacrimale"**.

Il prodotto è utile per **lenire e prevenire gli stati di irritazione oculare, alleviare la sensazione di bruciore** dovuta ad agenti esterni offensivi o a **prolungati sforzi visivi** e in caso di **occhi arrossati**.

Particolarmente indicato per coloro che soffrono di fastidi legati alla **sindrome dell'occhio secco** (diminuita qualità e quantità della produzione lacrimale).

Fitostill Plus gocce oculari svolge un'**azione fisiologica idratante, rinfrescante, lenitiva e protettiva** dell'occhio, come risultato dei seguenti meccanismi di azione:

- **Azione barriera**
Forma un film protettivo sulla superficie oculare che contrasta l'infiammazione.
- **Azione lubrificante**
Limita lo sfregamento tra palpebra e superficie oculare.
- **Azione umettante**
Forma una struttura reticolare che trattiene l'acqua sulla superficie oculare, conferendo e mantenendo un adeguato livello di umidità.
- **Azione antiossidante**
Riduce i radicali liberi generati dall'infiammazione della mucosa.

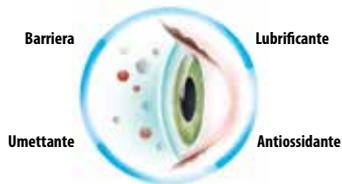

INDICAZIONI

Fitostill Plus è indicato per il **trattamento e la prevenzione degli occhi arrossati e affaticati**.

È particolarmente adatto per chi soffre di **secchezza oculare**, condizione caratterizzata da: lieve arrossamento oculare, sensazione di sabbia negli occhi, bruciore, fotofobia, senso di occhio bagnato, prurito, dolore palpebrale al risveglio.

Inoltre il prodotto è indicato nei casi di **arrossamento, bruciore, prurito e sensazione di corpi estranei** dovuti a:

- agenti esterni, sia diretti (pulsviscolo atmosferico, pollini, scarsa umidità dell'aria, vento, salmastro, freddo, radiazione solare intensa, uso di lenti a contatto) che indiretti (utilizzo del computer o della televisione, lettura prolungata, attenzione alla guida).
- fenomeni allergici, congiuntivite, blefariti croniche, chirurgia oculare o altri processi infiammatori.

È indicato **anche per uso frequente**, più volte al giorno, e può essere utilizzato **da chi porta lenti a contatto**, anche quando già indossate. Il prodotto può essere utilizzato anche nei bambini a partire dai 3 anni di età.

MODO D'USO


Si consiglia di instillare 2-3 gocce in ciascun occhio da una a tre volte al giorno.

La fiala monodose è richiudibile quindi, una volta aperta, può essere chiusa e usata nell'arco delle 12 ore.

Il sistema di chiusura della fiala monodose è brevettato appositamente per impedire l'apertura indesiderata.

Per un corretto utilizzo del prodotto attenersi alle seguenti istruzioni:

- aprire la fiala monodose ruotando il tappino in senso antiorario
- applicare il prodotto premendo leggermente la fiala monodose
- per richiudere la fiala monodose capovolgere il tappino e inserire premendo accuratamente sul corpo della fiala monodose.

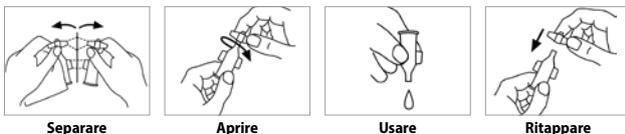

Fitostill Plus gocce oculari può essere usato **anche da coloro che portano lenti a contatto anche una volta indossate**. Fitostill Plus gocce oculari è indicato **anche per un uso frequente**, più volte al giorno. Il prodotto in fiale monodose è monopaziente. **Fitostill Plus gocce oculari** è confezionato in pratiche fiale monodose sterili, senza l'utilizzo di conservanti e coloranti. Una leggera colorazione è dovuta alla componente vegetale del Liguflos®.

COMPOSIZIONE

1 fiala monodose (0,5 ml) contiene: complesso vegetale **Liguflos® 0,10 mg**, a base di **Flavonoidi** (frazione estrattiva LPME di Camomilla fiori ligulati); **Acido ialuronico sale sodico** 1 mg; Acqua distillata di Camomilla fiori 25 mg; Glicerina vegetale; Sodio fosfato bibasico dodecaidrato; Cloruro di sodio; Sodio fosfato monobasico monoidrato; Acqua.

La frazione estrattiva contenuta nel prodotto è ottenuta attraverso un esclusivo processo tecnologico, chiamato LPME (Liquid-Phase Microextraction), messo a punto dalla ricerca Aboca.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO

Il prodotto è solo per uso oftalmico. Durante l'applicazione non toccare l'occhio né alcuna altra superficie con l'estremità di erogazione della fiala monodose. Non usare in caso di nota ipersensibilità o allergia individuale verso uno o più componenti. In caso di disturbi durante l'uso sospendere il trattamento e consultare un medico.

EFFETTI INDESIDERATI

Fitostill Plus gocce oculari è in genere ben tollerato. Tuttavia, se si nota la comparsa di un effetto indesiderato riconducibile al prodotto o al suo utilizzo, informare il medico e/o il farmacista e il Fabbricante Aboca ai contatti riportati su questo foglietto illustrativo. In caso di incidente grave informare anche l'autorità competente del proprio Paese.

SOVRADOSAGGIO

Nella popolazione generale, in funzione dei dati disponibili, non sono noti né attesi fenomeni dovuti al sovradosaggio.

INTERAZIONI CON ALTRI DISPOSITIVI MEDICI, MEDICINALI O ALIMENTI

Dai dati disponibili non sono attese interazioni di Fitostill Plus gocce oculari con altri dispositivi medici, medicinali o alimenti.

CONFEZIONE

10 fiale monodose richiudibili da 0,5 ml.

CONSERVAZIONE E SCADENZA

Conservare a temperatura ambiente lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Tenere fuori dalla portata dei bambini. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Dopo l'apertura della busta di alluminio il prodotto va conservato come indicato sopra e riposto all'interno della stessa. Non separare il contenuto dalla confezione esterna e dal foglio illustrativo, allo scopo di avere tutte le informazioni necessarie al corretto utilizzo del prodotto.

Data ultima revisione: Gennaio 2024

 **INDICAZIONI DI SMALTIMENTO**
Verifica le disposizioni del tuo Comune

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Astuccio PAP 21 > CARTA
Foglietto PAP 22 > CARTA
Bustina C/LDPE 90 > PLASTICA
Tappo HDPE 2 > PLASTICA
Fiala monodose > LDPE+HDPE<7 > PLASTICA



Non utilizzare il prodotto se la fiala è danneggiata.



STERILE A

CE 0477

DISPOSITIVO MEDICO Classe IIb MD

 **Aboca S.p.A. Società Agricola** - Località Aboca, 20
52037 Sansepolcro (AR) - Italia - www.aboca.com
Azienda con sistema di gestione qualità ISO 9001 e ISO 13485
e sistema di gestione ambientale ISO 14001 certificati.