

# Fitostill PLUS

OJOS SECOS, IRRITADOS Y CANSADOS

Tratamiento hidratante, refrescante y suavizante.

Ideal en caso de estrés visual

SIN CONSERVANTES  
INCLUSO CON LAS LENTES DE CONTACTO PUESTAS

PRODUCTO SANITARIO  
Reglamento (UE) 2017/745




Con el complejo vegetal LIGUFLOS  
y ácido hialurónico

## GOTAS OCULARES EN 10 AMPOLLAS MONODOSIS

**Fitostill Plus gotas oculares** es un producto sanitario a base del **complejo vegetal Liguflos y ácido hialurónico** que actúa **restableciendo la función lubricante natural de la «película lagrimal»**. El producto es útil para **aliviar y prevenir los estados de irritación ocular, calmar la sensación de escozor** debida a agentes externos dañinos o a **esfuerzos visuales prolongados y en caso de ojos enrojecidos**. El producto está particularmente indicado para quienes sufren molestias vinculadas al **síndrome del ojo seco** (disminución de la calidad y de la cantidad de producción lagrimal). **Fitostill Plus gotas oculares** ejerce una **acción fisiológica hidratante, refrescante, suavizante y protectora** en el ojo, gracias a los siguientes mecanismos de acción:

- **Acción barrera**  
Forma una película protectora en la superficie ocular que contrarresta la inflamación.
- **Acción lubricante**  
Limita el rozamiento entre el párpado y la superficie ocular.
- **Acción humectante**  
Crea una estructura reticular que retiene el agua en la superficie ocular, por lo que aporta y mantiene un nivel adecuado de humedad.
- **Acción antioxidante**  
Reduce los radicales libres generados por la inflamación de la mucosa.

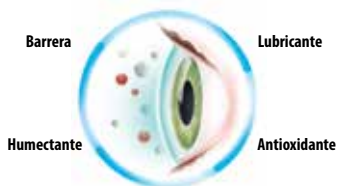

### INDICACIONES

Fitostill Plus está indicado para el **tratamiento y la prevención de los ojos enrojecidos y cansados**. Resulta especialmente adecuado para quienes padecen **sequedad ocular**, una afección caracterizada por un leve enrojecimiento ocular, sensación de tener arena en los ojos, escozor, fotofobia, sensación de ojo mojado, prurito y dolor en los párpados al despertar.

**El producto también está indicado** en casos de **enrojecimiento, escozor, prurito y sensación de cuerpo extraño** debidos a:


- agentes externos, tanto directos (polvo atmosférico, pólenes, baja humedad del aire, viento, ambiente salobre, frío, radiación solar intensa o uso de lentes de contacto) como indirectos (uso de ordenador y televisor, lectura prolongada o atención durante la conducción);
- fenómenos alérgicos, conjuntivitis, blefaritis crónicas, cirugía ocular u otros procesos inflamatorios.

Está indicado **incluso para el uso frecuente**, varias veces al día, y es compatible con el **uso de lentes de contacto**, incluso si el usuario las lleva ya puestas. El producto es apto para adultos y niños a partir de 3 años de edad.

### MODO DE EMPLEO

Se recomienda instilar 2-3 gotas en cada ojo de una a tres veces al día. La ampolla monodosis se puede volver a cerrar, por lo que una vez abierta puede cerrarse y utilizarse en un lapso de no más de 12 horas. El sistema de cierre de la ampolla monodosis está patentado expresamente para impedir su apertura indeseada. Para el uso correcto del producto, atenerse a las siguientes instrucciones:

- abrir la ampolla monodosis girando el tapón en sentido contrario a las agujas del reloj;
- aplicar el producto presionando levemente la ampolla monodosis;
- para volver a cerrar la ampolla monodosis, darle la vuelta al tapón e introducirlo presionando con cuidado sobre el cuerpo de la ampolla monodosis.

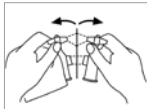

Separar



Abrir



Usar



Volver a tapar

Fitostill Plus gotas oculares también es compatible con el **uso de lentes de contacto, incluso si el usuario las lleva ya puestas**. Fitostill Plus gotas oculares está indicado **incluso para un uso frecuente**, varias veces al día. El producto en ampolla monodosis es para un único paciente. **Fitostill Plus gotas oculares** se suministra envasado en prácticas ampollas monodosis estériles, sin el uso de conservantes ni colorantes. Su leve coloración se debe al componente vegetal de Liguflos.

### COMPOSICIÓN

1 ampolla monodosis (0,5 ml) contiene: complejo vegetal **Liguflos 0,10 mg**, a base de **Flavonoides** (fracción extractiva LPME de flores liguladas de Manzanilla); **sal sódica de Ácido hialurónico** 1 mg; Agua destilada de flores de Manzanilla 25 mg; Glicerina vegetal; Fosfato de sodio dibásico dodecahidratado; Cloruro de sodio; Fosfato de sodio monobásico monohidratado; Agua.

**La fracción extractiva presente en el producto se obtiene a través de un exclusivo proceso tecnológico denominado LPME (Liquid-Phase Microextraction), desarrollado por la investigación de Aboca.**

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

El producto es solo para uso oftálmico. Durante la aplicación, no tocar el ojo ni ninguna otra superficie con la punta de aplicación de la ampolla monodosis. No utilizar en caso de conocida hipersensibilidad o alergia individual a uno o más componentes. En caso de molestias durante el uso, suspender el tratamiento y consultar a un médico.

### EFFECTOS NO DESEADOS

En general, Fitostill Plus gotas oculares se tolera bien. No obstante, si se nota la aparición de un efecto no deseado atribuible al producto o a su uso, informar al médico y/o farmacéutico y al fabricante Aboca utilizando los datos de contacto indicados en este prospecto. En caso de incidente grave informar también a la autoridad competente del propio país.

### SOBREDOSIS

En la población general, sobre la base de los datos disponibles no se conocen ni prevén fenómenos debidos a sobredosis.

### INTERACCIONES CON OTROS PRODUCTOS SANITARIOS, MEDICAMENTOS O ALIMENTOS

Partiendo de los datos disponibles, no se prevén interacciones de Fitostill Plus gotas oculares con otros productos sanitarios, medicamentos o alimentos.

### ENVASE

10 ampollas monodosis de 0,5 ml con sistema de cierre.

### CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD

Conservar a temperatura ambiente, alejado de fuentes de calor y protegido de la luz. Mantener el producto fuera del alcance de los niños. La fecha de caducidad se refiere al producto sin abrir y correctamente conservado. Una vez abierto el sobre de aluminio, el producto debe conservarse como se indica arriba y guardarse dentro del sobre. No separar el contenido del envase externo y del prospecto; de esta manera se podrá disponer de la información necesaria para el uso correcto del producto.

**Fecha de la última revisión:** 01/2024



No utilizar el producto si la ampolla está dañada.



STERILE A

CE 0477

PRODUCTO SANITARIO Clase IIb

MD



#### MATERIALES DE ENVASADO

Para su eliminación consulta la normativa de tu zona de residencia.

Caja PAP 21 > Cartón

Prospecto PAP 22 > Papel

Sobre C/LDPE 90 > Principalmente de plástico

Tapón HDPE 2 > Plástico

Ampolla monodosis > LDPE+HDPE < 7 > Plástico

**Aboca S.p.A. Società Agricola** - Località Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia - [www.aboca.com](http://www.aboca.com)

Empresa con sistema de gestión de calidad ISO 9001 e ISO 13485 y sistema de gestión medioambiental ISO 14001 certificados.