

# Bianacid<sup>neo</sup>

REFLUSSO, ACIDITÀ  
E DIFFICOLTÀ DIGESTIVE



## AZIONE RAPIDA

SU BRUCIORE, DOLORE,  
PESANTEZZA E GONFIORE

Con complesso vegetale e minerale

poliprotect®


ad azione protettiva mucosimile

DISPOSITIVO MEDICO  
Regolamento (UE) 2017/745

100%  
FORMULA NATURALE  
BIODEGRADABILE

COMPRESSE DA SCIogliere IN BOCCA

**NeoBianacid con Poliprotect®** potenzia l'azione protettiva del muco che naturalmente ricopre la mucosa.

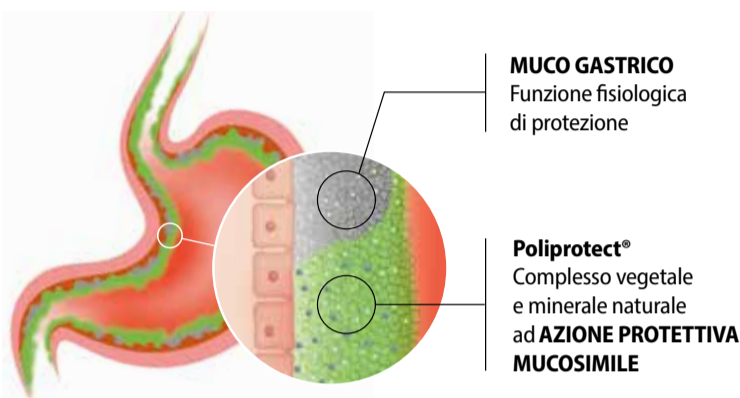

### MUCO GASTRICO

Funzione fisiologica di protezione

### Poliprotect®

Complesso vegetale e minerale naturale ad **AZIONE PROTETTIVA MUCOSIMILE**

**NeoBianacid** agisce rapidamente formando un film ad effetto barriera con attività:

#### • Protettiva

Grazie alla alta affinità per la mucosa gastroesofagea, forma un film che protegge e favorisce i fisiologici processi riparativi.

#### • Neutralizzante locale dell'acidità

Rafforza le proprietà neutralizzanti locali del muco gastrico, ostacolando il contatto degli acidi con la mucosa gastrica e ne previene il danneggiamento.

#### • Antiossidante

Contrasta l'irritazione dovuta ai radicali liberi.

In questo modo protegge la mucosa dal contatto con i succhi gastrici e con le sostanze irritanti.

**NeoBianacid** modula l'acidità senza sopprimerla, rispettando così la fisiologia dello stomaco e la funzionalità della flora intestinale.

**NeoBianacid** è 100% naturale, biodegradabile e agisce anche nel rispetto dell'ambiente.

## INDICAZIONI

**NeoBianacid** è indicato per il trattamento del **reflusso gastroesofageo** e del **dolore di stomaco** (dispepsia dolorosa), caratterizzati da rigurgito acido, bruciore, dolore, tosse irritativa, disfonia.

**NeoBianacid** è indicato anche nel trattamento dei sintomi associati a **difficoltà di digestione** (dispepsia non dolorosa), quali acidità, pesantezza e gonfiore dopo i pasti, sia ricorrenti che in caso di eccessi alimentari.

**NeoBianacid** può essere utile in **prevenzione**, nelle situazioni che provocano irritazione della mucosa (ad esempio assunzione di farmaci antinfiammatori o periodi di stress psico-fisico).

Il prodotto è adatto anche all'uso in gravidanza, durante l'allattamento e nei bambini sopra i 6 anni

## MODO D'USO

Assumere la compressa lasciandola sciogliere in bocca o masticandola secondo le seguenti indicazioni:

- **In caso di sintomi occasionali:** assumere 1 compressa al bisogno.
- **Come trattamento** di reflusso gastroesofageo, dolore e difficoltà di digestione: 1 compressa dopo i pasti e 1 alla sera prima di coricarsi. In aggiunta, il prodotto può essere assunto anche al bisogno più volte durante l'arco della giornata, anche a distanza ravvicinata.
- **In associazione** con inibitori di pompa protonica e H2 antagonisti e nei periodi di sospensione della terapia: assumere il prodotto al bisogno o secondo le indicazioni del medico.

Si consiglia di non superare l'assunzione di 8 compresse al giorno.

Il prodotto può essere assunto anche per periodi prolungati.

Il prodotto può essere assunto anche dai bambini, a partire da 6 anni di età, con la stessa posologia. Chiudere accuratamente il flacone dopo l'uso.

## COMPOSIZIONE

**NeoBianacid** è un prodotto **100% naturale, biodegradabile e con ingredienti da Agricoltura Biologica** contenente Poliprotect®, complesso vegetale e minerale. Non contiene sostanze di sintesi, semisintesi o geneticamente modificate e anche i processi di lavorazione con cui è ottenuto non utilizzano né solventi né altre sostanze di sintesi chimica. Una compressa da 1,55 g contiene: complesso naturale **Poliprotect®** 528 mg, a base di **Polisaccaridi** (frazioni estrattive LPME di Malva\* e Altea\*; gel fogliare disidratato di Aloe Vera\* - 105 mg) e **Minerali** (Limestone e Nahcolite 423 mg); **Frazione flavonoidica** estrattiva LPME di Camomilla\* e Liquirizia\* - 46 mg; Zucchero di canna\*; Gomma arabica; Aroma naturale di Menta o Aroma naturale di Limone.

\*Ingrediente da Agricoltura Biologica

Ciascuna compressa contiene 136 mg (3,4 mmol) di calcio.

**Le frazioni estrattive contenute nel prodotto sono ottenute attraverso un esclusivo processo tecnologico, chiamato LPME (Liquid-Phase Microextraction), messo a punto dalla ricerca Aboca.**

**NeoBianacid** è controllato secondo i seguenti tre parametri grazie ai quali Aboca garantisce la qualità dei prodotti naturali nella loro complessità.

1. **Impronta digitale metabolomica tramite tecnologia NIR (near infrared spectroscopy)**  
a conferma della validazione del processo produttivo del prodotto naturale
2. **Test di adesione**  
a conferma dell'azione barriera e protettiva su cellule gastriche ed esofagee
3. **Titolo in polisaccaridi ≥ 1,8 %**  
(peso molecolare > 20.000 Dalton)

## AVVERTENZE

Non utilizzare se presente ipersensibilità o allergia individuale verso uno o più componenti. Se i sintomi persistono consultare, comunque, il medico o il farmacista. Il contenuto in glicirizina dovuto alla Liquirizia è inferiore a quanto riportato essere causa di un possibile innalzamento della pressione.

## EFFETTI INDESIDERATI

NeoBianacid, in genere, è ben tollerato. Tuttavia, se si nota la comparsa di un effetto indesiderato riconducibile al prodotto o al suo utilizzo, informare il medico e/o il farmacista e il Fabbrikante Aboca ai contatti riportati su questo foglietto illustrativo. In caso di incidente grave informare anche l'autorità competente del proprio Paese.

## SOVRADOSAGGIO

Nella popolazione generale, in funzione dei dati disponibili, non sono noti né attesi fenomeni dovuti al sovradosaggio.

## INTERAZIONI CON ALTRI FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI O ALIMENTI

Si consiglia di assumere il prodotto a distanza di almeno due ore da farmaci, in particolare le tetracicline.

Non sono note interazioni di NeoBianacid con altri dispositivi medici o alimenti.

## CONSERVAZIONE E SCADENZA

Conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Tenere fuori dalla portata dei bambini. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.

Vedere la scadenza riportata sulla confezione. Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata. Si raccomanda di conservare l'astuccio.

## SINTESI RELATIVA ALLA SICUREZZA E ALLA PRESTAZIONE CLINICA (SSCP)

La sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazione clinica del dispositivo è disponibile nella banca dati Eudamed al link <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>, ricercando il seguente codice Basic UDI-DI: 8032472BIOANAbY2AA.

La stessa è inoltre disponibile sul sito web del fabbricante.

## CONFEZIONI VENDITA

**14/45/70 compresse gusto Menta da sciogliere in bocca** da 1,55 g ciascuna, in flacone di vetro.

**14/45 compresse gusto Limone da sciogliere in bocca** da 1,55 g ciascuna, in flacone di vetro.

**DATA ULTIMA REVISIONE:** Aprile 2024

# Aboca

## PER LA SALUTE DI OGGI E DI DOMANI

Da oltre 40 anni noi di Aboca ricerchiamo nella Natura le risposte per la salute delle persone, nel rispetto dell'organismo e dell'ambiente.

## LA RICERCA ABOCA

Riconosciamo il potenziale terapeutico delle sostanze naturali complesse e le proiettiamo dal mondo della tradizione a quello dell'innovazione, secondo i criteri della Evidence Based Medicine e della Systems Medicine.


## 100% NATURALE: DALLA COLTIVAZIONE AL PRODOTTO FINITO

Realizziamo i nostri prodotti grazie ad un sistema verticalizzato che va dalla coltivazione biologica, alla ricerca scientifica fino alla produzione, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi chimica e non biodegradabili lungo tutto il processo.

## LA SALUTE SOSTENIBILE

La salute non è solo un bene individuale ma anche un Bene Comune. Per questo non può esistere una vera salute senza sostenibilità. Siamo una società Benefit e con il nostro lavoro ci impegniamo formalmente a portare un beneficio per la comunità e l'ambiente.

Per conoscere tutti i nostri prodotti, visita il sito [www.aboca.com](http://www.aboca.com)

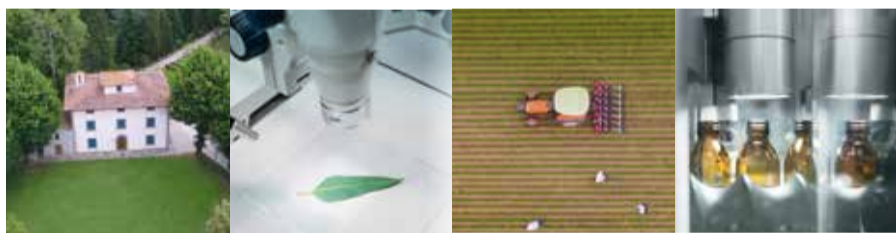

[www.neobianacid.it](http://www.neobianacid.it)



### INDICAZIONI DI SMALTIMENTO

Verifica le disposizioni del tuo Comune

#### RACCOLTA DIFFERENZIATA

Astuccio PAP 21 > CARTA

Foglietto PAP 22 > CARTA

Tappo C/ALU 90 > ALLUMINIO

Flacone GL 72 > VETRO

DISPOSITIVO MEDICO Classe III  0373

 **Aboca S.p.A. Società Agricola** Località Aboca, 20  
52037 Sansepolcro (AR) - Italia - [www.aboca.com](http://www.aboca.com)

Azienda con sistema di gestione qualità ISO 9001 e ISO 13485  
e sistema di gestione ambientale ISO 14001 certificati.



LEA\_BIACID-B