


FitoroiD^{neo}

Hemoroidalne smetnje

Štiteći sluznicu ublažava bol,
pečenje i svrbež

Sadrži Helydol, suhi ekstrakt cvatućih
vrhova smilja i eterično ulje čajevca

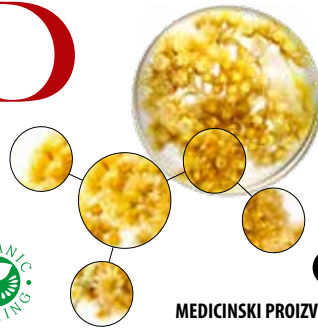

MEDICINSKI PROIZVOD Klase Ib

BIO MAST ZA ENDOREKTALNU PRIMJENU

HR KAKO DJELUJE: NeoFitoroid smiruje iritaciju, štiti sluznicu i potiče njenu normalizaciju sa svoja 3 mehanizma djelovanja:

- Mukoahvezivno:** prijanja na sluznicu i stvara zaštitni sloj koji je štiti od kontakta s nadražujućim tvarima;
- Podmazujuće:** smanjuje trenje sa stolicom te tako štiti od iritacije i perianalnog začepljenja;
- Antioksidativno:** štiti sluznicu od slobodnih radikala te time neizravno ublažava upalu.

Osim toga, NeoFitoroid stvara okolinu koja nije pogodna za rast mikroorganizama, čime dodatno zaštitno djeluje i smanjuje svrbež. Njegova osvežavajuća svojstva pridonose brzom olakšanju smetnji. NeoFitoroid ne sadrži kortizon ni anestetike, a zahvaljujući svom mehanizmu djelovanja, ne nadražuje niti ne isušuje sluznicu.

INDIKACIJE: liječenje hemoroida (unutarnjih i vanjskih) i simptoma povezanih s njima, kao što su: **bol, pečenje i svrbež analnog i perianalnog područja.** Može se upotrebljavati i kod prisutnosti analnih fisura. Također se može koristiti i za **prevenciju, kao i u svim situacijama** koje mogu uzrokovati iritaciju i/ili začepljenje analnog i perianalnog područja (zatvor, proljev, nepravilna prehrana i stil života). Pogodan i **tijekom trudnoće i dojenja.**

NAČIN PRIMJENE: za vanjsku primjenu: namazati i nježno umasirati na analno i perianalno područje. Za unutarnju primjenu: upotrijebite najmensku endorektalnu cjevčicu koju treba pričvrstiti na tubu. Nanesite dovoljnu količinu masti koja će pokriti zahvaćeno područje. Proizvod upotrijebite nakon pražnjenja crijeva te nakon pažljivog pranja analnog i perianalnog područja. Ako želite spriječiti iritaciju uzrokovanu trenjem, tada ovaj tretman provedite prije pražnjenja crijeva, uz ponovnu primjenu i nakon pražnjenja. Nakon uporabe, odvijte cjevčicu, dobro je operite toplom vodom i sapunom te zatvorite tubu masti. Moguće ju je nanijeti više puta dnevno, čak i u kratkim razmacima i kroz dulje vremensko razdoblje.

SASTAV – Djelatne tvari: suhi ekstrakti lipofilne frakcije cvatućih vrhova smilja, (Helydol)* i veprinov podanak*; gel iz dehidriranih lista aloe vere*; vodena otopina cvatućih vrhova smilja*; uljni ekstrakt cvatućih vrhova kantariona*; ulje jojobe*; shea maslac*; eterična ulja: čajevca, čempresa i paprene metvice.

Ostali sastojci: gliceril stearat, kaprilni/kapirinski triglicerid, saharozni distearat, saharozni stearat, cetilstearilni alkohol, biljni glicerol, trihidroksistearin, biljna ulja, hidrogenizirana biljna ulja, kandeljijski vosak, ksantan guma, limunska kiselina, tokoferoli, natrijev silikat, benzilni alkohol, kalijev sorbat, natrijev dehidroacetat, suncokretovo ulje.

**Sastojak dobiven iz ekološkog, poljoprivrednog uzgoja*

UPOZORENJA: ne koristiti u slučaju preosjetljivosti ili alergije na jedan ili više sastojaka. U slučaju da ne dođe do poboljšanja simptoma, obratite se liječniku. Čuvati na sobnoj temperaturi, dalje od izvora topline i izravne svjetlosti. Čuvati izvan dohvata djece. Rok valjanosti odnosi se na neotvoren i pravilno čuvan proizvod.

ROK VALJANOSTI: rok valjanosti naveden je na pakiranju. Ne koristiti nakon navedenog roka valjanosti. Preporuča se upotrijebiti proizvod u roku 4 mjeseca od otvaranja.

PAKIRANJE ZA PRODAJU: Tuba od 40 ml. Sadrži endorektalni aplikator.

Datum posljednje revizije: 03/2024



ABOCA ZA ZDRAVLJE DANAS I SUTRA

Aboca je društvo sa odgovornim poslovanjem (Benefit Corporation).

Naša je obaveza raditi odgovorno, održivo i transparentno u odnosu na zajednicu i okoliš. Izvješće o utjecaju nalazi se na: www.aboca.com

Aboca S.p.A. Società Agricola

Località Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia

www.aboca.com

Tvrtka sa certifikatima za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 i ISO 13485 te za sustav upravljanja okolišem ISO 14001.


MATERIJALI PAKIRANJA	
Kutija	PAP 21 > Papir
Upute za uporabu	PAP 22 > Papir
Tuba	ALU 41 > Aluminij
Čep	PP 5 > Plastika
Omot cjevčice	PP 4 > Plastika
Poklopac cjevčice	LDPE 4 > Plastika
Cjevčica	PP 5 > Plastika
Za odlaganje provjerite odredbe u vašem mjestu boravka.	

FitoroiD^{neo}

Težave s hemoroidi

Z zaščito sluznice lajša bolečino,
pekoče občutke in srbenje

Vsebuje Helydol, suhi izvleček iz cvetnih
vršičkov laškega smilja in eterično olje čajevca

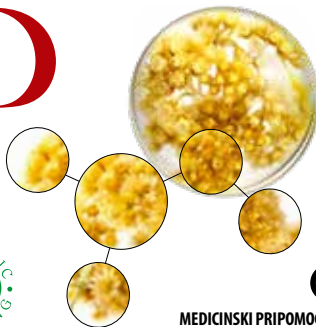

CE 0373
MEDICINSKI PRIPOMOČEK razreda IIb

ENDOREKTALNO BIO MAZILO

SL KAKO DELUJE: NeoFitoroid pomirja draženje, ščiti sluznico in spodbuja njeno normalizacijo s 3 mehanizmi delovanja:

- Mukoadhезivno:** tvori zaščitno oblogo, ki se oprime sluznice in jo ščiti pred stikom z dražilnimi snovmi;
- Mazalno:** zmanjšuje trenje s blatom, s čimer ščiti pred draženjem in perianalno obstrukcijo;
- Antioksidativno:** ščiti sluznico pred prostimi radikali, s čimer posredno lajša vnetje.

Poleg tega NeoFitoroid **ustvarja neugodno okolje za rast mikroorganizmov**, kar pripomore k dodatnemu zaščitnemu učinku in ublažitvi srbenja. Njegove **osevžilne lastnosti** hitro olajšajo nelagodje. NeoFitoroid ne vsebuje kortizona ali anestetikov, zaradi svojega mehanizma delovanja pa ne razdraži ali izsuši sluznice.

INDIKACIJE: zdravljenje težav s **hemoroidi** (notranjimi in zunanji) in z njimi povezanih **simptomov**, kot so **bolečina, pekoče občutke in analno ter perianalno srbenje**. Uporablja se lahko tudi ob prisotnosti **analnih fisur**. Prav tako je lahko koristen za **preprečevanje in v vseh situacijah**, ki lahko povzročijo **draženje in/ali obstrukcije** analnega in perianalnega področja (zaradi zaprtja, driske, prehrane in nepravilnega načina življenja). Primerno tudi za uporabo **med nosečnostjo in dojenjem**.

NAČIN UPORABE: za zunanjo uporabo namažite in nežno masirajte po analnem in perianalnem področju. Za notranjo uporabo uporabite posebno endorektalno kanilo, ki ga privijete na tubo. Nanesite zadostno količino mazila, da prekrijete prizadeto področje. Izdelek uporabite po odvajanju in temeljitim umivanju analnega in perianalnega področja. Da bi preprečili draženje zaradi trenja, izdelek nanesite pred odvajanjem in nato ponovite nanos tudi po odvajanju. Po uporabi odvijte kanilo in ga temeljito očistite z vročo vodo in milom ter zaprite tubo mazila. Nanos lahko ponovite večkrat na dan, tudi v kratkih presledkih. Izdelek je primeren tudi za dolgotrajno uporabo.

SESTAVA – Funkcionalne sestavine: suhi izvlečki lipofilne frakcije cvetnih vršičkov laškega smilja (Helydol)* in korenika bodeče lobodike*; gel iz dehidriranih listov aloe*; vodna raztopina cvetnih vršičkov laškega smilja*; oljni izvleček iz cvetnih vršičkov šentjanževke*; jojobino olje*; karitejevo maslo*; eterična olja: čajevca, ciprese in poprove mete.

Vsebuje tudi: gliceril stearat, kaprlni / kaprini triglicerid, distearat saharoze, stearat saharoze, cetilstearyl alkohol, rastlinski glicerol, trihidroksistearyl, rastlinska olja, hidrogenerana rastlinska olja, kamelinilni vosek, ksantan gumi, citronska kislina, tokoferoli, natrijev silikat, benzil alkohol, kalijev sorbat, natrijev dehidroacetat, sončnično olje.

* Sestavina, pridobljena z ekološko kmetijsko pridelavo

OPOZORILA: ne uporabljajte, če ste preobčutljivi ali alergični na eno ali več sestavin. Če se težave ne izboljšajo, svetujemo posvetovanje z zdravnikom. Hranite pri sobni temperaturi, stran od virov toplote in zaščiten pred svetlobo. Hranite izven doseg a otrok. Datum izteka roka uporabnosti velja za neodprt in pravilno shranjen izdelek.

ROK UPORABNOSTI: glejte rok uporabnosti, ki je natisnjen na embalaži. Izdelka ne uporabljajte po pretečenem roku uporabnosti. Svetujemo, da izdelek porabite v roku 4 mesecev po odprtju.

PRODAJNO PAKIRANJE: 40-ml tuba. Vsebuje endorektalni aplikator.

Datum zadnje posodobitve navodila: 03/2024



ABOCA ZA DANAŠNJE IN JUTRIŠNJE ZDRAVJE

Aboca je družbeno odgovorno podjetje (Benefit Corporation).

Zavezali smo se k poslovanju, ki je odgovorno, trajnostno in pregledno z vidika skupnosti in okolja. Poročilo o vplivu je dostopno na spletni strani www.aboca.com

Aboca S.p.A. Società Agricola

Località Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia

www.aboca.com

Podjetje s sistemom vodenja kakovosti po standardih ISO 9001 in ISO 13485 ter sistemom ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001.



MATERIAL EMBALAŽE

Škatla PAP 21 > Papir

Navodilo za uporabo PAP 22 > Papir

Tuba ALU 41 > Aluminij

Pokrovček PP 5 > Plastika

Vrečka kanile PP 4 > Plastika

Pokrovček kanile LDPE 4 > Plastika

Kanila PP 5 > Plastika

Za informacije o odlaganju
preverite lokalne predpise.



HRLEA012-C