

Cuidado de los ojos

Gotas oculares hidratantes, calmantes, refrescantes y protectoras.

Ideales para ojos secos, irritados y cansados

INCLUSO CON LENTES DE CONTACTO

SIN CONSERVANTES

PRODUCTO SANITARIO - Reglamento (UE) 2017/745



FARMACIAS
**APOTECA
NATURA**

ES INDICACIONES Y USO PREVISTO: Cuidado de los ojos es un producto sanitario indicado para el tratamiento y la prevención de los ojos secos, irritados

- y cansados. El producto resulta útil en los casos de sequedad ocular. Puede utilizarse con todos los tipos de lentes de contacto. Su exclusiva formulación permite:
- **Rehidratar la mucosa y aliviar el enrojecimiento, el escozor, el prurito y la sensación de cuerpos extraños** debidos a causas físicas ambientales (viento, exposición prolongada a los rayos solares, contaminación, humo, aire caliente y seco, ambiente salobre, ambientes climatizados), a actividades deportivas, a fatiga visual por un esfuerzo intenso durante el estudio o el trabajo, a la permanencia prolongada frente a pantallas de video y al uso de lentes de contacto.
 - **Calmar los trastornos causados por el contacto de los pólenes** con la conjuntiva, ayudando a **aliviar los síntomas alérgicos.**
 - **Limpiar la esclerótica conjuntival** eliminando los posibles cuerpos extraños, como polvo, pólenes o sustancias irritantes.

Para una mayor acción lubricante y calmante, se aconseja instilar la solución antes de la aplicación de las lentes de contacto. El producto sanitario Cuidado de los ojos está destinado a usuarios sin conocimientos especializados, siguiendo las instrucciones de uso proporcionadas por el fabricante. El producto sanitario está destinado al uso en ambiente doméstico. El usuario recibe toda la información necesaria para el uso correcto y seguro del producto.

MODO DE EMPLEO: Para un uso correcto del frasco multidosis se aconseja:

- Abrir el envase y, antes de la primera administración, quitar el precinto de protección y el tapón;
- Levantar la cabeza y sujetar el frasco boca abajo sobre el ojo;
- Bajar delicadamente el párpado inferior con un dedo y aumentar gradualmente la fuerza de los dedos en el frasco hasta obtener una gota;
- Instilar 1-2 gotas de solución en el saco conjuntival cada 4-5 horas;
- Cerrar el ojo durante algunos segundos;
- Cerrar bien el frasco inmediatamente después del uso.

Es posible que al consumir gradualmente la solución presente en el frasco sea necesario aplicar más fuerza. Se aconseja no presionar con fuerza el frasco cerrado para evitar que pueda salir alguna gota por la rejilla del tapón. Si es necesario, repetir la operación en el otro ojo. El producto puede utilizarse frecuentemente respetando la posología indicada sin superar los 30 días de tratamiento y es compatible con el uso de lentes de contacto, incluso si el usuario las lleva ya puestas. Para su correcta conservación, se aconseja cerrar bien el frasco después de cada uso y guardarlo dentro de la caja. Utilizar en un plazo de 6 meses tras la primera apertura del frasco.

COMPOSICIÓN: Hialuronato de sodio 0,20 %, Agua destilada de flores de Caléndula 0,10 %, Agua destilada de flores de Helicriso 0,10 %, Agua destilada de flores de Aciano 0,10 %, Hidroxipropilmetilcelulosa 0,20 %, Sal marina 1,2-1,5 %, Agua purificada, Fosfato de sodio monobásico, Fosfato de sodio disódico dodecahidratado. El producto está contenido en un frasco de 10 ml, equivalente a unas 250 gotas, **dotado de tecnología OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser) protegida por patente, que permite conservarlo sin utilizar conservantes en su formulación.**

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Antes del uso leer atentamente la información facilitada por el fabricante. No exceder la dosis recomendada. No existen datos específicos sobre el uso del producto en los niños y en las mujeres embarazadas. Si se manifiesta cualquier efecto no deseado, interrumpir el tratamiento y consultar a un médico. En caso de superficie ocular alterada o córnea dañada consultar al médico. No ingerir. El producto está destinado únicamente al uso oftálmico. Este producto sanitario no está indicado para individuos con hipersensibilidad a los componentes presentes en su formulación.

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD: Conservar en un lugar seco, alejado de la luz y del calor, a una temperatura comprendida entre 5 °C y 25 °C. No perforar/manipular el envase. No utilizar el producto si el envase está abierto o dañado. No utilizar después de la fecha de caducidad. La fecha de caducidad se refiere al producto en el envase sin abrir y conservado correctamente. La solución debe utilizarse en un plazo de 6 meses tras la primera apertura del frasco. Para su correcta conservación, se aconseja cerrar bien el frasco después de cada uso. Mantener el producto fuera de la vista y del alcance de los niños. Es recomendable lavarse meticulosamente las manos antes de aplicar la solución y no tocar con las manos la punta del aplicador. Durante la administración de la solución, se recomienda no tocar la membrana conjuntival con el extremo del frasco.

EFFECTOS NO DESEADOS: En caso de que se produzca un incidente grave relacionado con el producto sanitario, comunicarlo inmediatamente al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se ha producido el incidente.

INTERACCIONES CON OTROS PRODUCTOS SANITARIOS O MEDICAMENTOS: La administración de medicamentos y otros productos sanitarios para uso oftálmico debería efectuarse bajo la supervisión de un médico que pueda evaluar sus posibles interacciones.

FECHA DE LA ÚLTIMA REVISIÓN: 04/2024


FARMACIAS APOTECA NATURA - POR UNA SALUD CONSCIENTE

Somos la primera red de Farmacias Benefit® del mundo. A través de nuestros servicios y productos naturales nos centramos en la persona, la escuchamos, la comprendemos y la guiamos en su proceso de salud respetando su organismo y el medioambiente.

Este producto nace de la experiencia y de la especialización de las Farmacias Apoteca Natura en el uso de las sustancias naturales para la salud.

Ha sido formulado según las normas del Reglamento de Apoteca Natura (www.apotecanatura.com), que define sus características con pleno respeto a las personas y al medioambiente.

PRODUCTO SANITARIO Clase IIb

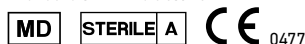

Cuidado dos olhos

Gotas oculares hidratantes, calmantes, refrescantes e protetoras.
Ideais para olhos secos, irritados e cansados

MESMO COM LENTES DE CONTACTO

SEM CONSERVANTES

DISPOSITIVO MÉDICO - Regulamento (UE) 2017/745



**FARMÁCIAS
APOTECA
NATURA**

INDICAÇÕES E FINALIDADE PREVISTA: Cuidado dos olhos é um Dispositivo Médico indicado para o tratamento e a prevenção dos olhos secos, irritados e cansados. O produto é indicado nos casos de secura ocular. Pode ser utilizado com todos os tipos de lentes de contacto. A sua formulação exclusiva permite:

- **reidrar a mucosa e aliviar a vermelhidão, o ardor, o prurido e a sensação de corpos estranhos** devido a causas físicas ambientais (vento, exposição prolongada ao sol, poluição, fumo, ar quente e seco, água do mar, ambientes com ar condicionado), atividades desportivas, fadiga visual devido a estudo e trabalho intensos, exposição prolongada a ecrãs de vídeo e uso de lentes de contacto.
- **aliviar o desconforto causado pelo contacto do pólen** com a conjuntiva, ajudando a **aliviar os sintomas alérgicos**.
- **limpar da esclera conjuntival** quaisquer corpos estranhos, como poeiras, pólen, substâncias irritantes.

Para uma melhor ação lubrificante e calmante, recomenda-se a instilação da solução antes de aplicar as lentes de contacto.

O dispositivo médico Cuidado dos olhos destina-se a utilizadores sem conhecimentos especializados, seguindo as instruções de utilização do fabricante. O dispositivo médico destina-se a ser utilizado num ambiente doméstico. São fornecidas ao utilizador todas as informações necessárias para a utilização correta e segura do dispositivo.

MODO DE USO: para uma utilização correta do frasco multidoso, recomenda-se:

- abrir a embalagem e remover o selo de proteção e a tampa na primeira administração;
- levantar a cabeça e segurar o frasco virado para baixo sobre o olho;
- puxar suavemente a pálpebra inferior para baixo com um dedo e aumentar gradualmente a força de pressão dos dedos no frasco até obter uma gota;
- instilar 1-2 gotas de solução no saco conjuntival a cada 4-5 horas;
- fechar o olho durante alguns segundos;
- fechar o frasco imediatamente após a utilização.

É possível que, à medida que a solução contida no frasco se esgota, seja necessário aplicar mais força. Recomenda-se não pressionar o frasco fechado com força para evitar que saiam gotas pela grelha da tampa. Se necessário, repetir a operação no outro olho. O produto pode ser utilizado frequentemente, de acordo com a posologia indicada, sem exceder 30 dias de tratamento e pode ser utilizado por portadores de lentes de contacto, mesmo com estas colocadas. Para uma conservação correta, recomenda-se que o frasco seja devidamente fechado após cada utilização e guardado dentro da embalagem. Utilizar no prazo de 6 meses após a primeira abertura do frasco.

COMPOSIÇÃO: Hialuronato de sódio 0,20%, Água destilada de flores de Calêndula 0,10%, Água destilada de flores de Helicriso 0,10%, Água destilada de flores de Centáurea 0,10%, Hidroxipropilmetilcelulose 0,20%, Sal marinho 1,2-1,5%, Água purificada, Fosfato de sódio monobásico, Fosfato de sódio dissódico dodecahidratado. O produto está contido num frasco de 10 ml, equivalente a cerca de 250 gotas, **equipado com a tecnologia OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser), protegida por patente, que permite a conservação sem a utilização de conservantes na formulação.**

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: ler atentamente as informações do fabricante antes de utilizar o produto. Não exceder a dose recomendada. Não existem dados específicos sobre a utilização do produto em crianças e mulheres grávidas. Interromper o tratamento se surgirem quaisquer efeitos indesejáveis e consultar um médico. Se a superfície ocular estiver comprometida ou a córnea danificada, consultar um médico. Não ingerir. O produto destina-se exclusivamente a uso oftálmico. O dispositivo médico não é indicado para indivíduos com hipersensibilidade conhecida aos componentes presentes na formulação.

CONSERVAÇÃO E VALIDADE: conservar num local seco, ao abrigo da luz e do calor, a uma temperatura entre 5 °C e 25 °C. Não perfurar/adulterar a embalagem. Não utilizar o produto se a embalagem tiver sido aberta ou danificada. Não utilizar após a data de validade. A data de validade refere-se ao produto em embalagem intacta e corretamente conservado. A solução deve ser utilizada no prazo de 6 meses após a primeira abertura do frasco. Para uma conservação correta, recomenda-se que o frasco seja devidamente fechado após cada utilização. Manter fora da vista e do alcance das crianças. Recomenda-se a lavagem cuidadosa das mãos antes de aplicar a solução e não tocar na ponta do dispensador com as mãos. Ao administrar a solução, recomenda-se que não se toque na membrana conjuntival com a extremidade do frasco.

EFETOS INDESEJÁVEIS: em caso de incidente grave relacionado com o dispositivo médico, informar imediatamente o fabricante e a Autoridade Competente do Estado-Membro onde ocorreu o incidente.

INTERAÇÕES COM OUTROS DISPOSITIVOS MÉDICOS OU MEDICAMENTOS: qualquer administração de medicamentos e outros dispositivos médicos para uso oftálmico deve ser efetuada sob a supervisão de um médico que possa avaliar possíveis interações.

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO: 04/2024

FARMÁCIAS APOTECA NATURA - PARA UMA SAÚDE CONSCIENTE

Somos a primeira rede de Farmácias Benefit® no mundo. Com os nossos serviços e produtos naturais optamos por colocar a Pessoa na posição central, ouvi-la, compreendê-la e orientá-la no seu percurso de saúde, em pleno respeito pelo seu organismo e pelo meio ambiente.

Este produto nasce da experiência e da especialização das Farmácias Apoteca Natura na utilização das substâncias naturais para a saúde. É formulado seguindo as regras do Regulamento Apoteca Natura (www.apotecanatura.com) que definem as suas características, respeitando plenamente o homem e o ambiente.

DISPOSITIVO MÉDICO Classe IIb



REF GA20389

Incos Cosmeceutica Industriale s.r.l. - Via Gobetti 4 - 40050 Funo di Argelato (BO) - Italy

94034341
ESLEA_L0C(H)-A


135mm



220mm

FRONTE

135mm

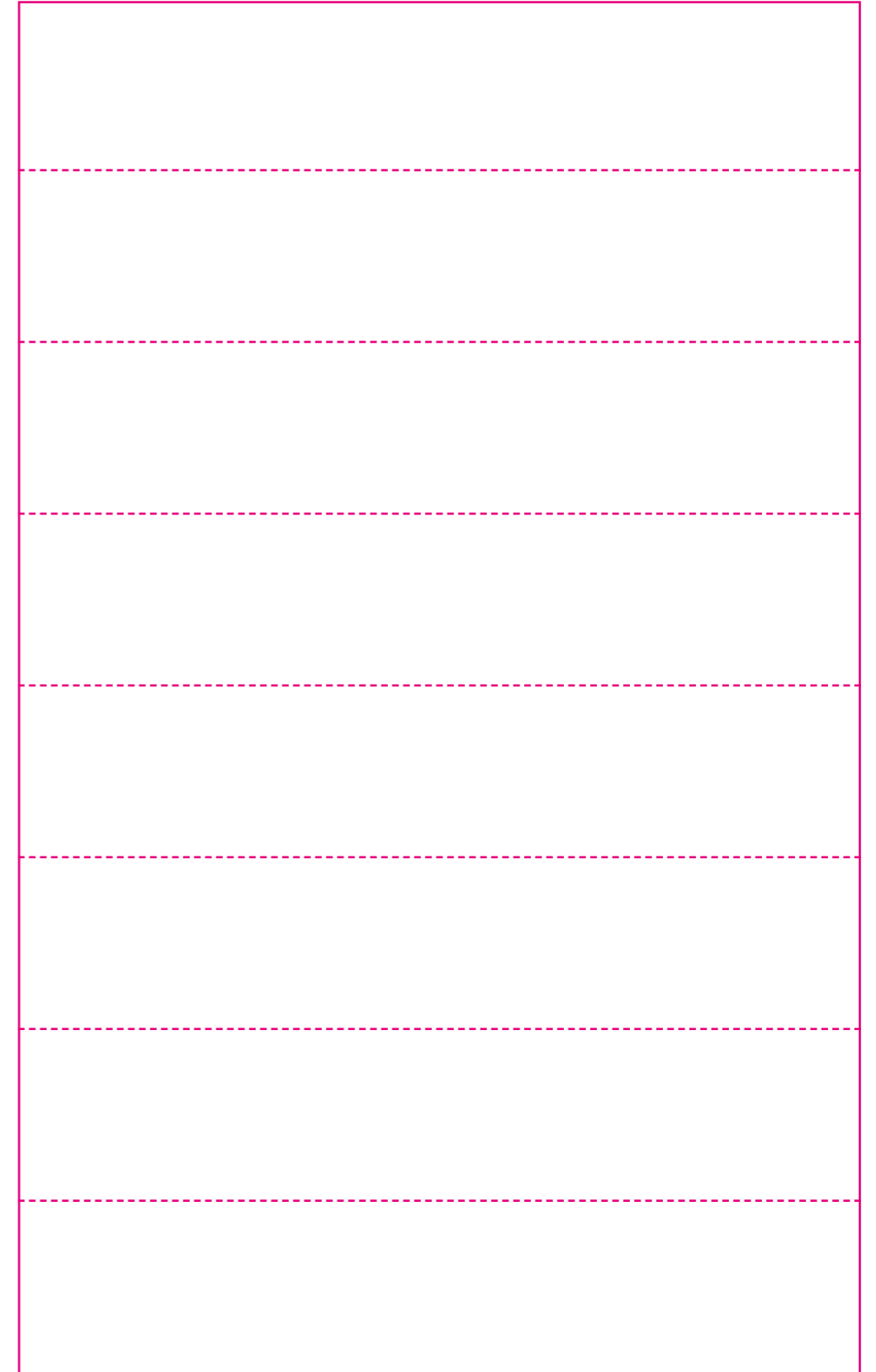

220mm

RETRO