

Fitonasal Spray

CONGESTIONE NASALE

Decongestiona e fluidifica

Protegge e favorisce la rigenerazione della mucosa

Senza conservanti - Senza gas propellenti

Anche per un uso prolungato


DISPOSITIVO MEDICO

Regolamento (UE) 2017/745

100%
FORMULA NATURALE
BIODEGRADABILE

senza
glutine

750
mOsm/Kg

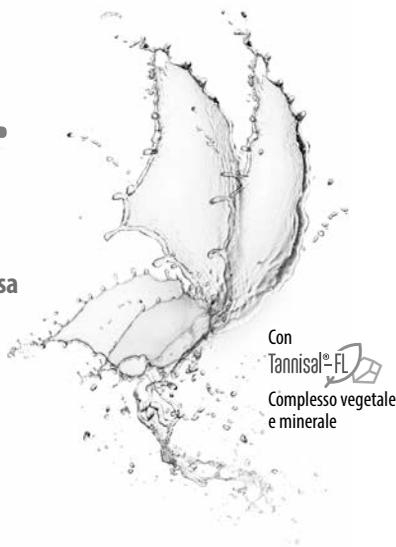

SPRAY CONCENTRATO

Fitonasal Spray concentrato è un dispositivo medico che aiuta a liberare il naso chiuso, facilita la fluidificazione e la rimozione del muco dalle fosse nasali e favorisce la normale rigenerazione della mucosa. Svolge, infatti, una **fisiologica azione decongestionante e protettiva** come risultato dei seguenti meccanismi d'azione:



- **Osmotico bilanciato**

Favorisce il richiamo di acqua dai tessuti congestionati senza causare irritazione e secchezza grazie all'osmolalità bilanciata e standardizzata (750 mOsm/Kg).

- **Astringente locale**

Interagisce in modo aspecifico con alcune proteine infiammatorie presenti nei fluidi nasali e ne permette la rimozione.

- **Barriera**

Forma un film sulla mucosa e la protegge dal contatto con gli agenti irritanti, favorendo il mantenimento dell'integrità della barriera epiteliale.

- **Riparatore**

La protezione a livello locale favorisce il normale processo di rigenerazione della mucosa, riducendo le microlesioni presenti nelle cavità nasali conseguenti a raffreddori, riniti e sinusiti.

- **Antiossidante**

Riduce i radicali liberi generati dall'infiammazione della mucosa.

- **Fluidificante**

Promuove l'idratazione del muco e ne favorisce l'eliminazione.

La formulazione dona un piacevole **effetto rinfrescante**.

La conservazione del prodotto è garantita dal processo di produzione con sistema di filtrazione sterilizzante e confezionamento in ambiente microbiologicamente controllato, senza l'utilizzo di conservanti.

La linea si completa con Fitonasal Nebulizzatore per una pulizia profonda delle cavità nasali e con Fitonasal Biopomata per un'ulteriore protezione della zona nasale e perinasale.

INDICAZIONI


Fitonasal Spray concentrato è uno spray nasale indicato in tutti i casi di congestione ed irritazione delle cavità nasali, sia acute che croniche, dovute a raffreddore, sindromi influenzali, allergie (stagionali e perenni), rinosinusiti (virali e batteriche), riniti da cause meccanico-ostruttive (es. deviazioni del setto nasale).

Il prodotto può essere utilizzato a partire da 6 anni di età.

MODO D'USO

Posologia adulti e ragazzi sopra 12 anni: erogare 2 nebulizzazioni per narice, soffiare il naso e ripetere l'applicazione.

Posologia bambini dai 6 ai 12 anni: erogare 1 nebulizzazione per narice, soffiare il naso e ripetere l'applicazione.

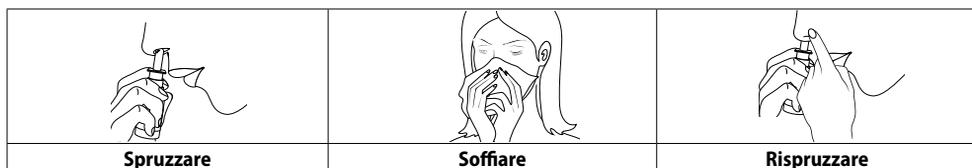

Si consiglia di applicare **Fitonasal Spray concentrato** più volte durante la giornata anche a distanza ravvicinata e di ripetere l'erogazione prima di coricarsi. Dopo ciascun utilizzo pulire l'erogatore con un panno umido e pulito ed asciugare con cura.

Fitonasal Spray concentrato può essere utilizzato frequentemente e per periodi prolungati perché non contiene decongestionanti vasocostrittori, non dà assuefazione, non irrita e non secca la mucosa.

Nel caso in cui **Fitonasal Spray concentrato** venga usato insieme a farmaci ad applicazione nasale si consiglia di distanziare di almeno 1 ora l'applicazione dei due prodotti.

COMPOSIZIONE

Fitonasal Spray concentrato è un prodotto **100% naturale** e **biodegradabile** con Tannisal®-FL, complesso vegetale e minerale.

Non contiene sostanze di sintesi, semisintesi o geneticamente modificate ed anche i processi di lavorazione con cui è ottenuto non utilizzano né solventi né sostanze di sintesi chimica.

1 ml di prodotto contiene: complesso naturale **Tannisal®-FL** 3,2 mg, a base di **Tannini** e **Flavonoidi** (frazioni estrattive LPME di Amamelide e Timo - 3 mg) e **Minerali** (Salgemma di estrazione mineraria non trattato chimicamente - 0,2 mg); Acqua; Glicerina vegetale; Aromi naturali di Eucalipto e Menta.

Un'erogazione corrisponde a circa 0,14 ml.

Le frazioni estrattive contenute nel prodotto sono ottenute attraverso un esclusivo processo tecnologico, chiamato LPME (Liquid-Phase Microextraction), messo a punto dalla ricerca Aboca.

Fitonasal Spray concentrato è controllato secondo i seguenti parametri grazie ai quali Aboca garantisce la qualità dei prodotti naturali nella loro complessità.

1. Impronta digitale metabolomica tramite tecnologia NIR (near infrared spectroscopy)

a conferma della validazione del processo produttivo del prodotto naturale

2. Osmolalità 750 mOsm/Kg

a conferma dell'efficacia decongestionante e della tollerabilità

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO

Non utilizzare se presente ipersensibilità o allergia individuale verso uno o più componenti. Utilizzare esclusivamente per via nasale. Evitare il contatto con gli occhi, nel caso lavarli con acqua. Se i sintomi persistono consultare, comunque, il medico o il farmacista.

EFFETTI INDESIDERATI

Fitonasal Spray concentrato è in genere ben tollerato. Tuttavia, se si nota la comparsa di un effetto indesiderato riconducibile al prodotto o al suo utilizzo, informare il medico e/o il farmacista ed il Fabbriante Aboca ai contatti riportati su questo foglietto illustrativo. In caso di incidente grave informare anche l'autorità competente del proprio Paese.

SOVRADOSAGGIO

Nella popolazione generale, in funzione dei dati disponibili, non sono noti né attesi fenomeni dovuti al sovradosaggio.

INTERAZIONI CON ALTRI DISPOSITIVI MEDICI, MEDICINALI O ALIMENTI

Dai dati disponibili non sono attese interazioni di **Fitonasal Spray concentrato** con altri dispositivi medici, medicinali o alimenti.

CONSERVAZIONE E SCADENZA

Conservare a temperatura ambiente in luogo fresco, asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Tenere fuori dalla portata dei bambini. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. La data di scadenza indicata sulla confezione resta invariata anche dopo la prima erogazione. Si raccomanda di conservare l'astuccio.

CONFEZIONE VENDITA

Fitonasal Spray concentrato: Flacone in vetro da 30 ml con nebulizzatore

DATA ULTIMA REVISIONE: Marzo 2024

Aboca

PER LA SALUTE DI OGGI E DI DOMANI

Da oltre 40 anni noi di Aboca ricerchiamo nella Natura le risposte per la salute delle persone, nel rispetto dell'organismo e dell'ambiente.

LA RICERCA ABOCA

Riconosciamo il potenziale terapeutico delle sostanze naturali complesse e le proiettiamo dal mondo della tradizione a quello dell'innovazione, secondo i criteri della Evidence Based Medicine e della Systems Medicine.


100% NATURALE: DALLA COLTIVAZIONE AL PRODOTTO FINITO

Realizziamo i nostri prodotti grazie ad un sistema verticalizzato che va dalla coltivazione biologica, alla ricerca scientifica fino alla produzione, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi chimica e non biodegradabili lungo tutto il processo.

LA SALUTE SOSTENIBILE

La salute non è solo un bene individuale, ma anche un Bene Comune. Per questo non può esistere una vera salute senza sostenibilità. Siamo una società Benefit e con il nostro lavoro ci impegniamo formalmente a portare un beneficio per la comunità e l'ambiente.

Per conoscere tutti i nostri prodotti, visita il sito www.aboca.com

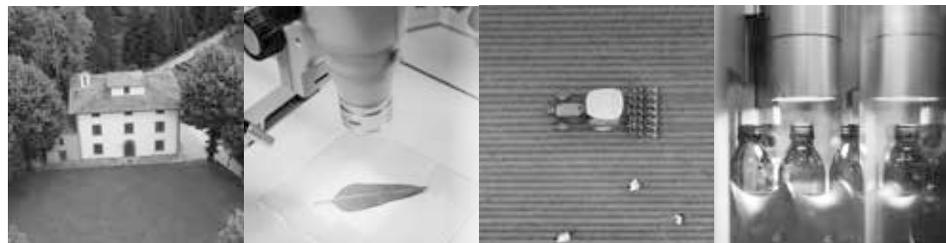

DISPOSITIVO MEDICO Classe IIa  0477

 **Aboca S.p.A. Società Agricola** - Località Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia
www.aboca.com

Azienda con sistema di gestione qualità ISO 9001 e ISO 13485 e sistema di gestione ambientale ISO 14001 certificati.