

# Golamir

TRATAMENTO DA DOR DE GARGANTA

Reduz a dor  
e protege a mucosa

Com ActiFilmDOL  
Complexo vegetal

DISPOSITIVO MÉDICO  
Regulamento (UE) 2017/745

SPRAY FORTE

sem  
glúten

100%  
FÓRMULA NATURAL  
BIODEGRADÁVEL

**Golamir** é um dispositivo médico que **atua contra dor, ardor e dificuldade de deglutição, protegendo a mucosa orofaríngea** dos fatores que causam a irritação (vírus, bactérias, alergénios, fumo, poluição, pó). Com efeito, **alivia de forma fisiológica a dor e protege a garganta** através de uma **ação anti-inflamatória indireta**, como resultado dos seguintes mecanismos de ação:



**Barreira**

**Antioxidante**

- **Barreira**

Forma uma película ativa sobre a mucosa para reduzir a hipersensibilidade e protegê-la dos ataques dos agentes externos.

- **Antioxidante**

Reduz os radicais livres originados pela inflamação da mucosa.

Reduz a sensação de desconforto na garganta, também devido às suas propriedades refrescantes. Além disso, cria um **ambiente desfavorável para o crescimento das bactérias**.

**Golamir, graças à sua composição e ao seu mecanismo de ação fisiológico, reduz a dor e protege a garganta, respeitando o organismo e o ambiente.**

## INDICAÇÕES

**Golamir** é indicado nos casos de dor de garganta para o **tratamento dos estados irritativos e inflamatórios da cavidade orofaríngea**, que podem ser causados por vírus, bactérias, alergénios ou pelo contacto com agentes externos irritantes (fumo, poluição, pó). O produto é também indicado nos estados de constipação em que as secreções nasais, ao descerem para a garganta, podem provocar irritação.

**A partir dos 6 anos de idade.**

**Golamir**, pelo seu mecanismo de ação, pode ser utilizado também em combinação com os tratamentos farmacológicos prescritos pelo médico.

## MODO DE USO

Agitar o frasco antes de usar. Usando o nebulizador específico, recomenda-se administrar 4 nebulizações na cavidade orofaríngea, 4 vezes por dia.

A embalagem contém o nebulizador numa saqueta selada. Quando utilizar pela primeira vez, retirar a tampa de alumínio do frasco e inserir o nebulizador.

**Golamir** pode ser tomado também por períodos prolongados. No entanto, se os sintomas persistirem, consulte também o médico ou o farmacêutico.

## COMPOSIÇÃO

**Golamir** é um produto **100% natural e biodegradável**, com ActiFilm DOL, complexo vegetal. Não contém substâncias de síntese, semissíntese química ou geneticamente modificadas e, além disso, os processos de produção pelos quais é obtido também não utilizam solventes ou outras substâncias de síntese química.

1 ml de produto contém: complexo vegetal **ActiFilm DOL** 390 mg, à base de **Taninos, Flavonoides, Resinas e Polissacáridos** (fração extrativa LPME de Agrimónia; fração extrativa de Mirra; gel das folhas desidratadas de Aloe Vera); óleos essenciais de Eucalipto e Hortelã; Glicerina vegetal; sumo de Maçã; aromas naturais de Limão e Hortelã; Goma xantana; Água.

Não contém conservantes nem edulcorantes artificiais.

Uma nebulização corresponde a cerca de 0,17 ml.

**A investigação Aboca desenvolveu um processo tecnológico de extração exclusivo, designado LPME (Liquid-Phase Microextraction), que partindo de substâncias naturais permite obter frações extrativas complexas, concentradas e validadas.**

**Golamir** é controlado de acordo com os três parâmetros seguintes, graças aos quais a Aboca garante a qualidade dos produtos naturais na sua complexidade.

**1. Impressão digital metabólica através da tecnologia NIRS (Near-Infrared Spectroscopy)**

*para confirmar a validação do processo de produção do produto natural*

**2. Teste de aderência**

*para confirmar a ação barreira e protetora das células da faringe*

**3. Teor em taninos  $\geq 0,1\%$**

## ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Não utilizar se existir hipersensibilidade ou alergia individual em relação a um ou mais componentes.

## EFEITOS INDESEJÁVEIS

**Golamir**, em geral, é bem tolerado. No entanto, se notar o aparecimento de um efeito indesejável devido ao produto ou à sua utilização, informe o médico e/ou o farmacêutico e o Fabricante Aboca, através dos contactos indicados neste folheto informativo.

Em caso de incidente grave, informe também a autoridade competente do seu País.

## SOBREDOSAGEM

Na população geral, com base nos dados disponíveis, não são conhecidos nem esperados quaisquer fenómenos causados por sobredosagem.

## **INTERAÇÕES COM OUTROS DISPOSITIVOS MÉDICOS, MEDICAMENTOS OU ALIMENTOS**

Dos dados disponíveis não são esperadas interações de **Golamir** com outros dispositivos médicos, medicamentos ou alimentos.

## **CONSERVAÇÃO E VALIDADE**

Conservar à temperatura ambiente, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. Manter fora do alcance das crianças. A data de validade refere-se ao produto intacto e corretamente conservado. Ver a data de validade indicada na embalagem. Não utilizar após a data de validade indicada. Recomenda-se que a embalagem seja guardada.

## **EMBALAGEM PARA VENDA**

Frasco de vidro de 30 ml com nebulizador spray.  
Álcool 24,7% vol. - Lic. Fiscal IT00PGA00035A

**DATA DA ÚLTIMA REVISÃO:** 11/2023



## **PARA A SAÚDE DE HOJE E DE AMANHÃ**

Há mais de 40 anos nós, da Aboca, procuramos na Natureza as respostas para a saúde das pessoas, respeitando o organismo e o ambiente.

## **A INVESTIGAÇÃO ABOCA**

Reconhecemos o potencial terapêutico das substâncias naturais complexas e projetamo-las do mundo da tradição para o da inovação, de acordo com os critérios da Evidence Based Medicine e da Systems Medicine.


## **100% NATURAL: DO CULTIVO AO PRODUTO ACABADO**

Realizamos os nossos produtos graças ao sistema verticalizado que vai desde o cultivo biológico até à investigação científica e à produção, excluindo a utilização de substâncias de síntese química e não biodegradáveis ao longo de todo o processo.

## **A SAÚDE SUSTENTÁVEL**

A saúde não é apenas um bem individual, mas também um Bem Comum. Por isso não pode existir uma verdadeira saúde sem sustentabilidade. Somos uma Benefit Corporation e com o nosso trabalho empenhamo-nos formalmente em trazer benefícios para a comunidade e o ambiente.

Para conhecer todos os nossos produtos, visite o site [www.aboca.com](http://www.aboca.com)

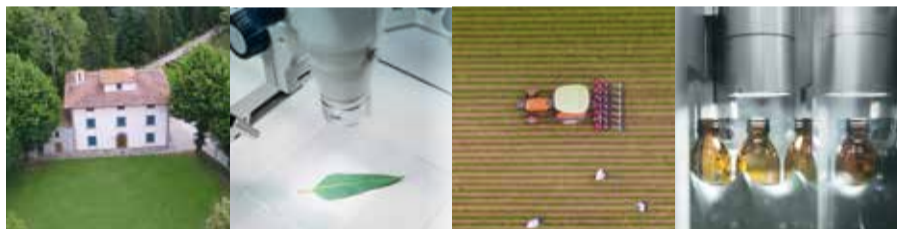

DISPOSITIVO MÉDICO Classe IIa  0477

 **Aboca S.p.A. Società Agricola**

Località Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia  
[www.aboca.com](http://www.aboca.com)

Empresa com sistema de gestão de qualidade ISO 9001 e ISO 13485 e sistema de gestão ambiental ISO 14001 certificados.

FSC

PTLEA\_GOMC-A