

Golamir

TRATAMENTO DA DOR DE GARGANTA

Reduz a dor
e protege a mucosa

Com ActiFilmDOL
Complexo vegetal

DISPOSITIVO MÉDICO
Regulamento (UE) 2017/745

SPRAY SEM ÁLCOOL

ADULTOS
E CRIANÇAS
1+ ANO

100%
FÓRMULA NATURAL
BIODEGRADÁVEL

sem
glúten

Golamir é um dispositivo médico que **atua contra dor, ardor e dificuldade de deglutição, protegendo a mucosa orofaríngea** dos fatores que causam a irritação (vírus, bactérias, alergénios, fumo, poluição, pó). Com efeito, **alivia** de forma fisiológica **a dor e protege a garganta** através de uma **ação anti-inflamatória indireta**, como resultado dos seguintes mecanismos de ação:



Barreira

Antioxidante

- **Barreira**

Forma uma película ativa sobre a mucosa para reduzir a hipersensibilidade e protegê-la dos ataques dos agentes externos.

- **Antioxidante**

Reduz os radicais livres originados pela inflamação da mucosa.

Além disso, cria um **ambiente desfavorável para o crescimento das bactérias**.

Sabor agradável a Frutos do Bosque e Amora.

Golamir, graças à sua composição e ao seu mecanismo de ação fisiológico, reduz a dor e protege a garganta, respeitando o organismo e o ambiente.

INDICAÇÕES

Golamir é indicado nos casos de dor de garganta para o **tratamento dos estados irritativos e inflamatórios da cavidade orofaríngea**, que podem ser causados por vírus, bactérias, alergénios ou pelo contacto com agentes externos irritantes (fumo, poluição, pó).

O produto é também indicado nos estados de constipação em que as secreções nasais, ao descerem para a garganta, podem provocar irritação.

A partir de 1 ano de idade.

Golamir, pelo seu mecanismo de ação, pode ser utilizado também em combinação com os tratamentos farmacológicos prescritos pelo médico.

MODO DE USO

Agitar o frasco antes de usar. Recomenda-se administrar na cavidade orofaríngea:

1-6 anos: 4 nebulizações até 4 vezes por dia;

Com mais de 6 anos e em adultos: 4 nebulizações até 8 vezes por dia.

Nas crianças mais pequenas, o produto pode ser introduzido no lado interno das bochechas, de modo a favorecer a sua ingestão gradual.

A embalagem contém o nebulizador numa saqueta selada. Quando utilizar pela primeira vez, retirar a tampa de alumínio do frasco e inserir o nebulizador.

Golamir pode ser tomado também por períodos prolongados. No entanto, se os sintomas persistirem, consulte também o médico ou o farmacêutico.

COMPOSIÇÃO

Golamir é um produto **100% natural e biodegradável**, com ActiFilm DOL, complexo vegetal. Não contém substâncias de síntese, semissíntese química ou geneticamente modificadas e, além disso, os processos de produção pelos quais é obtido também não utilizam solventes ou outras substâncias de síntese química.

1 ml de produto contém: complexo vegetal **ActiFilm DOL** 25 mg, à base de **Taninos, Flavonoides, Resinas e Polissacáridos** (fração extrativa LPME de Agrimónia; fração extrativa de Mirra; gel das folhas desidratadas de Aloé Vera); Glicerina vegetal; Água; sumo de Limão; Goma xantana; sumo de Maçã; aromas naturais de Frutos do Bosque e Amora.

Não contém conservantes nem edulcorantes artificiais.

Uma nebulização corresponde a cerca de 0,17 ml.

A investigação Aboca desenvolveu um processo tecnológico de extração exclusivo, designado LPME (Liquid-Phase Microextraction), que partindo de substâncias naturais permite obter frações extrativas complexas, concentradas e validadas.

Golamir é controlado de acordo com os três parâmetros seguintes, graças aos quais a Aboca garante a qualidade dos produtos naturais na sua complexidade.

1. Impressão digital metabolómica através da tecnologia NIRS (Near-Infrared Spectroscopy)

para confirmar a validação do processo de produção do produto natural

2. Teste de aderência

para confirmar a ação barreira e protetora das células da faringe

3. Teor em taninos $\geq 0,05\%$

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Não utilizar se existir hipersensibilidade ou alergia individual em relação a um ou mais componentes.

EFEITOS INDESEJÁVEIS

Golamir, em geral, é bem tolerado. No entanto, se notar o aparecimento de um efeito indesejável devido ao produto ou à sua utilização, informe o médico e/ou o farmacêutico e o Fabricante Aboca, através dos contactos indicados neste folheto informativo.

Em caso de incidente grave, informe também a autoridade competente do seu País.

SOBREDOSAGEM

Na população geral, com base nos dados disponíveis, não são conhecidos nem esperados quaisquer fenómenos causados por sobredosagem.

INTERAÇÕES COM OUTROS DISPOSITIVOS MÉDICOS, MEDICAMENTOS OU ALIMENTOS

Dos dados disponíveis não são esperadas interações de **Golamir** com outros dispositivos médicos, medicamentos ou alimentos.

CONSERVAÇÃO E VALIDADE

Conservar à temperatura ambiente, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. Manter fora do alcance das crianças. A data de validade refere-se ao produto intacto e corretamente conservado. Ver a data de validade indicada na embalagem. Não utilizar após a data de validade indicada. Recomenda-se que a embalagem seja guardada.

EMBALAGEM PARA VENDA

Frasco de vidro de 30 ml com nebulizador spray.

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO: 11/2023



PARA A SAÚDE DE HOJE E DE AMANHÃ

Há mais de 40 anos nós, da Aboca, procuramos na Natureza as respostas para a saúde das pessoas, respeitando o organismo e o ambiente.

A INVESTIGAÇÃO ABOCA

Reconhecemos o potencial terapêutico das substâncias naturais complexas e projetamo-las do mundo da tradição para o da inovação, de acordo com os critérios da Evidence Based Medicine e da Systems Medicine.

100% NATURAL: DO CULTIVO AO PRODUTO ACABADO

Realizamos os nossos produtos graças ao sistema verticalizado que vai desde o cultivo biológico até à investigação científica e à produção, excluindo a utilização de substâncias de síntese química e não biodegradáveis ao longo de todo o processo.

A SAÚDE SUSTENTÁVEL

A saúde não é apenas um bem individual, mas também um Bem Comum. Por isso não pode existir uma verdadeira saúde sem sustentabilidade. Somos uma Benefit Corporation e com o nosso trabalho empenhamo-nos formalmente em trazer benefícios para a comunidade e o ambiente.

Para conhecer todos os nossos produtos, visite o site www.aboca.com



DISPOSITIVO MÉDICO Classe IIa  0477

 **Aboca S.p.A. Società Agricola**

Località Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia

www.aboca.com

Empresa com sistema de gestão de qualidade ISO 9001 e ISO 13485 e sistema de gestão ambiental ISO 14001 certificados.

FSC

PTLEA_GOMI-A