

Fitostill PLUS

OLHOS SECOS, IRRITADOS E CANSADOS

Tratamento hidratante, refrescante e calmante.

Ideal em caso de stress visual.

SEM CONSERVANTES
MESMO COM AS LENTES DE CONTACTO COLOCADAS

DISPOSITIVO MÉDICO

Regulamento (UE) 2017/745



Com LIGUFLOS complexo vegetal
e ácido hialurónico

GOTAS OCULARES EM 10 AMPOLAS DE DOSE ÚNICA


Fitostill Plus gotas oculares é um dispositivo médico à base de **Liguflos - complexo vegetal - e ácido hialurónico** que atua **restaurando a função lubrificante natural da “película lacrimal”**.

O produto é útil para **acalmar e prevenir os estados de irritação ocular, aliviar a sensação de ardor** devido a agentes externos agressivos ou a **esforços visuais prolongados e em caso de olhos avermelhados**.

Particularmente indicado para quem sofre de desconforto relacionado com a **síndrome do olho seco** (diminuição da qualidade e quantidade de produção de lágrimas).

Fitostill Plus gotas oculares exerce **uma ação fisiológica hidratante, refrescante, calmante e protetora** no olho, como resultado dos seguintes mecanismos de ação:

- **Ação barreira**
Forma uma película protetora na superfície ocular que combate a inflamação.
- **Ação lubrificante**
Limita a fricção entre a pálpebra e a superfície ocular.
- **Ação humectante**
Forma uma estrutura reticular que retém a água na superfície ocular, conferindo e mantendo um nível adequado de humidade.
- **Ação antioxidante**
Reduz os radicais livres originados pela inflamação da mucosa.

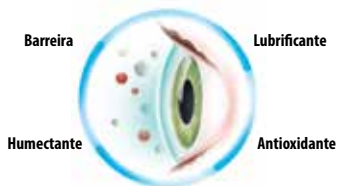

INDICAÇÕES

Fitostill Plus é indicado para **o tratamento e a prevenção dos olhos avermelhados e cansados**.

É particularmente indicado para quem sofre de **secura ocular**, condição caracterizada por: ligeira vermelhidão ocular, sensação de areia nos olhos, ardor, fotofobia, sensação de olhos húmidos, prurido, dor nas pálpebras ao acordar.

Além disso, o produto é indicado nos casos de **vermelhidão, ardor, prurido e sensação de corpos estranhos** devido a:


- agentes externos, quer diretos (poeiras atmosféricas, pólenes, reduzida humidade do ar, vento, ar carregado de sal, frio, radiação solar intensa, uso de lentes de contacto), quer indiretos (utilização do computador ou da televisão, leitura prolongada, atenção à condução).
- fenómenos alérgicos, conjuntivite, blefarite crónica, cirurgia ocular ou outros processos inflamatórios.

É indicado **também para uso frequente**, várias vezes ao dia, e pode ser utilizado **por portadores de lentes de contacto**, mesmo com estas colocadas. O produto também pode ser utilizado em crianças a partir dos 3 anos de idade.

MODO DE USO

É aconselhável aplicar 2-3 gotas em cada olho, uma a três vezes ao dia. A ampola em dose única pode, depois de aberta, voltar a ser fechada e usada no prazo de 12 horas. O sistema de fecho da ampola em dose única é patenteado especificamente para impedir a sua abertura accidental. Para uma utilização correta do produto, seguir estas instruções:

- abrir a ampola em dose única rodando a tampa no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio
- aplicar o produto, pressionando ligeiramente a ampola em dose única
- para fechar a ampola em dose única, virar a tampa e inserir, pressionando com firmeza o corpo da ampola

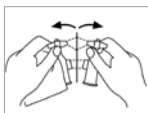

Separar



Abrir



Utilizar



Voltar a fechar

Fitostill Plus gotas oculares pode ser utilizado **por portadores de lentes de contacto, mesmo com estas colocadas**. Fitostill Plus gotas oculares é indicado **também para uso frequente**, várias vezes ao dia. O produto em ampolas em dose única deve ser usado por uma única pessoa. **Fitostill Plus gotas oculares** é embalado em práticas ampolas esterilizadas em dose única, sem conservantes nem corantes. Uma leve coloração deve-se ao componente vegetal do Liguflos.

COMPOSIÇÃO

1 ampola em dose única (0,5 ml) contém: complexo vegetal **Liguflos 0,10 mg**, à base de **Flavonoides** (fração extrativa LPME de Camomila flores liguladas); **Ácido hialurónico sal de sódio** 1 mg; Água destilada de Camomila flores 25 mg; Glicerina vegetal; Fosfato de sódio bibásico dodecahidratado; Cloreto de sódio; Fosfato de sódio monobásico monohidratado; Água. **A fração extrativa contida no produto é obtida através de um processo tecnológico exclusivo, designado LPME (Liquid-Phase Microextraction), desenvolvido pela investigação Aboca.**

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O produto destina-se apenas a uso oftálmico. Durante a aplicação, não tocar no olho nem em qualquer outra superfície com a extremidade da ampola em dose única. Não utilizar se existir hipersensibilidade ou alergia individual em relação a um ou mais componentes. Em caso de distúrbios durante o uso, interromper o tratamento e consultar um médico.

EFEITOS INDESEJÁVEIS

Fitostill Plus gotas oculares, em geral, é bem tolerado. No entanto, se notar o aparecimento de um efeito indesejável devido ao produto ou à sua utilização, informe o médico e/ou o farmacêutico e o Fabricante Aboca, através dos contactos indicados neste folheto informativo. Em caso de incidente grave, informe também a autoridade competente do seu País.

SOBREDOSAGEM

Na população geral, com base nos dados disponíveis, não são conhecidos nem esperados quaisquer fenómenos causados por sobredosagem.

INTERAÇÕES COM OUTROS DISPOSITIVOS MÉDICOS, MEDICAMENTOS OU ALIMENTOS

De acordo com os dados disponíveis, não são esperadas interações de Fitostill Plus gotas oculares com outros dispositivos médicos, medicamentos ou alimentos.

EMBALAGEM

10 ampolas em dose única fecháveis de 0,5 ml.

CONSERVAÇÃO E VALIDADE

Conservar à temperatura ambiente, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. Manter fora do alcance das crianças. A data de validade refere-se ao produto intacto e corretamente conservado. Após a abertura da saqueta de alumínio, o produto deve ser conservado como indicado acima e recolocado dentro da saqueta. Não separar o conteúdo da embalagem externa e do folheto informativo, para que possa dispor de todas as informações necessárias para uma utilização correta do produto.

Data da última revisão: 01/2024



Não utilizar o produto se a ampola estiver danificada.



STERILE A

CE 0477

DISPOSITIVO MÉDICO Classe IIb

MD



MATERIAIS DE EMBALAGEM

Para a eliminação, verifique os regulamentos na sua área de residência.

Embalagem PAP 21 > Papel

Folheto PAP 22 > Papel

Saqueta C/LDPE 90 > Predominantemente plástico

Tampa HDPE 2 > Plástico

Ampola em dose única >LDPE+HDPE <7 > Plástico

Aboca S.p.A. Società Agricola - Località Aboca, 20
52037 Sansepolcro (AR) - Italia - www.aboca.com

Empresa com sistema de gestão de qualidade ISO 9001 e ISO 13485 e sistema de gestão ambiental ISO 14001 certificados.