

Propolgemma

Calme l'irritation et diminue la douleur
de la gorge et de la cavité buccale



Complexe moléculaire synergique
de résines, polysaccharides
et lignines 100 % végétal

100 %
FORMULE
NATURELLE

DISPOSITIF MÉDICAL Classe IIa

PROPOLGEMMA SPRAY SANS ALCOOL ADULTES ET ENFANTS

Propolgemma spray sans alcool est un Dispositif Médical innovant spécialement conçu pour lutter contre les irritations de l'oropharynx telles que les maux de gorge et autres affections de la cavité buccale (stomatites, aphtes et gingivites).

Propolgemma est un complexe moléculaire exclusif issu de la recherche Aboca, composé de résines, de polysaccharides et de lignines et obtenu à partir de Bourgeons de Peuplier noir, dont la résine permet aux abeilles d'obtenir la Propolis européenne.

Grâce à un processus d'extraction spécial, **Propolgemma** se caractérise par la présence des **principaux composants typiques de la Propolis**, associés à des **composés fonctionnels issus du tissu végétal du Bourgeon de Peuplier** (voir encadré pour plus d'informations).

La recherche Aboca a ainsi mis au point un complexe moléculaire doté de capacités spéciales de protection des muqueuses de l'oropharynx.


COMMENT AGIT-IL ?

La **fraction résineuse** et la **fraction riche en composés polysaccharidiques et en lignines** agissent en synergie pour former une **barrière protectrice** sur la muqueuse enflammée, ce qui, combiné aux **propriétés antioxydantes des flavonoïdes**, permet de **lutter indirectement contre l'inflammation**.

Cette couche protectrice-active calme la sensation de brûlure, réduit l'hypersensibilité, soulage la sensation d'inconfort et facilite la déglutition. Les fractions contenues dans **Propolgemma** créent également un environnement défavorable à la croissance des bactéries.

INDICATIONS

Propolgemma spray sans alcool est indiqué dans le traitement des **maux de gorge et des affections de la cavité buccale** (telles que les stomatites, les aphtes et les gingivites) associés à une sensation de brûlure, des douleurs et une sensibilité à la déglutition.

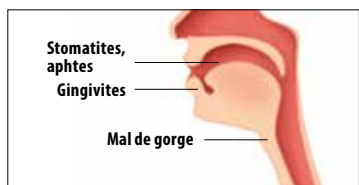

Il peut être également utilisé en cas de **petites lésions buccales** dues, par exemple, à des traitements dentaires ou à l'utilisation d'appareils orthodontiques et de dentiers.

Le produit peut également être utilisé comme protection préventive dans tous les cas d'exposition à des agents extérieurs offensifs ou irritants (froid, fumée, pollution).

Il est conseillé à partir de 3 ans.

MODE D'EMPLOI

Agiter le flacon avant l'utilisation. L'emballage contient l'embout diffuseur dans un sachet scellé. Lors de la première utilisation, éliminer le bouchon en aluminium du flacon et insérer l'embout diffuseur. En utilisant l'applicateur prévu à cet effet, il est conseillé d'effectuer **2 pulvérisations dans l'oropharynx jusqu'à 2 fois par jour chez les enfants ; 4 pulvérisations dans l'oropharynx jusqu'à 4 fois par jour chez les adultes**. En cas d'affections localisées, appliquer directement sur la zone concernée. L'éventuelle présence de petits dépôts est due à la concentration élevée des extraits et ne compromet pas la qualité du produit.

COMPOSITION

Substances fonctionnelles : Propoligemma complexe moléculaire de résines, polysaccharides et lignines (obtenu à partir des Bourgeons de Peuplier noir, *Populus nigra* L.) en extrait sec multifractionné 0,6 %, titré en **Flavonoïdes totaux ≥ 15 % et en Polysaccharides** (avec un poids moléculaire supérieur à 20 000 Da) ≥ 4 %.

Contient aussi : Eau, Glycérine végétale, Jus de Pomme, Gomme arabique, Jus de Citron, Arôme naturel de Cerise et de Fraise.

Le processus de production utilisé garantit l'absence de pollen provenant des Bourgeons de Peuplier.

MISES EN GARDE

Ne pas utiliser le produit en cas d'hypersensibilité ou d'allergie individuelle envers un ou plusieurs des composants. Contre-indiqué chez les personnes allergiques à la propolis et les personnes asthmatiques. Si les symptômes persistent, il est recommandé de consulter un médecin. Conserver à température ambiante, loin de toute source de chaleur et à l'abri de la lumière. Tenir hors de portée des enfants. La date de péremption se réfère au produit intact et conservé correctement.

PÉREMPTION

Voir la date de péremption indiquée sur l'emballage. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption indiquée. Il est recommandé d'utiliser le produit dans les 3 mois qui suivent l'ouverture.

FORMAT DISPONIBLE À LA VENTE

Flacon en verre de 30 ml avec pulvérisateur.

DATE DE LA DERNIÈRE RÉVISION : 09/2024

PROPOLGEMMA : COMPLEXE MOLÉCULAIRE SYNERGIQUE DE RÉSINES, POLYSACCHARIDES ET LIGNINES

Grâce à une recherche phytochimique approfondie et à des processus d'extraction spéciaux, il a été possible de mettre au point un extrait issu des Bourgeons de Peuplier noir qui se caractérise par la présence de deux fractions de composés (multifraction) : l'une, caractéristique de l'exsudat résineux du bourgeon et riche en composants typiques de la Propolis, l'autre riche en composés macromoléculaires exclusifs du tissu végétal du bourgeon, en particulier polysaccharides et lignines.

Le choix de développer une formulation à partir de Bourgeons de Peuplier noir est à la base de l'innovation de Propoligemma, car la Propolis d'origine européenne est principalement composée de l'exsudat résineux de ce type de bourgeons.

Ne pas jeter dans la nature après utilisation.



Aboca S.p.A. Società Agricola

Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia - www.aboca.com

Entreprise avec système de management de la qualité ISO 9001 et ISO 13485
et système de management environnemental ISO 14001 certifiés.



FILEAPROCEB-A