

Fitonasal Spray

CONGESTION NASALE

Décongestionne et fluidifie

Protège et favorise la régénération de la muqueuse

Sans conservateurs - Sans gaz propulseur

Également indiqué pour une utilisation prolongée


DISPOSITIF MÉDICAL

Règlement (UE) 2017/745

100%
FORMULE
NATURELLE

sans
gluten

750
mOsm/Kg

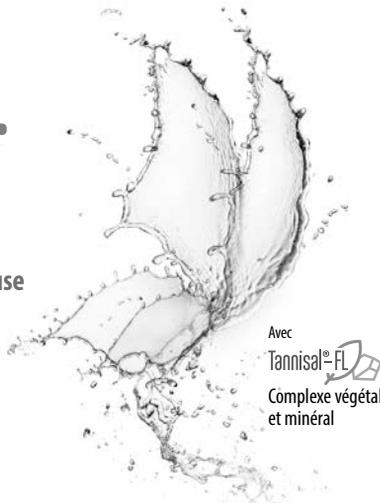

Avec
Tannisal®-FL
Complexe végétal
et minéral

SPRAY CONCENTRÉ

Fitonasal Spray concentré est un dispositif médical qui aide à libérer le nez bouché, facilite la fluidification et l'élimination du mucus des cavités nasales, et favorise la régénération normale de la muqueuse. Il exerce, en effet, une **action physiologique décongestionnante et protectrice** grâce aux mécanismes d'action suivants :



- **Osmotique équilibré**
Il favorise l'élimination de l'eau des tissus congestionnés sans irriter ni dessécher la muqueuse grâce à l'osmolalité équilibrée et standardisée (750 mOsm/kg).
- **Astringent local**
Il interagit de manière non spécifique avec certaines protéines inflammatoires présentes dans les sécrétions nasales et permet leur élimination.
- **Barrière**
Il forme un film sur la muqueuse et la protège du contact avec les agents irritants, favorisant le maintien de l'intégrité de la barrière épithéliale.
- **Réparateur**
La protection au niveau local favorise le processus de régénération normal de la muqueuse, en réduisant les micro-lésions présentes dans les cavités nasales résultant de rhumes, rhinites et sinusites.
- **Antioxydant**
Il réduit les radicaux libres générés par l'inflammation de la muqueuse.
- **Fluidifiant**
Il stimule l'hydratation du mucus et en favorise l'élimination.

La formulation procure un agréable **effet rafraichissant**.

La conservation du produit est garantie par le processus de production avec système de filtration stérilisant et le conditionnement en milieu microbiologiquement contrôlé, sans l'utilisation de conservateurs.

INDICATIONS

Fitonasal Spray concentré est un spray nasal indiqué dans tous les cas de congestion et d'irritation des cavités nasales, aiguës comme chroniques, dues au rhume, aux syndromes grippaux, allergies (saisonniers et pérennes), rhinosinusites (virales et bactériennes), rhinites d'origine mécano-obstructive (ex. déviations du septum nasal).

Le produit peut être utilisé à partir de 6 ans.

MODE D'EMPLOI

Posologie adultes et adolescents âgés de plus de 12 ans : appliquer 2 pulvérisations par narine, se moucher le nez et répéter l'application.

Posologie enfants âgés de 6 à 12 ans : appliquer 1 pulvérisation par narine, se moucher le nez et répéter l'application.



Il est conseillé d'appliquer **Fitonasal Spray concentré** plusieurs fois durant la journée, même à quelques heures d'intervalle, et de répéter la pulvérisation avant de se coucher. Après chaque utilisation, nettoyer l'embout diffuseur à l'aide d'un linge propre et humide et sécher soigneusement. **Fitonasal Spray concentré** peut être utilisé fréquemment et pendant des périodes prolongées car il ne contient pas de décongestionnants vasoconstricteurs, ne crée pas de dépendance, n'irrite pas et ne dessèche pas la muqueuse. Si **Fitonasal Spray concentré** est utilisé avec des médicaments s'administrant par voie nasale, il est conseillé d'attendre au moins 1 heure entre l'application de chaque produit.

COMPOSITION

Fitonasal Spray concentré est un produit **100 % naturel** avec Tannisal®-FL, complexe végétal et minéral.

Il ne contient pas de substances de synthèse, semi-synthèse ou génétiquement modifiées, et les processus de fabrication à travers lesquels il est obtenu n'utilisent ni solvants ni substances de synthèse chimique.

1 ml de produit contient : complexe naturel **Tannisal®-FL** 3,2 mg, à base de **Tanins** et **Flavonoïdes** (fraction extractive LPME d'Hamamélis et de Thym – 3 mg) et **Minéraux** (Sel gemme d'extraction minière non traité chimiquement – 0,2 mg) ; Eau ; Glycérine végétale ; Arômes naturels d'Eucalyptus et de Menthe.

Une pulvérisation correspond à environ 0,14 ml.

Les fractions extractives contenues dans le produit sont obtenues par un processus technologique exclusif, appelé LPME (Liquid-Phase Microextraction), développé par la recherche Aboca.

Fitonasal Spray concentré est contrôlé selon les paramètres suivants grâce auxquels Aboca garantit la qualité des produits naturels dans leur complexité.

1. Empreinte digitale métabolomique à travers la technologie NIRS (Near-infrared spectroscopy)

pour confirmer la validation du processus de production du produit naturel

2. Osmolalité 750 mOsm/Kg

pour confirmer son efficacité décongestionnante et sa tolérance

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser le produit en cas d'hypersensibilité ou d'allergie individuelle envers un ou plusieurs des composants. Utiliser exclusivement par voie nasale. Éviter le contact avec les yeux ; au besoin les laver à l'eau. Si les symptômes persistent, consulter un médecin ou un pharmacien.

EFFETS INDÉSIRABLES

Fitonasal Spray concentré est en général bien toléré. Toutefois, en cas d'apparition d'un effet indésirable imputable au produit ou à son utilisation, il faut en informer le médecin et/ou le pharmacien ainsi que le Fabricant Aboca en utilisant les coordonnées indiquées sur cette notice. En cas d'incident grave, veuillez également informer l'autorité compétente de votre pays.

SURDOSAGE

Dans la population générale, selon les données disponibles, aucun phénomène dû à un surdosage n'est connu ou attendu.

INTERACTIONS AVEC D'AUTRES DISPOSITIFS MÉDICAUX, MÉDICAMENTS OU ALIMENTS

D'après les données disponibles, aucune interaction de **Fitonasal Spray concentré** avec d'autres dispositifs médicaux, médicaments ou aliments n'est attendue.

CONSERVATION ET DATE DE PÉREMPTION

Conserver à température ambiante dans un lieu frais, sec, loin de toute source de chaleur et à l'abri de la lumière. Tenir hors de portée des enfants. La date de péremption se réfère au produit intact et conservé correctement. La date de péremption indiquée sur l'emballage reste inchangée même après la première pulvérisation. Il est recommandé de conserver la boîte.

FORMAT DISPONIBLE À LA VENTE

Fitonasal Spray concentré : flacon en verre de 30 ml avec pulvérisateur

DATE DE LA DERNIÈRE RÉVISION : 03/2024

Aboca

POUR LA SANTÉ D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN

Depuis plus de 40 ans, chez Aboca nous cherchons les réponses pour la santé des personnes au cœur de la Nature, dans le respect de l'organisme et de l'environnement.

LA RECHERCHE ABOCA

Nous reconnaissons le potentiel thérapeutique des substances naturelles complexes et nous les projetons depuis le monde de la tradition vers celui de l'innovation, selon les critères de l'Evidence-Based Medicine et de la Systems Medicine.


100 % NATUREL : DE LA CULTURE AU PRODUIT FINI

Nous réalisons nos produits grâce à un système verticalisé qui va de la culture biologique jusqu'à la production, en passant par la recherche scientifique, excluant l'utilisation de substances chimiques de synthèse tout au long du processus.

LA SANTÉ DURABLE

La santé n'est pas seulement un bien individuel, mais également un Bien Commun. C'est pourquoi une vraie santé ne peut exister sans développement durable. Nous sommes une Benefit Corporation ; avec notre travail, nous nous engageons formellement à créer des bénéfices pour la communauté et l'environnement.

Pour découvrir tous nos produits, visitez notre site www.aboca.com

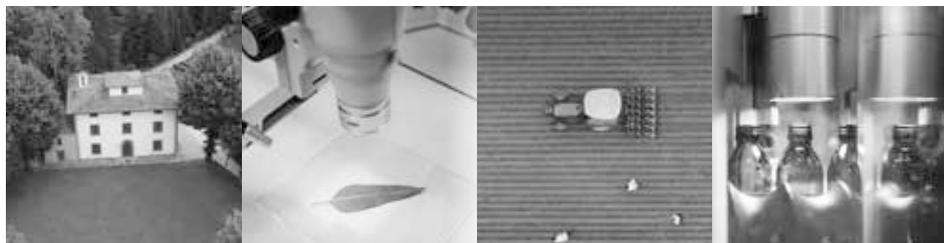

DISPOSITIF MÉDICAL Classe IIa 

 **Aboca S.p.A. Società Agricola** - Località Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia
www.aboca.com

Entreprise avec système de management de la qualité ISO 9001 et ISO 13485 et système de management environnemental ISO 14001 certifiés.