

Fitonasal Spray

CONGESTIÓN NASAL

Descongestiona y fluidifica

Protege y favorece la regeneración de la mucosa

Sin conservantes - Sin gases propelentes

Apto también para un uso prolongado


PRODUCTO SANITARIO

Reglamento (UE) 2017/745

100%
FÓRMULA NATURAL
Y BIODEGRADABLE

sin
gluten

750
mOsm/Kg

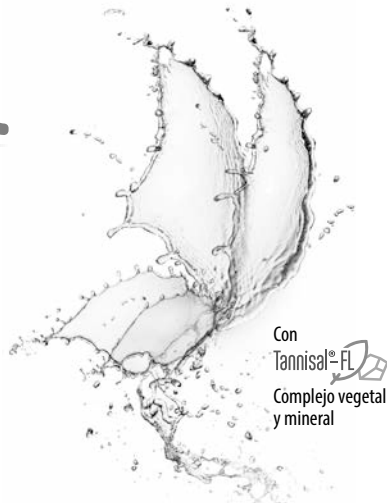

SPRAY CONCENTRADO

Fitonasal Spray concentrado es un producto sanitario que ayuda a despejar la nariz tapada, facilita la fluidificación y la expulsión del moco de las fosas nasales y favorece la regeneración normal de la mucosa. De hecho, ejerce una **acción fisiológica descongestionante y protectora** como resultado de los siguientes mecanismos de acción:

Osmótico equilibrado



- **Osmótico equilibrado**

Favorece la eliminación del agua de los tejidos congestionados sin causar irritación ni sequedad gracias a su osmolalidad equilibrada y estandarizada (750 mOsm/kg).

- **Astringente local**

Interacciona de manera inespecífica con algunas proteínas inflamatorias presentes en los fluidos nasales y permite su eliminación.

- **Barrera**

Forma una película sobre la mucosa y la protege del contacto con los agentes irritantes, favoreciendo el mantenimiento de la integridad de la barrera epitelial.

- **Reparador**

La protección a nivel local favorece el proceso de regeneración normal de la mucosa, reduciendo las microlesiones presentes en las fosas nasales consiguientes a resfriados, rinitis y sinusitis.

- **Antioxidante**

Reduce los radicales libres generados por la inflamación de la mucosa.

- **Fluidificante**

Promueve la hidratación del moco y favorece su eliminación.

Su formulación produce un agradable **efecto refrescante**.

La conservación del producto está garantizada por un proceso de producción con sistema de filtración esterilizante y envasado en ambiente microbiológicamente controlado, sin el uso de conservantes.

La línea se completa con Fitonasal Biopomada para una protección adicional de la zona nasal y perinasal.

INDICACIONES

Fitonasal Spray concentrado es un spray nasal indicado en todos los casos de congestión e irritación de las fosas nasales, tanto agudas como crónicas, debidas a resfriado, síndromes gripales, alergias (estacionales y perennes), rinosinusitis (virales y bacterianas) y rinitis debidas a causas mecánico-obstructivas (p. ej. desviación del tabique nasal).

El producto puede utilizarse a partir de 6 años de edad.

MODO DE EMPLEO

Posología adultos y jóvenes mayores de 12 años: efectuar 2 nebulizaciones por orificio nasal, sonarse la nariz y repetir la aplicación.

Posología niños de 6 a 12 años: efectuar 1 nebulización por orificio nasal, sonarse la nariz y repetir la aplicación.



Se aconseja aplicar **Fitonasal Spray concentrado** varias veces al día, incluso al cabo de poco tiempo, y repetir la aplicación antes de acostarse. Después de cada uso, limpiar el aplicador con un paño húmedo y limpio y secar cuidadosamente.

Fitonasal Spray concentrado puede utilizarse frecuentemente y durante períodos prolongados porque no contiene descongestivos vasoconstrictores, no produce habituación, no irrita y no seca la mucosa.

En caso de utilizar **Fitonasal Spray concentrado** junto a medicamentos de aplicación nasal, se aconseja dejar pasar al menos 1 hora entre la aplicación de los dos productos.

COMPOSICIÓN

Fitonasal Spray concentrado es un producto **100 % natural y biodegradable**. Contiene Tannisal®-FL, complejo vegetal y mineral.

No contiene sustancias de síntesis, semisíntesis o genéticamente modificadas y en sus procesos de elaboración tampoco se utilizan disolventes ni sustancias de síntesis química.

1 ml de producto contiene: complejo natural **Tannisal®-FL** 3,2 mg, a base de **taninos y flavonoides** (fracciones extractivas LPME de Hamamelis y Tomillo – 3 mg) y **minerales** (Sal gema de extracción minera no tratada químicamente – 0,2 mg); Agua; Glicerina vegetal; Aromas naturales de Eucalipto y Menta.

Una aplicación corresponde a 0,14 ml aproximadamente.

Las fracciones extractivas presentes en el producto se obtienen a través de un exclusivo proceso tecnológico, denominado LPME (Liquid-Phase Microextraction), desarrollado por la investigación de Aboca.

Fitonasal Spray concentrado es controlado según los siguientes parámetros, gracias a los cuales Aboca garantiza la calidad de los productos naturales en su complejidad.

1. Huella digital metabólica mediante tecnología NIRS (near-infrared spectroscopy)

que confirma la validación del proceso productivo del producto natural

2. Osmolalidad 750 mOsm/kg

que confirma su eficacia descongestionante y su tolerabilidad

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

No utilizar en caso de hipersensibilidad o alergia individual a uno o más componentes. Utilizar exclusivamente por vía nasal. Evitar el contacto con los ojos; en caso de producirse, lavarlos con agua. Si los síntomas persisten, consulte a su médico o farmacéutico.

EFFECTOS NO DESEADOS

En general, **Fitonasal Spray concentrado** es bien tolerado. No obstante, si se nota la aparición de un efecto no deseado atribuible al producto o a su uso, informar al médico y/o farmacéutico y al fabricante Aboca utilizando los datos de contacto que se indican en este prospecto. En caso de incidente grave informar también a la autoridad competente del propio país.

SOBREDOSIS

En la población general, sobre la base de los datos disponibles no se conocen ni prevén fenómenos debidos a sobredosis.

INTERACCIONES CON OTROS PRODUCTOS SANITARIOS, MEDICAMENTOS O ALIMENTOS

Partiendo de los datos disponibles, no se prevén interacciones de **Fitonasal Spray concentrado** con otros productos sanitarios, medicamentos o alimentos.

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD

Conservar a temperatura ambiente en un lugar fresco, seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la luz. Mantener el producto fuera del alcance de los niños. La fecha de caducidad se refiere al producto intacto y correctamente conservado. La fecha de caducidad indicada en la caja no cambia después de la primera aplicación. Se recomienda conservar la caja.

ENVASE EN VENTA

Fitonasal Spray concentrado: Frasco de vidrio de 30 ml con nebulizador

FECHA DE LA ÚLTIMA REVISIÓN: 03/2024

Aboca

PARA LA SALUD DE HOY Y DEL MAÑANA

Desde hace más de 40 años, en Aboca buscamos en la naturaleza las respuestas para la salud de las personas, respetando su organismo y el medioambiente.

LA INVESTIGACIÓN DE ABOCA

Reconocemos el potencial terapéutico de las sustancias naturales complejas y las proyectamos del mundo de la tradición al de la innovación, según los criterios de la Evidence-Based Medicine y de la Systems Medicine.


100 % NATURAL: DEL CULTIVO AL PRODUCTO ACABADO

Realizamos nuestros productos gracias a un sistema verticalizado que va desde el cultivo biológico y la investigación científica hasta la producción, excluyendo el uso de sustancias de síntesis química y no biodegradables en todo el proceso.

LA SALUD SOSTENIBLE

La salud no es solo un bien individual, sino también un bien común. Por eso no puede existir salud sin sostenibilidad. Somos una Benefit Corporation y con nuestro trabajo nos comprometemos formalmente a generar beneficios en la comunidad y el medioambiente.

Para conocer todos nuestros productos, visita el sitio web www.aboca.com

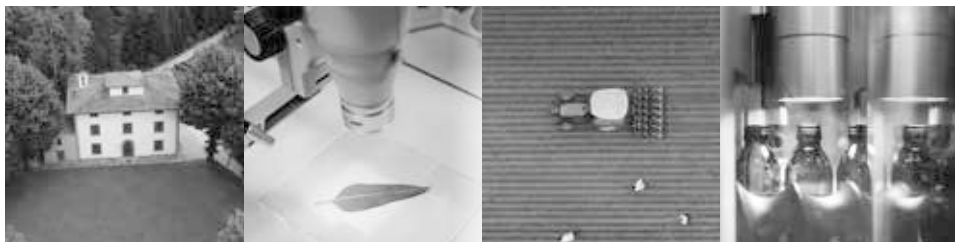

PRODUCTO SANITARIO Clase IIa  0477

 **Aboca S.p.A. Società Agricola** - Località Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia
www.aboca.com

Empresa con sistema de gestión de calidad ISO 9001 e ISO 13485 y sistema de gestión medioambiental ISO 14001 certificados.