

# Fitostill PLUS

TROCKENE, GEREIZTE UND MÜDE AUGEN

Befeuchtende, lindernde und erfrischende Behandlung

Ideal bei Sehstress

OHNE KONSERVIERUNGSSUBSTANZEN

AUCH BEI EINGESetzten KONTAKTLINSEN

MEDIZINPRODUKT

Verordnung (EU) 2017/745



Mit dem pflanzlichen Komplex LIGUFLOS<sup>®</sup>  
und Hyaluronsäure

## AUGENTROPFEN IN 10 EINZELDOSIS-AMPULLEN

Fitostill Plus Augentropfen ist ein Medizinprodukt bestehend aus dem **pflanzlichen Komplex Liguflos** und **Hyaluronsäure**. Es wirkt durch die **Wiederherstellung der natürlichen Schmierfunktion des „Tränenfilms“**.

Das Produkt eignet sich, um **Augenreizungen zu lindern und vorzubeugen, Brennen** aufgrund von externen Reizstoffen oder **längeren Anstrengungen der Augen zu mildern** sowie **bei Augenrötung**.

Besonders geeignet für Personen, die unter unangenehmen Auswirkungen des **Sicca-Syndroms** (verminderte Qualität und Quantität der Tränenproduktion) leiden.

**Fitostill Plus Augentropfen befeuchtet, erfrischt, lindert und schützt die Augen auf physiologische Weise.**

Das Ergebnis wird durch folgende Wirkmechanismen erzielt:

- **Barrierewirkung**  
Zur Bildung eines Schutzfilms auf der Augenoberfläche, der die Entzündung bekämpft.
- **Schmierwirkung**  
Zur Verringerung der Reibung zwischen Augenlid und Augenoberfläche.
- **Befeuchtende Wirkung**  
Zur Bildung einer Netzstruktur, die Wasser auf der Augenoberfläche bindet, wodurch ein angemessenes Feuchtigkeitsniveau erzielt und erhalten wird.
- **Antioxidative Wirkung**  
Zur Verringerung der freien Radikale, die durch die Schleimhautentzündung erzeugt werden.



### ANWENDUNGSBEREICHE

Fitostill Plus eignet sich zur **Behandlung und Vorbeugung von geröteten und überanstrengten Augen**.

Besonders geeignet bei **trockenen Augen** mit folgenden Anzeichen: leichte Rötung der Augen, Gefühl von Sand in den Augen, Brennen, Photophobie, Gefühl von tränenden Augen, Juckreiz, schmerzendes Augenlid beim Aufwachen.

**Das Produkt eignet sich außerdem im Fall von Rötungen, Brennen, Juckreiz und Fremdkörpergefühl** aufgrund von:

- externen direkten Reizstoffen (atmosphärischer Staub, Pollen, geringe Luftfeuchtigkeit, Wind, Salz, Kälte, starke Sonneneinstrahlung, Verwendung von Kontaktlinsen) als auch von indirekten Reizstoffen (digitaler Stress, Fernsehen, langes Lesen und Autofahren);
- allergischen Erscheinungen, Bindehautentzündungen, chronischer Blepharitis, Augenoperationen, sonstigen entzündlichen Prozessen.

**Auch zur häufigen**, mehrmals täglichen **Anwendung** und für **Kontaktlinsenträger**, ebenfalls bei bereits eingesetzten Kontaktlinsen.

Das Produkt kann auch bei Kindern ab 3 Jahren verwendet werden.


### ANWENDUNGSHINWEISE

Es wird empfohlen, ein- bis dreimal täglich 2-3 Tropfen in jedes Auge zu träufeln. Die Einzeldosis-Ampulle ist wiederverschließbar. Sie kann also nach dem Öffnen wieder verschlossen und innerhalb von 12 Stunden weiterverwendet werden.

Das Verschlussystem der Einzeldosis-Ampulle wurde speziell patentiert, um ein unerwünschtes Öffnen zu verhindern.

Für die ordnungsgemäße Anwendung des Produkts sind folgende Anweisungen zu beachten:

- die Einzeldosis-Ampulle durch Drehen des Deckels gegen den Uhrzeigersinn öffnen;
- das Produkt durch leichtes Drücken der Einzeldosis-Ampulle anwenden;
- um die Einzeldosis-Ampulle wieder zu verschließen, den Deckel umdrehen und ihn durch sorgfältiges Drücken in die Einzeldosis-Ampulle einsetzen.

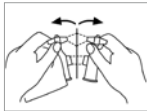

Abtrennen



Öffnen



Anwenden



Verschließen

Fitostill Plus Augentropfen kann **auch von Kontaktlinsträgern verwendet werden, auch bei bereits eingesetzten Kontaktlinsen**. Fitostill Plus Augentropfen ist **auch zur häufigen**, mehrmals täglichen Anwendung geeignet. Das Produkt in Einzeldosis-Ampullen darf nur von einer Person benutzt werden. **Fitostill Plus Augentropfen** ist in praktischen sterilen Einzeldosis-Ampullen verpackt und enthält keine Konservierungs- und Farbstoffe. Eine leichte Färbung ist auf pflanzliche Komponenten von Liguflos zurückzuführen.

#### ZUSAMMENSETZUNG

1 Einzeldosis-Ampulle (0,5 ml) enthält: **Liguflos** (pflanzlicher Komplex) **0,10 mg**, bestehend aus **Flavonoiden** (LPME-Extrakt aus Kamillenzungenblüten); **Hyaluronsäure-Natriumsalz 1 mg**; destilliertes Kamillenblütenwasser 25 mg; pflanzliches Glycerin; di-Natriumphosphat-Dodecahydrat; Natriumchlorid; Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat; Wasser.

**Die im Produkt enthaltenen Extrakte werden mithilfe des exklusiven technologischen Extraktionsverfahrens LPME (Liquid-Phase Microextraction) gewonnen, welches von der Aboca-Forschung entwickelt wurde.**

#### HINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Das Produkt eignet sich nur für die Anwendung im Auge. Während der Anwendung weder das Auge noch irgendeine andere Oberfläche mit der Ampullen-Spitze berühren. Bei bekannter Überempfindlichkeit oder Allergie gegen einen oder mehrere Inhaltsstoffe nicht anwenden. Bei Beschwerden während der Anwendung die Behandlung abbrechen und einen Arzt zu Rate ziehen.

#### NEBENWIRKUNGEN

Fitostill Plus Augentropfen ist in der Regel gut verträglich. Sollten dennoch Nebenwirkungen auftreten, die sich auf das Produkt oder dessen Anwendung zurückführen lassen, informieren Sie Ihren Arzt und/oder Apotheker sowie den Hersteller Aboca, dessen Kontaktdaten Sie auf dieser Packungsbeilage finden. Bei schwerwiegenden Vorkommnissen informieren Sie bitte auch die zuständigen Behörden in Ihrem Land.

#### ÜBERDOSIERUNG

Aufgrund derzeit verfügbarer Daten sind in der Allgemeinbevölkerung keine Überdosierungserscheinungen bekannt oder zu erwarten.

#### WECHSELWIRKUNGEN MIT ANDEREN MEDIZINPRODUKTEN, ARZNEIMITTELN ODER LEBENSMITTELN

Aufgrund derzeit verfügbarer Daten sind keine Wechselwirkungen von Fitostill Plus Augentropfen mit anderen Medizinprodukten, Arzneimitteln oder Lebensmitteln zu erwarten.

#### VERPACKUNG

10 wiederverschließbare Einzeldosis-Ampullen à 0,5 ml.

#### AUFBEWAHRUNG UND HALTBARKEIT

Bei Zimmertemperatur lagern und vor Hitze und Licht schützen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Verfallsdatum bezieht sich auf das unversehrte und ordnungsgemäß aufbewahrte Produkt. Nach dem Öffnen des Aluminiumbeutels das Produkt wie oben angegeben im Beutel aufbewahren. Den Inhalt nicht von der Umverpackung und der Packungsbeilage trennen, um alle Informationen stets parat zu haben, die für die ordnungsgemäße Anwendung des Produkts erforderlich sind.

**Letzte Überarbeitung:** 01/2024

**VERPACKUNGSMATERIALIEN**  
Für die Abfallentsorgung überprüfen  
Sie bitte die Vorschriften Ihres Wohnorts.

Faltschachtel PAP 21 > Papier  
Packungsbeilage PAP 22 > Papier  
Beutel C/LDPE 90 > vorwiegend Plastik  
Deckel HDPE 2 > Plastik  
Einzeldosis-Ampulle > LDPE+HDPE <7> Plastik



Das Produkt nicht verwenden, wenn die Ampulle beschädigt ist.



STERILE A

CE 0477

MEDIZINPRODUKT Klasse IIb

MD

**Aboca S.p.A. Società Agricola** - Località Aboca, 20

52037 Sansepolcro (AR) - Italia - [www.aboca.com](http://www.aboca.com)

Unternehmen mit nach ISO 9001 und ISO 13485 zertifiziertem

Qualitätsmanagementsystem und nach ISO 14001 zertifiziertem Umweltmanagementsystem.