

# Nebulizzatore Fitonasal

IT

## CONGESTIONE NASALE

### Lava, decongestiona e protegge la mucosa nasale

SOLUZIONE IPERTONICA BILANCIATA E STANDARDIZZATA

Senza conservanti

DISPOSITIVO MEDICO

Regolamento (UE) 2017/745

**100%**  
FORMULA NATURALE  
BIODEGRADABILE

ADULTI  
E BAMBINI  
6+ ANNI

senza  
glutine

600  
mOsm/kg



Con  
Tannisal®-FL  
Complesso vegetale  
e minerale

## SPRAY NEBULIZZATORE

**Fitonasal Nebulizzatore** è un dispositivo medico che libera il naso da polvere, pollini ed altri allergeni, fluidifica il muco, decongestiona e protegge la mucosa nasale. Svolge, infatti, una **fisiologica azione lavante, decongestionante e protettiva** come risultato dei seguenti meccanismi d'azione:



- **Osmotico bilanciato**  
Favorisce il richiamo di acqua dai tessuti congestionati senza causare irritazione e secchezza grazie all'osmolalità bilanciata e standardizzata (600 mOsm/Kg).
- **Astringente locale**  
Interagisce in modo aspecifico con alcune proteine infiammatorie presenti nei fluidi nasali e ne permette la rimozione.
- **Barriera**  
Forma un film sulla mucosa e la protegge dal contatto con gli agenti irritanti, favorendo il mantenimento dell'integrità della barriera epiteliale.
- **Antiossidante**  
Riduce i radicali liberi generati dall'infiammazione della mucosa.
- **Pulizia profonda**  
Facilita la rimozione del muco in eccesso e degli agenti patogeni, irritanti ed allergizzanti in esso intrappolati (virus, batteri, fumo, smog, pollini, etc.) grazie al getto nebulizzato a flusso continuo.

La formulazione dona un piacevole **effetto rinfrescante**.

**Fitonasal Nebulizzatore** si presenta in un contenitore ad erogazione spray dotato di tecnologia "**bag on valve**" (BOV) che contribuisce all'efficacia del prodotto e offre molteplici vantaggi:

- **Praticità** - la tecnologia BOV consente un'erogazione a flusso continuo e in tutte le posizioni;
- **Ergonomicità** - il beccuccio erogante è stato pensato per rispettare anche le narici più delicate;
- **Qualità** - il prodotto è contenuto in un sacchetto isolato dall'esterno, così da consentirne l'uscita ma non il rientro di aria, liquidi o altri residui;
- **Tutela dell'ambiente** - contiene gas propellente (Azoto) che rispetta lo strato di Ozono.

La linea si completa con Fitonasal Spray concentrato, particolarmente utile negli episodi acuti e con Fitonasal Biopomata per un'ulteriore protezione della zona nasale e perinasale.

### INDICAZIONI

**Fitonasal Nebulizzatore** è uno spray nasale indicato per la prevenzione ed il trattamento, sia acuto che cronico, delle irritazioni, della congestione nasale e del prurito dovuti ad allergie, inquinamento e/o aria condizionata, raffreddore, sindromi influenzali, rinosinusiti, riniti da cause meccanico-ostruttive (es. deviazioni del setto nasale).


**Fitonasal Nebulizzatore**, inoltre, può essere usato come trattamento coadiuvante in caso di tosse e mal di gola causati da scolo retronasale. Il prodotto può essere utilizzato a partire da 6 anni di età.

### MODO D'USO

Effettuare un'erogazione per narice almeno **2 volte al giorno**, mattina e sera e ogniqualvolta lo si ritiene necessario.

Si consiglia di applicare il prodotto anche alla sera prima di coricarsi per un'igiene profonda delle cavità nasali che favorisce la respirazione durante il riposo notturno.

Inclinare la testa di lato, inserire l'erogatore nella narice rivolta verso l'alto ed esercitare una leggera pressione per alcuni secondi. Ripetere l'operazione con l'altra narice. Lasciare che il prodotto si diffonda nelle cavità nasali. Soffiare il naso.

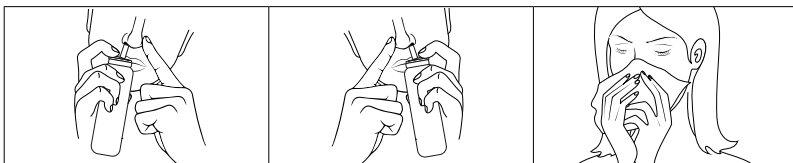

Dopo ciascun utilizzo pulire l'erogatore con un panno umido e pulito e asciugare con cura.

**Fitonasal Nebulizzatore** può essere utilizzato frequentemente e per periodi prolungati perché non contiene decongestionanti vasocostrittori, non dà assuefazione, non irrita e non secca la mucosa.

Nel caso in cui **Fitonasal Nebulizzatore** venga usato insieme a farmaci ad applicazione nasale si consiglia di distanziare di almeno 1 ora l'applicazione dei due prodotti.

## COMPOSIZIONE

**Fitonasal Nebulizzatore** è un prodotto **100% naturale e biodegradabile** con Tannisal®-FL, complesso vegetale e minerale.

Non contiene sostanze di sintesi, semisintesi o geneticamente modificate ed anche i processi di lavorazione con cui è ottenuto non utilizzano né solventi né altre sostanze di sintesi chimica.

1 ml di prodotto contiene: complesso naturale **Tannisal®-FL** 0,9 mg, a base di **Tannini** e **Flavonoidi** (frazioni estrattive LPME di Amamelide e Timo - 0,7 mg) e **Minerali** (Salgemma di estrazione mineraria non trattato chimicamente - 0,2 mg); Acqua; Glicerina vegetale; Aromi naturali di Eucalipto e Menta.

**Le frazioni estrattive contenute nel prodotto sono ottenute attraverso un esclusivo processo tecnologico, chiamato LPME (Liquid-Phase Microextraction), messo a punto dalla ricerca Aboca.**

**Fitonasal Nebulizzatore** è controllato secondo i seguenti parametri grazie ai quali Aboca garantisce la qualità dei prodotti naturali nella loro complessità.

**1. Impronta digitale metabolica tramite tecnologia NIR (near infrared spectroscopy)**

*a conferma della validazione del processo produttivo del prodotto naturale*

**2. Osmolalità 600 mOsm/Kg**

*a conferma dell'efficacia decongestionante e della tollerabilità*

## AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO

Non utilizzare se presente ipersensibilità o allergia individuale verso uno o più componenti. Utilizzare esclusivamente per via nasale. Evitare il contatto con gli occhi, nel caso lavarli con acqua. Se i sintomi persistono consultare, comunque, il medico o il farmacista.

## EFFETTI INDESIDERATI

**Fitonasal Nebulizzatore** è in genere ben tollerato. Tuttavia, se si nota la comparsa di un effetto indesiderato riconducibile al prodotto o al suo utilizzo, informare il medico e/o il farmacista e il Fabbriante Aboca ai contatti riportati su questo foglietto illustrativo. In caso di incidente grave informare anche l'autorità competente del proprio Paese.

## SOVRADOSAGGIO

Nella popolazione generale, in funzione dei dati disponibili, non sono noti né attesi fenomeni dovuti al sovradosaggio.

## INTERAZIONI CON ALTRI DISPOSITIVI MEDICI, MEDICINALI O ALIMENTI

Dai dati disponibili non sono attese interazioni di **Fitonasal Nebulizzatore** con altri dispositivi medici, medicinali o alimenti.

## CONSERVAZIONE E SCADENZA

Conservare a temperatura ambiente in luogo fresco, asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. La data di scadenza indicata sulla confezione resta invariata anche dopo la prima erogazione. Si raccomanda di conservare l'astuccio.

**Attenzione** - Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Proteggere dai raggi solari. **Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.** Tenere fuori dalla portata dei bambini.

## CONFEZIONE VENDITA

**Fitonasal Nebulizzatore:** Spray nebulizzatore da 125 ml

**DATA ULTIMA REVISIONE:** Ottobre 2024

# Aboca

## PER LA SALUTE DI OGGI E DI DOMANI

Da oltre 40 anni noi di Aboca ricerchiamo nella Natura le risposte per la salute delle persone, nel rispetto dell'organismo e dell'ambiente.

## LA RICERCA ABOCA

Riconosciamo il potenziale terapeutico delle sostanze naturali complesse e le proiettiamo dal mondo della tradizione a quello dell'innovazione, secondo i criteri della Evidence Based Medicine e della Systems Medicine.

## 100% NATURALE: DALLA COLTIVAZIONE AL PRODOTTO FINITO


Realizziamo i nostri prodotti grazie ad un sistema verticalizzato che va dalla coltivazione biologica, alla ricerca scientifica fino alla produzione, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi chimica e non biodegradabili lungo tutto il processo.


## LA SALUTE SOSTENIBILE

La salute non è solo un bene individuale, ma anche un Bene Comune. Per questo non può esistere una vera salute senza sostenibilità. Siamo una società Benefit e con il nostro lavoro ci impegniamo formalmente a portare un beneficio per la comunità e l'ambiente.

Per conoscere tutti i nostri prodotti, visita il sito [www.aboca.com](http://www.aboca.com)



DISPOSITIVO MEDICO Classe IIa  0477

 **Aboca S.p.A. Società Agricola** - Località Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia  
[www.aboca.com](http://www.aboca.com)

Azienda con sistema di gestione qualità ISO 9001 e ISO 13485 e sistema di gestione ambientale ISO 14001 certificati.

LEA\_FIADU-A