

Propolgemma

Acalma a irritação e reduz a dor de garganta e na cavidade oral



Complexo molecular sinérgico de resinas, polissacarídeos e ligninas
100% vegetal



100%
FÓRMULA NATURAL BIODEGRADÁVEL

DISPOSITIVO MÉDICO Classe IIa

PROPOLGEMMA SPRAY SEM ÁLCOOL ADULTOS E CRIANÇAS

Propolgemma spray sem álcool é um Dispositivo Médico inovador estudado especificamente para combater os estados irritativos da cavidade orofaríngea como a dor de garganta e outras doenças na cavidade oral (estomatites, aftas e gengivites).

Propolgemma é um complexo molecular exclusivo fruto da investigação Aboca, composto por resinas, polissacarídeos e ligninas obtido de rebentos de álamo preto. As abelhas recuperam a própolis europeia a partir das suas resinas. Graças a um processo de extração particular, **Propolgemma** caracteriza-se pela presença dos **componentes principais típicos da própolis** juntamente com **compostos funcionais do tecido vegetal dos rebentos de álamo** (consulte mais informações na tabela).

Desta forma, a investigação Aboca desenvolveu um complexo molecular com capacidades de proteção particulares das mucosas da cavidade orofaríngea.

COMO ATUA


A **fração resinosa** e a **fração rica em compostos polissacarídeos e ligninas** atuam em sinergia formando uma **barreira de proteção** na mucosa inflamada que, em conjunto com as **propriedades antioxidantes dos flavonoides, combate indiretamente a inflamação**.

Esta camada protetora e ativa acalma o ardor e reduz a hipersensibilidade, aliviando a sensação de desconforto e facilitando a deglutição.

Além disso, as frações contidas em **Propolgemma** criam um ambiente desfavorável para o crescimento das bactérias.

INDICAÇÕES

Propolgemma spray sem álcool é indicado no tratamento da **dor de garganta e doenças na cavidade oral** (como estomatites, aftas e gengivites) associadas a ardor, dor e sensibilidade ao engolir.

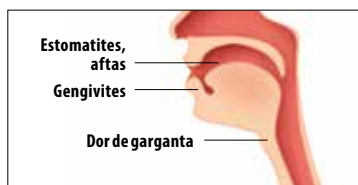

Também pode ser usado em caso de **pequenas lesões da boca** devidas, por exemplo, a tratamentos dentários ou ao uso de aparelhos ortodônticos e próteses dentárias.

O produto também pode ser utilizado como proteção preventiva, em todos os casos em que há exposição a agentes externos agressivos ou irritantes (frio, fumo, smog).

Recomenda-se a utilização a partir dos 3 anos de idade.

MODO DE USO

Agitar o frasco antes de usar. A embalagem contém o nebulizador numa saqueta selada. Quando utilizar pela primeira vez, retirar a tampa de alumínio do frasco e inserir o nebulizador. Com o nebulizador específico recomenda-se administrar na cavidade orofaríngea **2 nebulizações até 2 vezes por dia nas crianças; 4 nebulizações até 4 vezes por dia nos adultos**. No caso de doenças localizadas, aplicar diretamente na área afetada. A possível presença de pequenos depósitos deve-se à elevada concentração dos extratos e não prejudica a qualidade do produto.

COMPOSIÇÃO

Substâncias funcionais: Propolgemma complexo molecular de resinas, polissacarídeos e ligninas (obtido de rebentos de álamo preto, *Populus nigra* L.) em extrato seco multifração 0,6%, titulado em **Flavonoides totais $\geq 15\%$ e Polissacarídeos** (com peso molecular superior a 20.000 Da) $\geq 4\%$.

Contém também: Água, Glicerina vegetal, sumo de Maçã, Goma arábica, sumo de Limão, aroma natural de Cereja e Morango.

O processo de produção utilizado garante a ausência de pólen derivado dos rebentos de álamo.

ADVERTÊNCIAS

Não utilizar se existir hipersensibilidade ou alergia individual em relação a um ou mais componentes. Contraindicado nos indivíduos alérgicos a própolis e asmáticos. Se os sintomas persistirem, consulte o médico. Conservar à temperatura ambiente, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. Manter fora do alcance e da vista das crianças. A data de validade refere-se ao produto intacto e corretamente conservado.

VALIDADE

Ver a data de validade indicada na embalagem. Não utilizar após a data de validade indicada. Recomenda-se usar o produto no prazo de 3 meses após a abertura.

EMBALAGEM PARA VENDA

Frasco de vidro de 30 ml com spray nebulizador.

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO: 09/2024

PROPOLGEMMA: COMPLEXO MOLECULAR SINÉRGICO DE RESINAS, POLISSACARÍDEOS E LIGNINAS

Graças a uma investigação fitoquímica aprofundada e a processos de extração particulares, a partir dos rebentos de álamo preto foi possível desenvolver um extrato caracterizado pela presença de duas frações de compostos (multifração): uma fração característica do exsudado resinoso do rebento e rica em componentes típicos da própolis, e outra fração rica em compostos macromoleculares exclusivos do tecido vegetal do rebento, em particular os polissacarídeos e as ligninas.

A escolha de desenvolver uma formulação a partir dos rebentos de álamo preto está na base da inovação de Propolgemma, uma vez que a própolis de origem europeia é composta principalmente pelo exsudado resinoso deste tipo de rebentos.



 **Aboca S.p.A. Società Agricola**

Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia - www.aboca.com
Empresa com sistema de gestão de qualidade ISO 9001 ISO 13485
e sistema de gestão ambiental ISO 14001 certificados.



PTLEAPROGEB-A