

Fitonasal Spray

CONGESTÃO NASAL

Descongestiona e fluidifica

Protege e favorece a regeneração da mucosa

Sem conservantes - Sem gases propulsores

Adequado também para uso prolongado


DISPOSITIVO MÉDICO

Regulamento (UE) 2017/745

100%
FÓRMULA NATURAL
BIODEGRADÁVEL

sem
glúten

750
mOsm/kg

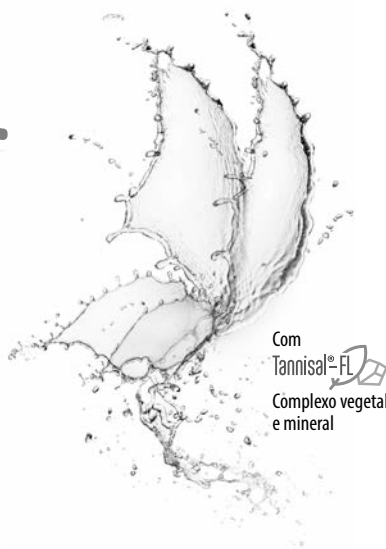

Com
Tannisal®-FL
Complexo vegetal
e mineral

SPRAY CONCENTRADO

Fitonasal Spray concentrado é um dispositivo médico que ajuda a libertar o nariz entupido, facilita a fluidificação e a remoção do muco das cavidades nasais e favorece a regeneração normal da mucosa. Na realidade, desenvolve uma **ação fisiológica descongestionante e protetora** como resultado dos seguintes mecanismos de ação:

Osmótica equilibrada

Fluidificante

Adstringente local

Antioxidante

Barreira

Reparadora

- **Osmótica equilibrada**

Favorece a eliminação da água presente nos tecidos congestionados sem causar irritação e secura, graças à osmolalidade equilibrada e padronizada (750 mOsm/kg).

- **Adstringente local**

Interage de forma não específica com algumas proteínas inflamatórias presentes nos fluidos nasais e permite a sua remoção.

- **Barreira**

Forma uma película sobre a mucosa e protege-a do contacto com agentes irritantes, favorecendo a manutenção da integridade da barreira epitelial.

- **Reparadora**

A proteção a nível local favorece o processo de regeneração normal da mucosa, reduzindo as microlesões presentes nas cavidades nasais provocadas por constipações, rinite e sinusite.

- **Antioxidante**

Reduz os radicais livres originados pela inflamação da mucosa.

- **Fluidificante**

Promove a hidratação do muco e favorece a sua eliminação.

A formulação proporciona um **efeito refrescante** agradável.

A conservação do produto é garantida pelo processo de produção com sistema de filtração esterilizante e embalagem em ambiente controlado microbiologicamente sem a utilização de conservantes.

INDICAÇÕES

Fitonasal Spray concentrado é um spray nasal indicado em todos os casos de congestão e irritação das cavidades nasais, tanto agudas como crónicas, provocadas por constipação, síndromes gripais, alergias (sazonais e perenes), rinossinusite (viral e bacteriana), rinite provocada por causas mecânicas e obstrutivas (por ex., desvios do septo nasal).

O produto pode ser utilizado a partir dos 6 anos de idade.

MODO DE USO

Posologia em adultos e jovens com mais de 12 anos: nebulizar 2 vezes em cada narina, assoar o nariz e repetir a aplicação.

Posologia em crianças dos 6 aos 12 anos: nebulizar 1 vez em cada narina, assoar o nariz e repetir a aplicação.

Nebulizar	Assoar	Voltar a nebulizar

Recomendamos a aplicação de **Fitonasal Spray concentrado** várias vezes ao longo do dia, mesmo com breves intervalos de tempo, e repetir a aplicação antes de dormir.

Após cada utilização, lavar o spray nebulizador com um pano húmido e limpo e secar bem.

Fitonasal Spray concentrado pode ser utilizado frequentemente e durante períodos prolongados, pois não contém descongestionantes vasoconstritores, não provoca dependência, não irrita e não seca a mucosa.

Se **Fitonasal Spray concentrado** for utilizado em conjunto com medicamentos de aplicação nasal, é aconselhável haver um intervalo mínimo de 1 hora entre a aplicação dos dois produtos.

COMPOSIÇÃO

Fitonasal Spray concentrado é um produto **100% natural e biodegradável** com Tannisal®-FL, complexo vegetal e mineral. Não contém substâncias de síntese, semissíntese ou geneticamente modificadas e, além disso, os processos de produção pelos quais é obtido também não utilizam solventes ou outras substâncias de síntese química.

1 ml de produto contém: complexo natural **Tannisal®-FL** 3,2 mg, à base de **Taninos e Flavonoides** (frações extrativas LPME de Hamamélis e Tomilho – 3 mg) e **Minerais** (Sal-gema de extração mineira não tratado quimicamente – 0,2 mg); Água; Glicerina vegetal; Aromas naturais de Eucalipto e Hortelã.

Uma nebulização corresponde a cerca de 0,14 ml.

As frações extrativas contidas no produto são obtidas através de um processo tecnológico exclusivo, designado LPME (Liquid-Phase Microextraction), desenvolvido pela investigação Aboca.

Fitonasal Spray concentrado é controlado de acordo com os seguintes parâmetros, graças aos quais a Aboca garante a qualidade dos produtos naturais na sua complexidade.

1. Impressão digital metabolômica através da tecnologia NIRS (Near-Infrared Spectroscopy)

para confirmar a validação do processo de produção do produto natural

2. Osmolalidade 750 mOsm/kg

para confirmar a eficácia descongestionante e a tolerabilidade

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Não utilizar se existir hipersensibilidade ou alergia individual em relação a um ou mais componentes. Utilizar exclusivamente por via nasal. Evitar o contacto com os olhos; se tal acontecer, lavá-los com água. Se os sintomas persistirem, consulte o médico ou o farmacêutico.

EFEITOS INDESEJÁVEIS

Fitonasal Spray concentrado, em geral, é bem tolerado. No entanto, se notar o aparecimento de um efeito indesejável devido ao produto ou à sua utilização, informe o médico e/ou o farmacêutico e o Fabricante Aboca, através dos contactos indicados neste folheto informativo. Em caso de incidente grave, informe também a autoridade competente do seu País.

SOBREDOSAGEM

Na população geral, com base nos dados disponíveis, não são conhecidos nem esperados quaisquer fenómenos causados por sobredosagem.

INTERAÇÕES COM OUTROS DISPOSITIVOS MÉDICOS, MEDICAMENTOS OU ALIMENTOS

De acordo com os dados disponíveis, não são esperadas interações de **Fitonasal Spray concentrado** com outros dispositivos médicos, medicamentos ou alimentos.

CONSERVAÇÃO E VALIDADE

Conservar à temperatura ambiente em local fresco, seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz.

Manter fora do alcance das crianças. A data de validade refere-se ao produto intacto e corretamente conservado.

A data de validade indicada na embalagem permanece inalterada também após a primeira nebulização. Recomenda-se que a embalagem seja guardada.

EMBALAGEM PARA VENDA

Fitonasal Spray concentrado: frasco de vidro de 30 ml com nebulizador.

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO: 03/2024



PARA A SAÚDE DE HOJE E DE AMANHÃ

Há mais de 40 anos nós, da Aboca, procuramos na Natureza as respostas para a saúde das pessoas, respeitando o organismo e o ambiente.

A INVESTIGAÇÃO ABOCA

Reconhecemos o potencial terapêutico das substâncias naturais complexas e projetamo-las do mundo da tradição para o da inovação, de acordo com os critérios da Evidence Based Medicine e da Systems Medicine.



100% NATURAL: DO CULTIVO AO PRODUTO ACABADO

Realizamos os nossos produtos graças ao sistema verticalizado que vai desde o cultivo biológico até à investigação científica e à produção, excluindo a utilização de substâncias de síntese química e não biodegradáveis ao longo de todo o processo.

A SAÚDE SUSTENTÁVEL

A saúde não é apenas um bem individual, mas também um Bem Comum. Por isso não pode existir uma verdadeira saúde sem sustentabilidade. Somos uma Benefit Corporation e com o nosso trabalho empenhamo-nos formalmente em trazer benefícios para a comunidade e o ambiente.

Para conhecer todos os nossos produtos, visite o site www.aboca.com

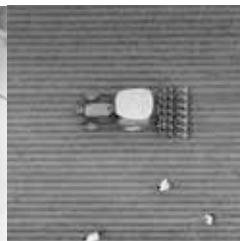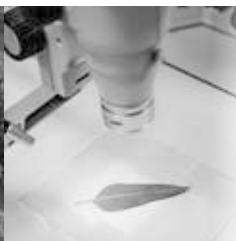

DISPOSITIVO MÉDICO Classe IIa



Aboca S.p.A. Società Agricola - Località Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia
www.aboca.com

Empresa com sistema de gestão de qualidade ISO 9001 e ISO 13485 e sistema de gestão ambiental ISO 14001 certificados.