

Fitonasal^{Spray}

NIEDROŻNOŚĆ NOSA

Udrażnia i rozrzedza

Chroni i wspomaga regenerację błony śluzowej

Bez konserwantów - Bez gazów pędnych

Do stosowania również przez dłuższy czas


WYRÓB MEDYCZNY

Rozporządzenie (UE) 2017/745

w **100%**
NATURALNA
BIODEGRADOWALNA
FORMUŁA

bez
glutenu

750
mOsm/kg

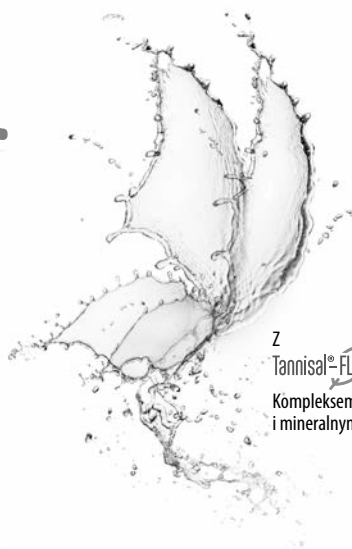

Z
Tannisal®-FL
Kompleksem roślinnym
i mineralnym

SKONCENTROWANY SPRAY

Fitonasal skoncentrowany spray jest wyrobem medycznym, który pomaga udrożnić zatkany nos, ułatwia rozrzedzenie i usunięcie śluzu z dróg nosowych oraz sprzyja prawidłowej regeneracji błony śluzowej. Ma **fizjologiczne działanie udrażniające i ochronne**, będące wynikiem następujących mechanizmów działania:

Zbilansowany mechanizm osmotyczny

Rozrzedzanie

Miejscowe działanie
ściągające

Antyoksydacja

Efekt bariery

Regeneracja

• Zbilansowany mechanizm osmotyczny

Wspomaga odprowadzanie wody z niedrożnych tkanek bez podrażniania i wysuszania, dzięki zbilansowanej i standaryzowanej osmolalności (750 mOsm/kg).

• Miejscowe działanie ściągające

W niespecyficzny sposób oddziałuje na niektóre białka zapalne występujące w wydzielinach nosowych i umożliwia ich usunięcie.

• Efekt bariery

Tworzy na błonie śluzowej film i chroni ją przed kontaktem z substancjami podrażniającymi, wspomagając zachowanie integralności bariery nabłonkowej.

• Regeneracja

Ochrona na poziomie miejscowym wspomaga prawidłowy proces regeneracji błony śluzowej, zmniejszając mikrouszkodzenia w jamach nosowych powstałe w wyniku przeziębienia, nieżyty nosa i zapalenia zatok.

• Antyoksydacja

Zmniejsza ilość wolnych rodników powstających z powodu stanów zapalnych błony śluzowej.

• Rozrzedzanie

Wspiera nawilżanie śluzu i wspomaga jego usuwanie.

Formuła pozostawia przyjemne **uczucie świeżości**.

Trwałość produktu jest zapewniona dzięki procesowi produkcyjnemu ze sterylizującym systemem filtracji oraz pakowaniu w środowisku kontrolowanym mikrobiologicznie, bez użycia konserwantów.

WSKAZANIA

Fitonasal skoncentrowany spray to spray do nosa wskazany we wszystkich przypadkach niedrożności i podrażnienia jam nosowych, występujących w sposób zarówno przewlekły, jak i ostry, spowodowanych przeziębieniem, zespołem grypowym, alergiami (sezonowymi i przewlekłymi), zapaleniem zatok przynosowych (wirusowym i bakteryjnym), nieżytem nosa z przyczyn mechaniczno-obturacyjnych (np. skrzywienie przegrody nosowej).

Produkt może być stosowany od 6. roku życia.

SPOSÓB UŻYCIA

Dawkowanie w przypadku dorosłych i młodzieży powyżej 12. roku życia: rozpylić produkt dwukrotnie w obydwu nozdrzach, wydmuchać nos i powtórzyć aplikację.

Dawkowanie w przypadku dzieci od 6. do 12. roku życia: rozpylić produkt jednokrotnie w obydwu nozdrzach, wydmuchać nos i powtórzyć aplikację.

Rozpylić	Wydmuchać	Rozpylić ponownie

Zaleca się stosowanie **Fitonasal skoncentrowany spray** kilkakrotnie w ciągu dnia, również w krótkich odstępach czasu, oraz powtórzenie aplikacji przed snem. Po każdym użyciu wyczyścić atomizer za pomocą czystej, wilgotnej szmatki i dokładnie wysuszyć. **Fitonasal skoncentrowany spray** może być stosowany często, także przez dłuższy czas, ponieważ nie zawiera składników udrażniających zwężających naczynia krwionośne, nie uzależnia, nie podrażnia ani nie wysusza błony śluzowej.

Jeśli **Fitonasal skoncentrowany spray** jest stosowany razem z lekami aplikowanymi do nosa, zaleca się, aby oba produkty były stosowane w odstępie co najmniej 1 godzinę.

SKŁAD

Fitonasal skoncentrowany spray jest produktem w **100% naturalnym i biodegradowalnym** z Tannisal®-FL, kompleksem roślinnym i mineralnym.

Nie zawiera substancji syntetycznych, półsyntetycznych ani modyfikowanych genetycznie, a w procesach produkcji, w których jest otrzymywany, nie stosuje się również rozpuszczalników ani substancji syntezy chemicznej.

1 ml produktu zawiera: naturalny kompleks **Tannisal®-FL** 3,2 mg, na bazie **tanin i flawonoidów** (frakcje ekstraktywne LPME z oczaru wirginijskiego i tymianku – 3 mg) oraz **minerałów** (halit pozyskiwany metodą wydobywczą, nieprzetwarzany chemicznie – 0,2 mg); wodę; glicerynę roślinną; naturalne aromaty z eukaliptusa i mięty.

Jedno użycie odpowiada około 0,14 ml produktu.

Zawarte w produkcie frakcje ekstraktywne są pozyskiwane w wyjątkowym procesie technologicznym LPME (Liquid-Phase Microextraction), opracowanym przez dział badań Aboca.

Fitonasal skoncentrowany spray jest kontrolowany zgodnie z poniższymi parametrami, dzięki którym Aboca gwarantuje jakość produktów naturalnych w całej ich złożoności.

1. Metabolomiczny cyfrowy odcisk palca z wykorzystaniem technologii NIR (near-infrared spectroscopy)

w celu potwierdzenia walidacji procesu produkcji produktu naturalnego

2. Osmolalność 750 mOsm/kg

w celu potwierdzenia skuteczności w zakresie udrażniania i tolerancji

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub alergii na jeden lub więcej składników. Stosować wyłącznie do nosa. Unikać kontaktu z oczami, w razie konieczności przemyć oczy wodą. Jeśli objawy utrzymują się, należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

EFEKTY NIEPOŻĄDANE

Fitonasal skoncentrowany spray jest, zasadniczo, dobrze tolerowany. Jednakże w przypadku zauważenia wystąpienia działania niepożądanego, które można przypisać produktowi lub jego stosowaniu, należy poinformować o tym lekarza i/lub farmaceutę oraz firmę Aboca, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w niniejszej ulotce.

W przypadku poważnego incydentu należy powiadomić również właściwy organ odpowiedzialny dla danego kraju.

PRZEDAWKOWANIE

W populacji ogólnej, w oparciu o dostępne dane, nie są znane ani spodziewane przypadki przedawkowania.

INTERAKCJE Z INNYMI WYROBAMI MEDYCZNYMI, LEKAMI LUB ŻYWNOSCIĄ

Na podstawie dostępnych danych nie przewiduje się interakcji **Fitonasal skoncentrowany spray** z innymi wyrobami medycznymi, lekami lub żywnością.

PRZECHOWYWANIE I OKRES WAŻNOŚCI

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i światła. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Okres ważności dotyczy produktu zamkniętego i właściwie przechowywanego.

Data ważności wskazana na opakowaniu nie ulega zmianie po pierwszym użyciu. Zaleca się zachowanie opakowania.

OPAKOWANIE W SPRZEDAŻY

Fitonasal skoncentrowany spray: butelka szklana 30 ml z atomizerem

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 03/2024

Aboca

DLA ZDROWIA DZISIAJ I JUTRO

Od ponad 40 lat w Aboca poszukujemy w naturze odpowiedzi na pytanie dotyczące zdrowia człowieka, z poszanowaniem dla organizmu i środowiska.

BADANIA ABOCA

Dostrzegamy potencjał leczniczy złożonych substancji naturalnych i przenosimy je ze świata tradycji do świata innowacji, zgodnie z kryteriami Evidence Based Medicine i Systems Medicine.



W 100% NATURALNY: OD UPRAW PO GOTOWY PRODUKT

Tworzymy nasze produkty z wykorzystaniem wertykalnego systemu, który zaczyna się od organicznych upraw, poprzez badania naukowe, do produkcji, wykluczając stosowanie substancji syntezy chemicznej oraz niebiodegradowalnych substancji w całym procesie.

ZRÓWNOWAŻONE ZDROWIE

Zdrowie jest nie tylko dobrem indywidualnym, ale także dobrem wspólnym. Z tego względu prawdziwe zdrowie nie może istnieć bez zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy spółką Benefit Corporation a poprzez naszą pracę formalnie angażujemy się w niesienie korzyści społeczności i środowisku.

Aby dowiedzieć się o wszystkich naszych produktach, odwiedź stronę www.aboca.com

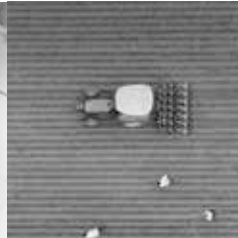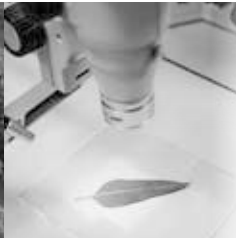

WYRÓB MEDYCZNY Klasy IIa



Aboca S.p.A. Società Agricola - Località Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia
www.aboca.com

Spółka posiada certyfikowane systemy zarządzania jakością ISO 9001 i ISO 13485 oraz systemy zarządzania środowiskiem ISO 14001.