

IRRITAZIONE NASALE E PERINASALE

Contrasta l'irritazione, protegge e rigenera la mucosa nasale e la cute perinasale



Con
Redraphen
Complesso vegetale

**ADULTI
E BAMBINI**
6+ MESI



BIOPOMATÀ

Fitonasal Biopomata è un dispositivo medico che contrasta in modo fisiologico l'**irritazione** e la **secchezza della mucosa nasale e della cute perinasale**. Svolge, infatti, un'**azione protettiva e antinfiammatoria indiretta** come risultato dei seguenti meccanismi d'azione:



- **Barriera:** forma un film emolliente e protettivo sulla mucosa nasale e sulla cute perinasale che limita il contatto con gli agenti esterni irritanti.
- **Idratante:** promuove il ripristino dell'equilibrio idro-lipidico dei tessuti e ne previene la disidratazione.
- **Antiossidante:** riduce i radicali liberi generati dall'infiammazione della mucosa.

Fitonasal Biopomata favorisce, inoltre, la **guarigione e la rigenerazione della mucosa nasale e il risanamento di abrasioni e screpolature della cute perinasale**. Il prodotto contribuisce, infine, a mantenere il naso libero più a lungo, promuovendo il riequilibrio della secrezione del muco, e dona una piacevole sensazione di freschezza.

La linea si completa con Fitonasal Nebulizzatore e Fitonasal Pediatric per una pulizia profonda delle cavità nasali di adulti e bambini e con Fitonasal Spray concentrato particolarmente utile negli episodi acuti di congestione nasale.

INDICAZIONI

Fitonasal Biopomata è indicato come **trattamento** in tutti i casi di:

- **irritazione della mucosa nasale** da rinorrea (naso che cola) in caso di raffreddore e varie forme di riniti acute e croniche;
- **secchezza e atrofia della mucosa nasale** dovute a condizioni patologiche acute e croniche (es. sinusite, rinite allergica, rinite vasomotoria), a trattamenti farmacologici (es. decongestionanti, cortisonici, antistaminici), al contatto con agenti esterni irritanti (es. microrganismi, polvere, fumo, smog, pollini, aria fredda), a permanenza in ambienti secchi o eccessivamente riscaldati;
- **irritazione, screpolature e abrasioni delle narici e della cute perinasale** dovute all'eccesso di muco e ai frequenti strofinamenti.

Può essere usato anche in **prevenzione**, nelle condizioni che possono provocare secchezza e prima di intraprendere attività sportive prolungate. Dai 6 mesi di età.

MODO D'USO

Si consiglia di dosare un'adeguata quantità di prodotto sul dito a seconda dell'età e delle dimensioni delle narici (indicativamente circa un chicco di caffè per gli adulti e circa la metà per i bambini). Applicarlo all'interno della narice e massaggiare delicatamente dal basso verso l'alto. In caso di irritazione, screpolature o piccole abrasioni della cute, applicare il prodotto anche sulla zona esterna del naso.



Il prodotto va applicato dopo una accurata pulizia del naso (preferibilmente dopo il lavaggio con acque nasali). Ripetere l'applicazione 3-4 volte al giorno ed in particolare la sera prima di coricarsi. In caso di terapia con altri prodotti ad applicazione nasale usare il prodotto 10-15 minuti dopo il trattamento. **Fitonasal Biopomata** può essere utilizzato anche per periodi prolungati. Se i sintomi persistono consultare, comunque, il medico o il farmacista.

COMPOSIZIONE

1 ml di biopomata contiene: complesso vegetale **Redraphen** 6 mg, a base di **Resine** e **Polisaccaridi** (frazione estrattiva di Incenso e gel fogliare disidratato di Aloe vera*), Olio di Jojoba* 146 mg, Acqua, Saccarosio stearato, Saccarosio distearato, Gliceril stearato, Alcool cetilsteirilico, Trigliceride caprilico/caprico, Gomma xanthan, Acido citrico, Tocoferoli, Sodio metasilicato, Alcool benzilico, Sodio deidroacetato, Olio di Girasole e Olio essenziale di Lavanda.

**Ingrediente da Agricoltura Biologica*

Non contiene Eucaliptolo e Mentolo. Non contiene SLS e SLES, parabeni, PEG, coloranti e profumi di sintesi. No OGM.

Fitonasal Biopomata è controllato secondo i seguenti parametri grazie ai quali Aboca garantisce la qualità dei prodotti naturali nella loro complessità.

1. Impronta digitale metabolomica tramite tecnologia NIR (near infrared spectroscopy)

a conferma della validazione del processo produttivo del prodotto naturale

2. Test di adesione

a conferma dell'azione barriera e protettiva sulle cellule della mucosa nasale

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO

Non utilizzare in presenza di gravi lesioni della mucosa ed epistassi. Non utilizzare se presente ipersensibilità o allergia individuale verso uno o più componenti.

EFFETTI INDESIDERATI

Fitonasal Biopomata, in genere, è ben tollerato. Tuttavia, se si nota la comparsa di un effetto indesiderato riconducibile al prodotto o al suo utilizzo, informare il medico e/o il farmacista e il Fabbricante Aboca ai contatti riportati su questo foglietto illustrativo. In caso di incidente grave informare anche l'autorità competente del proprio Paese.

SOVRADOSAGGIO

Nella popolazione generale, in funzione dei dati disponibili, non sono noti né attesi fenomeni dovuti al sovradosaggio.

INTERAZIONI CON ALTRI DISPOSITIVI MEDICI, MEDICINALI O ALIMENTI

Dai dati disponibili non sono attese interazioni di **Fitonasal Biopomata** con altri dispositivi medici, medicinali o alimenti.

CONSERVAZIONE E SCADENZA

Conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Tenere fuori dalla portata dei bambini. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Vedere la data di scadenza riportata sulla confezione. Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata. Si consiglia di usare il prodotto entro 6 mesi dall'apertura. Si raccomanda di conservare l'astuccio.

CONFEZIONE VENDITA: Tubo da 10 ml

DATA ULTIMA REVISIONE: Dicembre 2025



INDICAZIONI DI SMALTIMENTO

Verifica le disposizioni del tuo Comune

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Astuccio PAP 21 > **CARTA**

Foglietto PAP 22 > **CARTA**

Tubo ALU 41 > **ALLUMINIO**

Tappo HDPE 2 > **PLASTICA**

DISPOSITIVO MEDICO Classe IIa

CE 0477



Aboca S.p.A. Società Agricola - Loc. Aboca, 20
52037 Sansepolcro (AR) - Italia - www.aboca.com