

# Fitonasal Pediatric

## ЗАПУШЕН НОС

### Почиства, отпушва и защитава назалната лигавица

БАЛАНСИРАН И СТАНДАРТИЗИРАН ХИПЕРТОНИЧЕН РАЗТВОР

Без консерванти

МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ

Регламент (ЕС) 2017/745

**100%**  
НАТУРАЛНА И  
БИОРАЗГРАДИМА  
ФОРМУЛА



С  
**Tannisal®**  
Растителен  
и минерален  
комплекс

#### СПРЕЙ АЕРОЗОЛ

**Fitonasal Pediatric** е медицинско изделие, което отпушва и защитава назалната лигавица и освобождава носа от излишния мукус, както и от патогенните, дразнещите и алергизиращите агенти, уловени в него (*вируси, бактерии, дим, смог, полени, дразнещи съставки, и др.*). **Fitonasal Pediatric** има **измиващо, деконгестантно и защитно физиологично действие** в резултат на следните механизми на действие:

Балансирано  
осмотично

Локално  
стягащо

Дълбоко  
почистване

Барьера



Антиоксидантно  
действие

- **Балансирано осмотично**  
Помога за елиминиране на водата от отеклата назална лигавица, без да предизвиква раздразнение и сухота благодарение на балансираната и стандартизирана осмолалност (600 mOsm/Kg).
- **Локално стягащо**  
Взаимодейства неспецифично с някои възпалителни протеини, съдържащи се в назалните течности, и позволява тяхното отстраняване.
- **Барьера**  
Образува филм върху лигавицата и я предпазва от контакт с дразнещите агенти, като подпомага поддържането на целостта на епителната бариера.
- **Антиоксидантно действие**  
Намалява свободните радикали, образувани от възпалението на лигавицата.
- **Дълбоко почистване**  
Улеснява отстраняването на излишния мукус, както и на уловени в него патогени, алергени и други вещества благодарение на непрекъснатата аерозолна струя.

Действието на дълбоко почистване на носните кухини е особено подходящо за кърмачетата, които не могат да издухат носа си, както и за децата, които не го извършват правилно.

**Fitonasal Pediatric** се предлага във флакон със спрей по технологията **bag on valve** (BOV), която допринася за ефикасността на продукта и се отличава с много предимства:

- **Практичност** – технологията BOV позволява впръскване на непрекъснат поток във всички положения;
- **Ергономичност** – дозирацията накрайник е проектиран с внимание към носа на малките деца;
- **Качество** – продуктът е в изолирана от външната среда торбичка, която позволява излизането, но не и връщането на въздух, течности или други остатъци;
- **Опазване на околната среда** – съдържа пропелент (азот), който щади озоновия слой.

#### ПОКАЗАНИЯ

**Fitonasal Pediatric** е спрей за нос, показан за превенция и лечение на запушване и раздразнение на носните кухини, дължащи се на грипни състояния, настинка, алергични ринити и остри и хронични синусити.

Употребата на продукта подпомага дишането и улеснява нощния сън при най-малките.

**Fitonasal Pediatric** може да се използва и като допълващо лечение в случаи на кашлица и възпалено гърло, причинени от задно назално стичане и средни отити в резултат на назална конгестия.

Продуктът е подходящ за деца над 6-месечна възраст.

#### НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Да се използва най-малко **2 пъти дневно** сутрин и вечер, както и при необходимост. За ефикасно действие използвайте **Fitonasal Pediatric**, както е описано по-долу:

##### От 6 месеца до 1 година

	1. Поставете детето легнало на една страна, вкарайте накрайника в горната ноздра и впръскайте от продукта.		2. Повторете операцията и в другата ноздра, като поставите детето на другата страна.
--	--	--	--

##### Над 1 година

	1. Вкарайте накрайника в ноздрата и натиснете леко за няколко секунди.		2. Почистете носа или, ако е възможно, го издухайте и повторете впръскването в другата ноздра.
--	--	--	--

След всяка употреба почиствайте дозатора с чиста влажна кърпа и внимателно го подсушавайте.

**Fitonasal Pediatric** може да се използва често и за продължителни периоди от време, тъй като не съдържа вазоконстрикторни деконгестанти, не предизвиква пристрастяване, не дразни и не изсушава лигавицата. В случай че **Fitonasal Pediatric** се използва заедно с лекарства с назално приложение, се препоръчва двата продукта да се прилагат в интервал от поне 1 час.

#### СЪСТАВ

**Fitonasal Pediatric** е **100% натурален и биоразградим** продукт с Tannisal®, растителен и минерален комплекс. Не съдържа синтетични, полусинтетични или генетично модифицирани вещества, а също и при процесите, чрез които е получен, не се използват разтворители или други синтетични химични вещества.

1 ml от продукта съдържа: натурален комплекс **Tannisal®** 6,8 mg на основата на **Танини** (екстракционна фракция LPME от хамамелис – 0,2 mg) и **Минерали** (изкопаема каменна сол, необработена химически – 6,6 mg); вода; растителен глицерин; лимонен сок; Nahcolite (натурален натриев бикарбонат).

**Екстрактивната фракция, съдържаща се в продукта, е получена чрез ексклузивен технологичен процес, наречен LPME (Liquid-Phase Microextraction), разработен от научноизследователския отдел на Авоса.**

**Fitonasal Pediatric** се контролира по следните параметри, благодарение на които Авоса гарантира качеството на натуралните продукти в тяхната комплексност.

**1. Метаболомен отпечатък чрез NIRS (near-infrared spectroscopy) технология, потвърждаващ валидирането на производствения процес на натуралния продукт**

**2. Осмолалност 600 mOsm/Kg**

*потвърждаваща деконгестантната ефикасност и поносимостта*

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Да не се използва при свръхчувствителност или индивидуална алергия към една или повече съставки. Да се използва единствено за назално приложение. Да се избягва контакт с очите, при контакт очите да се промият с вода. Ако симптомите продължават, потърсете консултация с лекар или фармацевт.

#### НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

**Fitonasal Pediatric** обикновено е добре поносим. Въпреки това, ако забележите поява на нежелан ефект, свързан с продукта или неговата употреба, информирайте лекаря и/или фармацевта си, както и производителя Авоса чрез данните за контакт, посочени в тази информационна листовка. В случай на сериозен инцидент уведомете и компетентния орган във Вашата страна.

#### ПРЕДОЗИРАНЕ

В общата популация, според наличните данни, не са известни и не се очакват явления, дължащи се на предозиране.

#### ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ЛЕКАРСТВА ИЛИ ХРАНИ

Според наличните данни не се очакват взаимодействия на **Fitonasal Pediatric** с други медицински изделия, лекарства или храни.

#### СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА ГОДНОСТ

Да се съхранява при стайна температура на хладно и сухо, далече от източници на топлина и на защитено от светлина място. Срокът на годност се отнася за неотворена опаковка при правилно съхранение. Срокът на годност, посочен на опаковката, се запазва непроменен и след първото впръскване. Препоръчително е да запазите кутията.

**Внимание** - Съд под налягане: може да експлодира при нагряване. Да не се пробива и изгаря, дори след употреба. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. Да се пази от пряка слънчева светлина. **Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/122 °F.** Да се държи на места, недостъпни за деца.

#### ОПАКОВКА ЗА ПРОДАЖБА

**Fitonasal Pediatric:** Спрей аерозол от 125 ml

**ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:** 11/2024

# Авоса

#### ЗА ЗДРАВЕТО ДНЕС И УТРЕ

Повече от 40 години ние от Авоса търсим в природата отговорите за човешкото здраве, като го правим с грижа за организма и околната среда.

#### НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА АВОСА

Признаваме терапевтичния потенциал на сложните естествени вещества и ги пренасяме от света на традициите в света на иновациите според критериите на Медицината, основана на доказателства (Evidence Based Medicine) и Системната медицина (Systems Medicine).

#### 100% НАТУРАЛЕН: ОТ ОТГЛЕЖДАНЕТО ДО КРАЙНИЯ ПРОДУКТ

Произвеждаме нашите продукти благодарение на вертикализирана система, която започва от биологичното отглеждане, минава през научните изследвания и стига до производството, като през целия процес изключваме употребата на химично синтезирани вещества и такива, които не са биоразградими.

#### УСТОЙЧИВО ЗДРАВЕ

Здравето е не само индивидуално благо, то е и общо благо. Затова не може да съществува истинско здраве без устойчивост. Ние сме Benefit Corporation и с дейността си официално се ангажираме да работим в полза на обществото и околната среда.

За да се запознаете с всички наши продукти, посетете уебсайта [www.aboca.com](http://www.aboca.com)



МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ Клас IIa  0477

**Aboca S.p.A. Società Agricola** - Località Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia - [www.aboca.com](http://www.aboca.com)  
Компанията притежава сертифицирани системи за управление на качеството ISO 9001 и ISO 13485 и за управление на околната среда ISO 14001.