

# Fitonasal Spray

## ЗАПУШЕН НОС

Отпушва носа и втечнява секретите

Предпазва и подпомага възстановяването на лигавицата

Без консерванти - Без пропелентни газове

Подходящ и за продължителна употреба


МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ

Регламент (ЕС) 2017/745

**100%**  
НАТУРАЛНА И  
БИОРАЗГРАДИМА  
ФОРМУЛА

gluten  
free

750  
mOsm/Kg

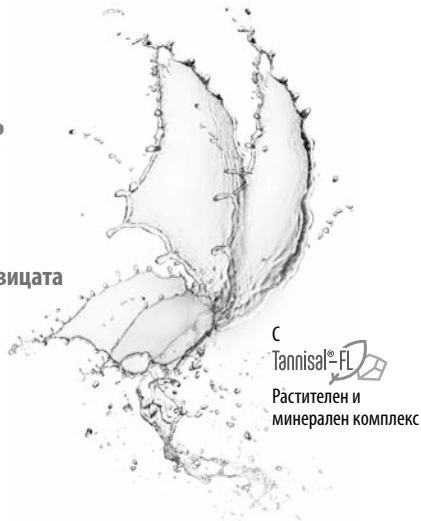

### СПРЕЙ КОНЦЕНТРАТ ЗА НОС

**Fitonasal спрей концентрат** е медицинско изделие, което помага за отпушване на носа, улеснява втечняването и отстраняването на мукуса от носните кухини и подпомага нормалната регенерация на лигавицата. На практика има **деконгестантно и защитно физиологично действие** в резултат на следните механизми на действие:

#### Балансирано осмотично



#### • Балансирано осмотично

Помага за елиминиране на водата от отеклата назална лигавица, без да предизвиква раздразнение и сухота благодарение на балансираната и стандартизирана осмолалност (750 mOsm/Kg).

#### • Локално стягащо

Взаимодейства неспецифично с някои възпалителни протеини, съдържащи се в назалните течности, и позволява тяхното отстраняване.

#### • Барьера

Образува филм върху лигавицата и я предпазва от контакт с дразнещите агенти, като подпомага поддържането на целостта на епителната бариера.

#### • Възстановяващо

Защитата на локално ниво подпомага нормалния процес на регенерация на лигавицата, като намалява микролезиите в носните кухини, дължащи се на настинки, ринити и синусити.

#### • Антиоксидантно

Намалява свободните радикали, образувани от възпалението на лигавицата.

#### • Втечняващо

Подпомага хидратацията на мукуса и улеснява отстраняването на секрета.

Формулата има приятен **освежаващ ефект**.

Съхранението на продукта е гарантирано от производствения процес чрез стерилизираща система за филтриране и опаковане в микробиологично контролирана среда, без използване на консерванти.

### ПОКАЗАНИЯ

**Fitonasal спрей концентрат** е спрей за нос, показан за всички случаи на запушване и раздразнение на носните кухини, както остри, така и хронични, дължащи се на настинка, грипни състояния, алергии (сезонни и целогодишни), риносинусити (вирусни и бактериални), ринити, възникващи по механично-обструктивни причини (напр. изкривяване на носната преграда). Продуктът може да се използва над 6-годишна възраст.

### НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Дозировка при възрастни и деца над 12 години: направете по 2 впръсквания във всяка ноздра, издухайте носа и повторете процедурата.

Дозировка при деца от 6 до 12 години: направете по 1 впръскване във всяка ноздра, издухайте носа и направете повторно впръскване.



Препоръчва се **Fitonasal спрей концентрат** да се прилага многократно през деня, дори на близки интервали и впръскването да се повтори преди лягане. След всяка употреба почиствайте дозатора с чиста влажна кърпа и внимателно го подсушавайте. **Fitonasal спрей концентрат** може да се използва често и за продължителни периоди от време, тъй като не съдържа вазоконстрикторни деконгестанти, не предизвиква пристрастяване, не дразни и не изсушава лигавицата. В случай че **Fitonasal спрей концентрат** се използва заедно с лекарства с назално приложение, се препоръчва двата продукта да се прилагат в интервал от поне 1 час.

## СЪСТАВ

**Fitonasal спрей концентрат** е **100% натурален** и **биоразградим** продукт с Tannisal®-FL, растителен и минерален комплекс. Не съдържа синтетични, полусинтетични или генетично модифицирани вещества, а също и при процесите, чрез които е получен, не се използват разтворители или синтетични химични вещества.

1 ml от продукта съдържа: натурален комплекс **Tannisal®-FL** 3,2 mg на основата на **Танини** и **Флавоноиди** (екстракционни фракции LPME от хамамелис и мащерка – 3 mg) и **Минерали** (изкопаема каменна сол, необработена химически – 0,2 mg); вода; растителен глицерин; натурални аромати от евкалипт и мента.

Едно впръскване съответства приблизително на 0,14 ml.

**Екстракционните фракции, съдържащи се в продукта, се получават чрез ексклузивен технологичен процес, наречен LPME (Liquid-Phase Microextraction), разработен от научноизследователския отдел на Aboca.**

**Fitonasal спрей концентрат** се контролира по следните параметри, благодарение на които Aboca гарантира качеството на натуралните продукти в тяхната комплексност.

- 1. Метаболомен отпечатък чрез NIRS (near-infrared spectroscopy) технология,**  
*потвърждаващ валидирането на производствения процес на натуралния продукт*
- 2. Осмолалност 750 mOsm/Kg**  
*потвърждаваща деконгестантната ефикасност и поносимостта*

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Да не се използва при свръхчувствителност или индивидуална алергия към една или повече съставки. Да се използва единствено за назално приложение. Да се избягва контакт с очите, при контакт очите да се промият с вода. Ако симптомите продължават, потърсете консултация с лекар или фармацевт.

## НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

**Fitonasal спрей концентрат** обикновено е добре поносим. Въпреки това, ако забележите поява на нежелан ефект, свързан с продукта или неговата употреба, информирайте лекаря и/или фармацевта си, както и производителя Aboca чрез данните за контакт, посочени в тази информационна листовка. В случай на сериозен инцидент уведомете и компетентния орган във Вашата страна.

## ПРЕДОЗИРАНЕ

В общата популация, според наличните данни, не са известни и не се очакват явления, дължащи се на предозиране.

## ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ЛЕКАРСТВА ИЛИ ХРАНИ

Според наличните данни не се очакват взаимодействия на **Fitonasal спрей концентрат** с други медицински изделия, лекарства или храни.

## СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА ГОДНОСТ

Да се съхранява при стайна температура на хладно и сухо, далече от източници на топлина и на защитено от светлина място. Да се държи на места, недостъпни за деца. Срокът на годност се отнася за неотворена опаковка при правилно съхранение. Срокът на годност, посочен на опаковката, се запазва непроменен и след първото впръскване. Препоръчително е да запазите кутията.

## ОПАКОВКА ЗА ПРОДАЖБА

**Fitonasal спрей концентрат:** Стъклен флакон от 30 ml с пулверизатор

**ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:** 03/2024

# Aboca

## ЗА ЗДРАВЕТО ДНЕС И УТРЕ

Повече от 40 години ние от Aboca търсим в природата отговорите за човешкото здраве, като го правим с грижа за организма и околната среда.

## НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА АВОСА

Признаваме терапевтичния потенциал на сложните естествени вещества и ги пренасяме от света на традициите в света на иновациите според критериите на Медицината, основана на доказателства (Evidence Based Medicine) и Системната медицина (Systems Medicine).

## 100% НАТУРАЛЕН: ОТ ОТГЛЕЖДАНЕТО ДО КРАЙНИЯ ПРОДУКТ

Произвеждаме нашите продукти благодарение на вертикализирана система, която започва от биологичното отглеждане, минава през научните изследвания и стига до производството, като през целия процес изключваме употребата на химично синтезирани вещества и такива, които не са биоразградими.

## УСТОЙЧИВО ЗДРАВЕ

Здравето е не само индивидуално благо, то е и общо благо. Затова не може да съществува истинско здраве без устойчивост. Ние сме Benefit Corporation и с дейността си официално се ангажираме да работим в полза на обществото и околната среда.

За да се запознаете с всички наши продукти, посетете уебсайта [www.aboca.com](http://www.aboca.com)



МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ Клас IIa  0477

 **Aboca S.p.A. Società Agricola** - Località Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia  
[www.aboca.com](http://www.aboca.com)

Компанията притежава сертифицирани системи за управление на качеството ISO 9001 и ISO 13485 и за управление на околната среда ISO 14001.