


FitoroiD^{neo}

Diskomfort způsobený hemoroidy

Zmírňuje bolest, pálení a svědění
a zároveň chrání sliznici

Obsahuje Helydol a čajovníkový olej

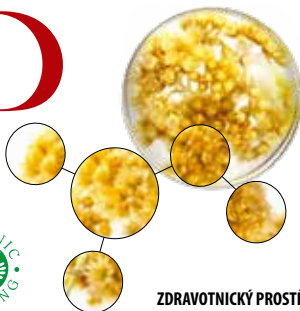

CE 0373

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK Třídy IIb

ENDOREKTÁLNÍ BIOMAST

CS MECHANISMUS ÚČINKU: NeoFitoroid zmírňuje podráždění, chrání sliznici a podporuje její regeneraci prostřednictvím **3 mechanismů účinku:**

- Mukoadhezivní účinek:** přilne ke sliznici a vytvoří na ni ochranný film, který ji chrání před kontaktem s dráždivými látkami.
- Lubrikační účinek:** snižuje tření při vyprazdňování stolice, čímž brání podráždění a otoku perianální oblasti.
- Antioxidační účinek:** chrání sliznici před volnými radikály, a tím nepřímo omezuje zánět.

NeoFitoroid navíc vytváří prostředí nepříznivé pro množení mikroorganismů, což přináší další ochranu proti svědění a pomáhá jej zmírňovat. Díky svým osvěžujícím vlastnostem poskytuje rychlou úlevu od nepřijemných pocitů.

NeoFitoroid neobsahuje kortikosteroidy ani anestetika a díky svému mechanismu účinku nedráždí ani nevyсуsuje sliznici.

INDIKACE: Biomast je určena k léčbě **hemoroidů** (vnitřních i vnějších) **a jejich příznaků**, jako jsou **bolest, pálení a svědění v oblasti análního otvoru a perianální zóny**. Lze ji používat **dokonce i při análních fisurách**. Je vhodná i **k preventivnímu použití a ve všech situacích**, které mohou způsobit **podráždění a/nebo otok** análního otvoru a jeho okolí (zácpa, průjem, nezdravá strava nebo životní styl). **Je vhodná také v těhotenství a během kojení.**

NÁVOD K POUŽITÍ: Při vnějším použití mast jemně naneste a vmasírujte do oblasti análního otvoru a jeho okolí. K vnitřní aplikaci použijte přiloženou endorektální kanylu, kterou lze našroubovat na tubu. Naneste dostatečné množství masti, aby pokryla postiženou oblast. Používejte po vyprazdnění a důkladném omytí anální a perianální oblasti. Jako prevenci podráždění způsobeného třením aplikujte přípravek před vyprazdněním a poté znovu po něm. Kanylu po použití odšroubujte, omyjte ji teplou vodou a mýdlem a tubu uzavřete. Aplikaci je možné opakovat i několikrát denně, krátce po sobě nebo dlouhodobě.

SLOŽENÍ: Funkční látky: Sušené extrakty z lipofilních frakcí kvetoucích květů smilů (Helydol)* a kořene listnatce pichlavého*, gel ze sušených listů aloe vera*, vodný roztok z květů smilů*, olejový extrakt z kvetoucí naří třezalky*, jobobový olej bambucké mášlo*, esenciální oleje z čajovníku, cypríše a máty peprné. Další složky: glyceryl stearát, kaprylový/kaprinový triglycerid, distearát sacharózy, stearát sacharózy, cetylstearylalkohol, rostlinný glycerin, trihydroxystearin, rostlinné oleje, hydrogenované rostlinné oleje, kandelilový vosk, xanthanová guma, kyselina citronová, tokoferoly, sodný silikát, benzylalkohol, sorban draselný, dehydroacetát sodný, slunečnicový olej. * Složka z ekologického zemědělství

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte v případě individuální přecitlivlosti nebo alergie na jednu či více složek.

Pokud příznaky přetrvávají, poradte se s lékařem. Skladujte při pokojové teplotě, mimo dosah zdrojů tepla a světla. Uchovávejte mimo dosah dětí. Datum použitelnosti se vztahuje na správně skladovaný produkt v neporušeném balení.

DATUM POUŽITELNOSTI: Viz datum použitelnosti uvedené na obalu. Po uvedeném datu použitelnosti nepoužívejte. Doporučuje se spotřebovat do 4 měsíců od otevření.

PRODEJNÍ BALENÍ: 40 ml tuba. Obsahuje endorektální aplikátor.

Datum revize: 03/2024



ABOCA – PRO ZDRAVÍ DNES I ZÍTRA

Aboca je společensky a environmentálně odpovědná společnost (Benefit Corporation).

Usilujeme o odpovědné podnikání, které je udržitelné a transparentní vůči společnosti i životnímu prostředí. Zpráva o společenském dopadu je dostupná na www.aboca.com.

Aboca S.p.A. Società Agricola

Località Aboca, 20 – 52037 Sansepolcro (AR) – Italia – www.aboca.com

Společnost vykonává svou činnost podle norem ISO 9001 a ISO 13485 v oblasti řízení kvality a podle normy ISO 14001 v oblasti environmentálního managementu.

OBALOVÉ MATERIÁLY		
Kartonový obal	PAP 21	Kartonový papír
Příbalová informace	PAP 22	Papír
Tuba	ALU 41	Hliník
Uzávěr	PP 5	Plast
Sáček na kanylu	PP 4	Plast
Kryt kanyly	LDPE 4	Plast
Kanyla	PP 5	Plast

Přípravek likvidujte v souladu s lokálními předpisy.

FitoroiD^{neo}

Diskomfort spôsobený hemoroidmi

Zmierňuje bolesť, pálenie a svrbenie
a zároveň chráni sliznicu

Obsahuje Helydol a čajovníkový olej



CE 0373

ZDRAVOTNÍČKA POMÔCKA Triedy IIb

ENDOREKTÁLNA BIOMASŤ

SK MECHANIZMUS ÚČINKU: NeoFitoroid zmierňuje podráždenie, chráni sliznicu a podporuje jej regeneráciu prostredníctvom 3 mechanizmov účinku:

1. **Mukoadhezívny účinok:** príľne k sliznici, na ktorej vytvorí film, ktorý ju chráni pred kontaktom s dráždivými látkami.
2. **Lubrikačný účinok:** zmierňuje trenie spôsobené vylučovaním stolice, čím chráni pred podráždením a opuchom perianálnej oblasti.
3. **Antioxidačný účinok:** chráni sliznicu pred voľnými radikálmi, čím nepriamo znižuje zápal.

NeoFitoroid navyše vytvára nepriaznivé prostredie pre rast mikroorganizmov, čo predstavuje ďalší účinok, ktorý chráni pred svrbením a zmierňuje ho. Jeho osviežujúce vlastnosti ponúkajú rýchlu úľavu od nepriemých pocitov. NeoFitoroid neobsahuje kortikosteroidy ani anestetiká a vďaka svojomu mechanizmu účinku nedráždi a nevysušuje sliznicu.

INDIKÁCIE: Biomast je indikovaná na liečbu **hemoroidov** (vnútorných aj vonkajších) a **ich príznakov**, ako sú **bolesť, pálenie a svrbenie análneho otvoru a perianálnej oblasti**. Môže sa používať **dokonca aj v prípade análnych fisúr**. Môže sa používať aj **v rámci prevencie a vo všetkých situáciách**, ktoré môžu vyvolať **podráždenie a/alebo opuch** análneho otvoru a perianálnej oblasti (zápcha, hnačka, nezdravé stravovanie alebo nezdravý spôsob života).

Je vhodná aj počas tehotenstva a dojčenia.

NÁVOD NA POUŽITIE: Pri vonkajšej aplikácii masť jemne naneste a vmasírujte do oblasti análneho otvoru a jeho okolia. Na vnútornú aplikáciu použite priložený endorektálnu kanylu, ktorá sa dá prískrutkovať na tubu. Naneste dostatok masť, aby pokryla postihnutú oblasť. Produkt používajte po vyprázdnení a dôkladnom umytí análneho otvoru a perianálnej oblasti. Ako preventívne opatrenie proti podráždeniu v dôsledku trenia vykonajte ošetrenie pred vyprázdnením a po ňom produkt aplikujte znova. Kanylu po použití odskrutkujte, dôkladne umyte mydlom a teplou vodou a tubu s masťou uzavrite. Aplikáciu možno opakovať niekoľkokrát denne, a to aj v krátkom slede za sebou alebo dlhodobo.

ZLOŽENIE: Funkčné látky: Vysušené extrakty z lipofilných frakcií kvitnúcich kvetov slamihy (Helydol)* a koreňa listnatka trínitého*, gél zo sušených listov aloe vera*, vodný roztok z kvitnúcich kvetov slamihy*, olejový výťažok z kvitnúcich kvetov ľubovníka*, jojobový olej, bambucké maslo*, esenciálne oleje z čajovníka, cyprusovníka a mäty piepornej.

Ďalšie zložky: glyceryl stearát, kaprylový/kaprinový triglycerid, distearát sacharózy, stearát sacharózy, cetylstearylalkohol, rastlinný glycerín, trihydroxystearín, rastlinné oleje, hydrogenvoňavé rastlinné oleje, kandelilový vosk, xantánová guma, kyselina citrónová, tokoferoly, silikát sodný, benzylalkohol, sorban draselný, dehydroacetát sodný, slnečnicový olej. * Zložka z ekologického poľnohospodárstva

UPOZORNENIA: Nepoužívajte v prípade individuálnej precitlivosti alebo alergie na jednu či viacero zložiek. Ak príznaky pretrvávajú, obráťte sa na lekára. Skladujte pri izbovej teplote mimo zdrojov tepla a svetla. Uchovávajte mimo dosahu detí. Dátum použiteľnosti sa vzťahuje na správne skladovaný produkt v neporušenom balení.

DÁTUM POUŽITEĽNOSTI: Pozri dátum použiteľnosti uvedený na obale. Nepoužívajte po dátume použiteľnosti. Odporúča sa použiť produkt do 4 mesiacov od otvorenia.

PREDAJNÉ BALENIE: 40 ml tuba. Obsahuje endorektálnu aplikátor.

Dátum revízie: 03/2024



ABOCA – PRE ZDRAVIE DNES I ZAJTRA

Aboca je sociálne a environmentálne zodpovedná spoločnosť (Benefit Corporation).

Našou snahou je zodpovedné podnikanie, ktoré je udržateľné a transparentné vo vzťahu k spoločnosti a životnému prostrediu. Správa o vplyve spoločnosti je k dispozícii na adrese www.aboca.com.



MATERIÁLY BALENIA

Kartónový obal	PAP 21	Kartónový papier
Príbalová informácia	PAP 22	Papír
Tuba	ALU 41	Hliník
Uzáver	PP 5	Plast
Vrecúško kanyly	PP 4	Plast
Kryt kanyly	LDPE 4	Plast
Kanyla	PP 5	Plast

Prípravok likvidujte v súlade
s lokálnymi predpismi.

Aboca S.p.A. Società Agricola

Località Aboca, 20 – 52037 Sansepolcro (AR) – Italia – www.aboca.com

Spoločnosť vykonáva svoju činnosť podľa noriem ISO 9001 a ISO 13485 v oblasti systémov manažérstva kvality a podľa normy ISO 14001 v oblasti systémov environmentálneho riadenia.



ZLEAR012-A