

Bianacid^{neo}

REFLUX, ACIDITÉ
ET DIGESTION DIFFICILE

sans
gluten

sans lactose

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

ACTION RAPIDE

CONTRE LES BRÛLURES, MAUX D'ESTOMAC, LA
SENSATION DE LOURDEUR ET LES BALLONNEMENTS

Avec le complexe végétal et minéral

poliprotect[®]

à l'action protectrice


similaire à celle du mucus

DISPOSITIF MÉDICAL
Règlement (UE) 2017/745

100 %
FORMULE
NATURELLE

COMPRIMÉS À SUCER

NeoBianacid avec Poliprotect[®] renforce l'action protectrice du mucus qui recouvre naturellement la muqueuse.

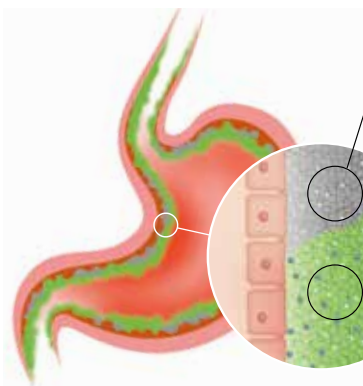

MUCUS GASTRIQUE

Fonction
physiologique
de protection

Poliprotect[®]

Complexe végétal et
minéral naturel à **L'ACTION
PROTECTRICE SIMILAIRE
À CELLE DU MUCUS**

NeoBianacid agit rapidement en formant un film à l'effet barrière avec activité :

- **Protectrice**
Grâce à sa haute affinité vis-à-vis de la muqueuse gastro-œsophagienne, il forme un film qui protège et favorise les processus physiologiques de réparation.
- **Neutralisante locale de l'acidité**
Il renforce les propriétés neutralisantes locales du mucus gastrique, en empêchant le contact des acides avec la muqueuse gastrique et en prévenant ses dommages.
- **Antioxydante**
Il empêche l'irritation due aux radicaux libres.

De cette manière, il protège la muqueuse du contact avec les sucs gastriques et les substances irritantes. **NeoBianacid** module l'acidité sans la supprimer, en respectant ainsi la physiologie de l'estomac et la fonctionnalité de la flore intestinale.

NeoBianacid est 100 % naturel et agit aussi dans le respect de l'environnement.

INDICATIONS

NeoBianacid est indiqué pour le traitement du **reflux gastro-œsophagien** et des **maux d'estomac** (dyspepsie douloureuse), caractérisés par des régurgitations d'acide, des brûlures, des douleurs, une toux d'irritation, une dysphonie.

NeoBianacid est également indiqué pour le traitement des symptômes associés à la **digestion difficile** (dyspepsie non douloureuse), tels que l'acidité, la sensation de lourdeur et les ballonnements après les repas, aussi bien récurrents qu'en cas d'excès alimentaires.

NeoBianacid peut être utile dans la **prévention** de situations susceptibles de générer des irritations de la muqueuse (par exemple, prise de médicaments anti-inflammatoires ou périodes de stress psycho-physique). Le produit peut être également utilisé au cours de la grossesse, durant l'allaitement, et chez les enfants de plus de 6 ans.

MODE D'EMPLOI

Prendre un comprimé en le laissant fondre dans la bouche ou en le croquant selon les indications suivantes :

- **En cas de symptômes occasionnels** : prendre 1 comprimé au besoin.
- **Pour le traitement** du reflux gastro-œsophagien, des maux d'estomac et de la digestion difficile : 1 comprimé après les repas et 1 le soir avant le coucher. En plus du traitement, le produit peut être pris également au besoin, plusieurs fois dans la journée, même à quelques heures d'intervalle.
- **En association** avec des inhibiteurs de la pompe à protons et antagonistes H2, et durant les périodes de suspension du traitement : prendre le produit au besoin ou selon les indications du médecin.

Il est conseillé de ne pas prendre plus de 8 comprimés par jour. Le produit peut être pris également pendant de longues périodes. Le produit peut être également administré aux enfants de plus de 6 ans, selon la même posologie. Fermer soigneusement le flacon après l'emploi.

COMPOSITION

NeoBianacid est un produit **100 % naturel à base d'ingrédients issus de l'Agriculture Biologique**, contenant Poliprotect[®], complexe végétal et minéral. Il ne contient pas de substances de synthèse, semi-synthèse ou génétiquement modifiées, et les processus de fabrication à travers lesquels il est obtenu n'utilisent ni solvants ni autres substances de synthèse chimique. Un comprimé de 1,55 g contient : complexe naturel **Poliprotect[®]** 528 mg, à base de **Polysaccharides** (fractions extractives LPME de Mauve* et Guimauve officinale* ; gel foliaire déshydraté d'Aloe Vera* - 105 mg) et **Minéraux** (Carbonate de Calcium et Nahcolite 423 mg) ; **Fraction flavonoïque** extractive LPME de Camomille* et Réglisse* - 46 mg ; Sucre de canne* ; Gomme arabique ; Arôme naturel de Menthe ou Arôme naturel de Citron.

*Ingrédient issu de l'Agriculture Biologique

Chaque comprimé contient 136 mg (3,4 mmol) de calcium.

Les fractions extractives contenues dans le produit sont obtenues par un processus technologique exclusif, appelé LPME (Liquid-Phase Microextraction), développé par la recherche Aboca.

NeoBianacid est contrôlé selon les trois paramètres suivants grâce auxquels Aboca garantit la qualité des produits naturels dans leur complexité.

- 1. Empreinte digitale métabolomique utilisant la technologie NIRS (near-infrared spectroscopy)**
pour confirmer la validation du processus de production du produit naturel
- 2. Test d'adhérence**
pour confirmer l'action barrière et protectrice sur les cellules gastriques et œsophagiennes
- 3. Titre en polysaccharides $\geq 1,8\%$**
(masse moléculaire $> 20\,000$ Dalton)

MISES EN GARDE

Ne pas utiliser le produit en cas d'hypersensibilité ou d'allergie individuelle envers un ou plusieurs des composants. Si les symptômes persistent, consulter un médecin ou un pharmacien. Le contenu en glycyrrhizine issu de la Réglisse est inférieur à celui susceptible de causer une éventuelle augmentation de la tension.

EFFETS INDÉSIRABLES

NeoBianacid est en général bien toléré. Toutefois, en cas d'apparition d'un effet indésirable imputable au produit ou à son utilisation, il faut en informer le médecin et/ou le pharmacien ainsi que le Fabricant Aboca en utilisant les coordonnées indiquées sur cette notice. En cas d'incident grave, veuillez également informer l'autorité compétente de votre pays.

SURDOSAGE

Dans la population générale, selon les données disponibles, aucun phénomène dû à un surdosage n'est connu ou attendu.

INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS, DISPOSITIFS MÉDICAUX, OU ALIMENTS

Il est conseillé de prendre le produit au moins deux heures avant ou après la prise de médicaments, en particulier les tétracyclines. Aucune interaction de NeoBianacid avec d'autres dispositifs médicaux ou aliments n'est connue.

CONSERVATION ET DATE DE PÉREMPTION

Conserver à température ambiante, loin de toute source de chaleur et à l'abri de la lumière. Tenir hors de portée des enfants. La date de péremption se réfère au produit intact et conservé correctement. Voir la date de péremption indiquée sur l'emballage. Ne pas utiliser au-delà de la date indiquée. Il est conseillé de conserver la boîte.

FORMATS DISPONIBLES À LA VENTE

14/45/70 comprimés à sucer goût Menthe de 1,55 g chacun, dans un flacon en verre.

14/45/70 comprimés à sucer goût Citron de 1,55 g chacun, dans un flacon en verre.

DATE DE LA DERNIÈRE RÉVISION : 04/2024



POUR LA SANTÉ D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN

Depuis plus de 40 ans, chez Aboca nous cherchons les réponses pour la santé des personnes au cœur de la Nature, dans le respect de l'organisme et de l'environnement.

LA RECHERCHE ABOCA

Nous reconnaissons le potentiel thérapeutique des substances naturelles complexes et nous les projetons depuis le monde de la tradition vers celui de l'innovation, selon les critères de l'Evidence-Based Medicine et de la Systems Medicine.

100 % NATUREL : DE LA CULTURE AU PRODUIT FINI

Nous réalisons nos produits grâce à un système verticalisé qui va de la culture biologique jusqu'à la production, en passant par la recherche scientifique, excluant l'utilisation de substances de synthèse chimique tout au long du processus.

LA SANTÉ DURABLE

La santé n'est pas seulement un bien individuel, mais également un Bien Commun. C'est pourquoi une vraie santé ne peut exister sans développement durable. Nous sommes une Benefit Corporation ; avec notre travail, nous nous engageons formellement à créer des bénéfices pour la communauté et l'environnement.

Pour découvrir tous nos produits, visitez notre site www.aboca.com



www.neobianacid.fr

Résumé des caractéristiques de sécurité et des performances cliniques (SSCP)

Le résumé des caractéristiques de sécurité et des performances cliniques du dispositif est disponible dans la base de données Eudamed au lien <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>, en recherchant le code Basic UDI-DI suivant : 8032472BIOANAb2AA. Ce résumé est également disponible sur le site web du fabricant.

DISPOSITIF MÉDICAL Classe III



Aboca S.p.A. Società Agricola

Località Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia - www.aboca.com

Entreprise avec système de management de la qualité ISO 9001 et ISO 13485
et système de management environnemental ISO 14001 certifiés.



FILEA_BIANCOX-A