

Propol gemma

Calma l'irritazione e riduce il dolore
della gola e del cavo orale

Complesso molecolare
sinergico di resine,
polisaccaridi e lignine
100% vegetale



100%
FORMULA NATURALE
BIODEGRADABILE

DISPOSITIVO MEDICO
Classe IIa

PROPOLGEMMA SPRAY NO ALCOOL ADULTI E BAMBINI

Propolgemma spray no alcool è un Dispositivo Medico innovativo appositamente studiato per contrastare gli stati irritativi del cavo orofaringeo come mal di gola e altre affezioni del cavo orale (stomatiti, afte e gengiviti).

Propolgemma è un complesso molecolare esclusivo frutto della ricerca Aboca, composto da resine, polisaccaridi e lignine ottenuto da Gemme di Pioppo nero, dalla cui resina le api ricavano la Propoli europea.

Grazie a un particolare processo estrattivo, **Propolgemma** si caratterizza per la presenza dei **componenti principali tipici della Propoli** uniti a **composti funzionali del tessuto vegetale della Gemma di Pioppo** (vedi box di approfondimento).

La ricerca Aboca ha sviluppato così un complesso molecolare con particolari capacità di protezione delle mucose del cavo orofaringeo.

COME AGISCE

La **frazione resinosa** e la **frazione ricca in composti polisaccaridici e lignine**, agiscono in sinergia formando una **barriera protettiva** sulla mucosa infiammata che, unita alle **proprietà antiossidanti dei flavonoidi**, **combatte indirettamente l'infiammazione**.


Questo strato protettivo-attivo calma il bruciore, riduce l'ipersensibilità, alleviando la sensazione di fastidio e facilitando la deglutizione.

Le frazioni contenute in **Propolgemma**, inoltre, creano un ambiente sfavorevole alla crescita dei batteri.

INDICAZIONI

Propolgemma spray no alcool è indicato nel trattamento del **mal di gola e delle affezioni del cavo orale** (come stomatiti, afte e gengiviti) associati a bruciore, dolore e sensibilità alla deglutizione.

Può essere usato anche in caso di **piccole lesioni della bocca** dovute ad esempio a trattamenti dentari o all'uso di apparecchi ortodontici e dentiere.

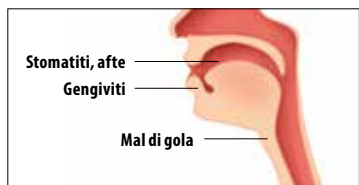

Il prodotto può essere utilizzato anche come protezione preventiva, in tutti i casi in cui si è esposti ad agenti esterni offensivi o irritanti (freddo, fumo, smog).

Si consiglia l'uso a partire dai 3 anni di età.

MODO D'USO

Agitare il flacone prima dell'uso. L'astuccio contiene l'erogatore in bustina sigillata. Al primo utilizzo eliminare il tappo in alluminio sul flacone ed inserire l'erogatore. Mediante l'apposito applicatore si consiglia di somministrare nel cavo orofaringeo **2 nebulizzazioni fino a 2 volte al giorno nei bambini; 4 nebulizzazioni nel cavo orofaringeo fino a 4 volte al giorno negli adulti**. In caso di affezioni localizzate, applicare direttamente sulla parte interessata. L'eventuale presenza di piccoli depositi è dovuta alla elevata concentrazione degli estratti e non pregiudica la qualità del prodotto.

COMPOSIZIONE

Sostanze funzionali: Propolgemma complesso molecolare di resine, polisaccaridi e lignine (ottenuto da Gemme di Pioppo nero, *Populus nigra* L.) in estratto secco multifrazione 0,6%, titolato in **Flavonoidi totali $\geq 15\%$ e Polisaccaridi** (con peso molecolare maggiore di 20.000 Da) $\geq 4\%$.

Contiene inoltre: Acqua, Glicerina vegetale, Succo di Mela, Gomma arabica, Succo di Limone, Aroma naturale di Ciliegia e Fragola.

Il processo produttivo utilizzato assicura l'assenza di polline derivante da Gemme di Pioppo.

AVVERTENZE

Non utilizzare se presente ipersensibilità o allergia individuale verso uno o più componenti. Controindicato nei soggetti allergici alla Propoli e negli asmatici. Se i sintomi persistono consultare il medico. Conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Tenere fuori dalla portata dei bambini. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.

SCADENZA

Vedere la scadenza riportata sulla confezione. Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata. Si consiglia di usare il prodotto entro 3 mesi dall'apertura.

CONFEZIONE VENDITA

Flacone in vetro da 30 ml con nebulizzatore spray.

DATA ULTIMA REVISIONE: Marzo 2026.

PROPOLGEMMA: COMPLESSO MOLECOLARE SINERGICO DI RESINE, POLISACCARIDI E LIGNINE

Grazie ad un'approfondita ricerca fitochimica e a particolari processi estrattivi, dalle Gemme di Pioppo nero è stato possibile sviluppare un estratto che si caratterizza per la presenza di due frazioni di composti (multifrazione): l'una caratteristica dell'essudato resinoso della gemma e ricca dei componenti tipici della Propoli, l'altra ricca di composti macromolecolari esclusivi del tessuto vegetale della gemma, in particolare polisaccaridi e lignine.

La scelta di sviluppare una formulazione partendo dalle Gemme di Pioppo nero sta alla base dell'innovazione di Propolgemma, in quanto la Propoli di origine europea è composta principalmente dall'essudato resinoso di questa tipologia di gemme.



Aboca S.p.A. Società Agricola

Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia - www.aboca.com

Azienda con sistema di gestione qualità ISO 9001 e ISO 13485

e sistema di gestione ambientale ISO 14001 certificati.



LEAPROGES2-D